




Phonak RemoteMic est une solution permettant de diffuser la voix d'un locuteur, via Phonak ComPilot, dans des aides auditives sans fil de Phonak. Ce processus améliore l'expérience auditive à l'écoute d'un intervenant ou d'une source sonore situé dans un environnement bruyant ou jusqu'à 20 m (60 ft) de distance. RemoteMic est un microphone basé sur Bluetooth. Il se fixe sur un des vêtements de l'interlocuteur.

Description

1. Plus fort ou couplage (🔊)
2. Moins fort (🔇)
3. Commutateur Marche/Arrêt (🔌)
4. Prise de recharge (mini-USB)
5. Entrée du microphone
6. Indicateur d'état
7. Oeillet du cordon de sécurité
8. Clip de maintien

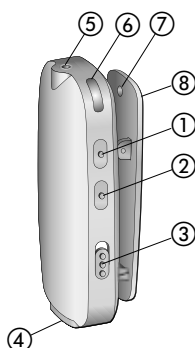

Fonctions spéciales

- Compatible avec Phonak ComPilot et iCom
- Microphone sans fil basé sur Bluetooth 2.1
- Compatible avec la diffusion audio large bande des aides auditives pour une sonorité vocale naturelle
- Inutile d'être en vue des aides auditives
- Jusqu'à 8 heures de diffusion
- Jusqu'à 20 mètres de portée de fonctionnement
- Configuration et utilisation simples
- Accumulateur rechargeable intégré

Informations générales

Dimensions:	L x l x H: 52 x 22 x 12/18 mm (2.2 x 0.9 x 0.5/0.8 pouces)
Poids:	13g
Couleur:	Argent métallisé
Conditions de fonctionnement:	Sauf cas particulier précisé dans le mode d'emploi, ce produit a été conçu pour fonctionner correctement quand il est utilisé dans les règles: -10°/ +55° Celsius et humidité relative < 95% (sans condensation).
Conditions de transport et de stockage:	Température -20°/+60° Celsius et 90% d'humidité relative pour une période prolongée.

Indicateur d'état

Statut RemoteMic

Recherche d'un appareil couplé	Vert continu	
Diffusion	Bleu continu	
Pause	Clignotement bleu	
Couplage	Clignotement rapide bleu	
Mise en marche	Vert pendant 2 secondes	
Mise à l'arrêt	Rouge pendant 2 secondes	
Recharge	Rouge continu	
Totalement rechargé avec le chargeur connecté	Vert continu	
Alerte de décharge de l'accumulateur	Brefs clignotements rouges supplémentaires	
RemoteMic en mode veille ou arrêté	Indicateur d'état totalement éteint	

Informations sur l'accumulateur et la recharge

Informations sur l'accumulateur:

Type:	Lithium-polymère 3,7 V continus Intégré, non démontable Capacité: 200 mAh (typique) Temps de recharge: 2 heures (typique)
Autonomie:	Jusqu'à 8 heures de diffusion

Informations sur la recharge:

Tension d'entrée:	Type : continu, stabilisé, 5V \pm 5% Port mini-USB Courant d'entrée: 300 mA max. L'accumulateur ne peut pas être surchargé. Il peut chauffer pendant la recharge.
Remarque importante:	Pour des raisons de sécurité, utiliser exclusivement les chargeurs fournis par Phonak ou des chargeurs stabilisés de caractéristiques 5 V continus, 250 mA min.

Informations audio


Entrée audio:	Vocale, microphone omnidirectionnel
---------------	-------------------------------------

Basé sur la technologie Bluetooth®

Profil Bluetooth:	
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	<ul style="list-style-type: none"> Optimisé pour être utilisé avec Phonak ComPilot La conformité avec les appareils autres que Phonak n'est pas garantie
Bande passante:	2402.0 à 2480.0 MHz
Puissance RF:	10 mW max.
Portée Bluetooth:	Jusqu'à 20 m (66 ft.)
Conformité Bluetooth:	Bluetooth version 2.1, Classe 1
Maximum d'appareils couplés:	4
QDID:	B019653

Normes

Europe	
Radio:	EN 300 328
CEM:	EN 301.489
Sécurité électrique:	EN 60950-1
USA	
	CFR 47, part 15
Canada	
	RSS-210 Issue 7

	Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Toutes les autres marques déposées ou appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
--	--

Accessories

(Le contenu peut varier selon le pays)

- Doubleur mini-USB (1 entrée / 2 sorties)
- Cordon de sécurité amovible
- Etui de protection
- Mode d'emploi
- Guide d'installation rapide

Note sur la compatibilité:

RemoteMic est conçu pour être utilisé avec ComPilot et les autres accessoires de diffusion Phonak.



Information de couplage Bluetooth®

Couplage Bluetooth manuel:

Commutez le commutateur Marche/Arrêt d'Arrêt à Marche tout en pressant la touche (+).

Suppression du couplage des appareils Bluetooth:

Commutez le commutateur Marche/Arrêt d'Arrêt à Marche tout en maintenant pressée la touche (+) pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu cesse de clignoter.