

Phonak

Fast Facts

Installation Roger™ via les microphones Roger iN

En quoi consistent les microphones Roger iN ?

Les microphones Roger iN sont trois nouveaux microphones Roger : Roger Select iN, Roger Pen iN et Roger Table Mic II, conçus pour être utilisés avec les aides auditives Marvel. Ils permettent d'installer deux récepteurs Roger dans une paire d'aides auditives Marvel afin de transmettre directement depuis un microphone Roger sans devoir fixer physiquement un écouteur externe.


Quels sont les avantages ?

Après une procédure d'installation simple, les patients peuvent utiliser un microphone Roger iN avec leurs aides auditives Marvel afin d'améliorer les performances auditives dans le bruit et à distance. Grâce à cette solution conçue en toute discrétion, ils peuvent participer pleinement aux conversations de groupe, même dans des environnements particulièrement bruyants comme les restaurants, les réunions de travail et les activités scolaires.


Comment l'utiliser ?

Pour commencer, allumez le microphone Roger iN et l'aide auditive Marvel. À l'aide de l'outil en forme d'épingle, appuyez et maintenez le bouton d'installation enfoncé pendant deux secondes, puis placez le microphone Roger iN à proximité de l'aide auditive. La procédure d'installation est entièrement automatique, et une série de témoins lumineux confirmera que le récepteur a été installé. Pour ceux qui ont besoin de restaurer le récepteur pour l'utiliser avec une aide auditive différente, il faut suivre la même procédure pour désinstaller le récepteur.

Outil en forme d'épingle et bouton d'installation
Roger Select iN

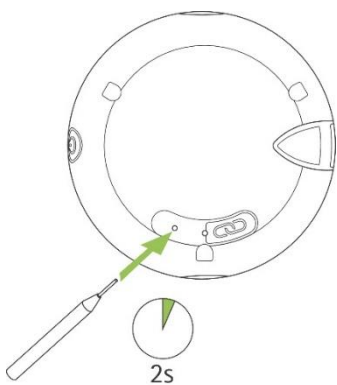

Outil en forme d'épingle et bouton d'installation
Roger Pen iN

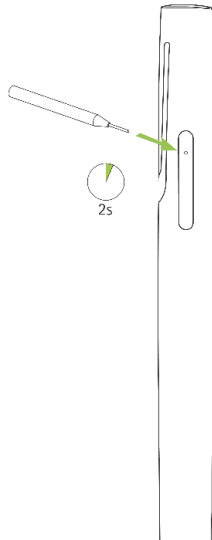

Outil en forme d'épingle et bouton d'installation
Roger Table Mic II iN

