

# Guide d'appareillage Roger Select

roger



## Mode de vérification et d'ajustement de la portée


### Sommaire

1. Mode de vérification
2. Mode d'ajustement de la puissance radio

### 1. Mode de vérification avec ajustement du volume


Ce mode permet de contrôler le signal de Roger selon les directions de l'ASHA et d'ajuster le volume par défaut d'un récepteur Roger, sur une plage allant de -8 à +8 dB.

Pour activer le mode de vérification, allumez le Roger Select et tenez-le à proximité du récepteur Roger (à moins de 10 cm de distance), puis maintenez enfoncée la touche de direction près du bouton Marche/Arrêt et de la prise micro-USB, jusqu'à ce que le témoin lumineux Marche/Arrêt clignote en orange :

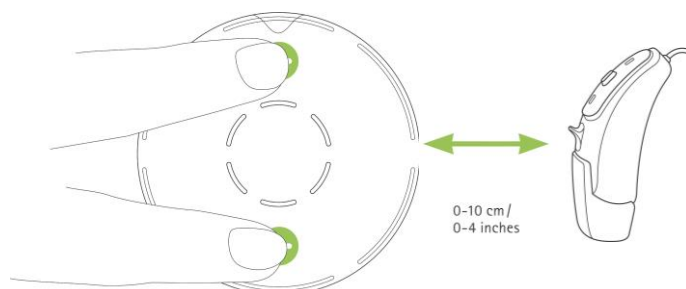


Une fois le mode de vérification activé, vous pouvez augmenter la distance entre Roger Select et l'aide auditive. Vous pouvez désormais exécuter le protocole de vérification et ajuster le volume par défaut si nécessaire :

Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche de direction en haut à droite  
Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche de direction en haut à gauche

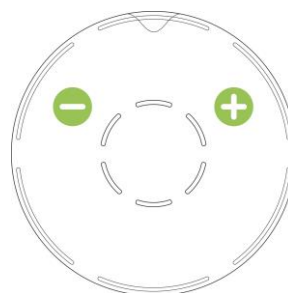

Vous pouvez augmenter/diminuer le volume de 4 niveaux dans chaque direction. Chaque niveau correspond à un changement de volume de l'ordre de 2 dB.

Le cercle formé par les témoins lumineux indique le volume actuellement sélectionné.

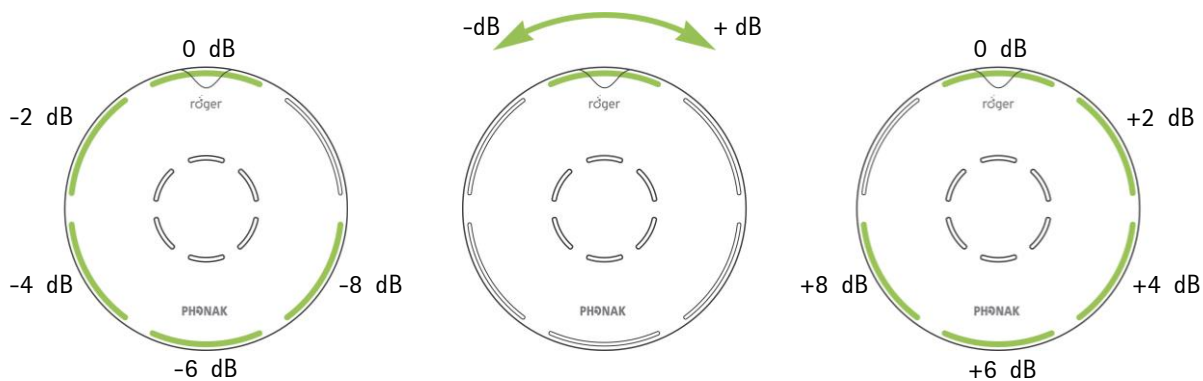


Pour enregistrer le nouveau volume et mettre fin à la procédure, appuyez sur la touche tactile centrale de Roger Select. Relancez la vérification et l'ajustement du volume par défaut sur le deuxième récepteur si nécessaire.

## 2. Mode d'ajustement de la portée

Si la portée de transmission de Roger Select vers les aides auditives est insuffisante, il est possible de l'étendre.

Après avoir allumé Roger Select, maintenez enfoncées les quatre touches de direction suivantes pendant deux secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux Marche/Arrêt clignote en orange :

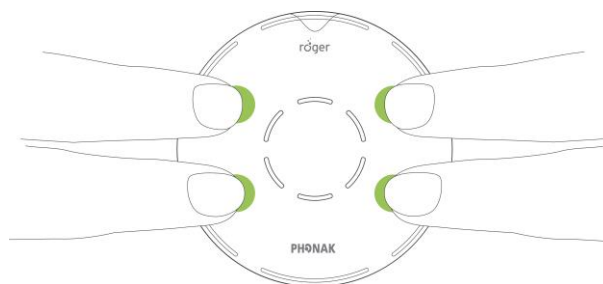


Quand le mode d'ajustement de la portée est activé, vous avez le choix entre deux paramètres :

Pour étendre la portée, appuyez sur la touche de direction supérieure  
Pour activer la portée par défaut, appuyez sur la touche de direction inférieure



Le cercle formé par les témoins lumineux indique la puissance radio actuellement sélectionnée :

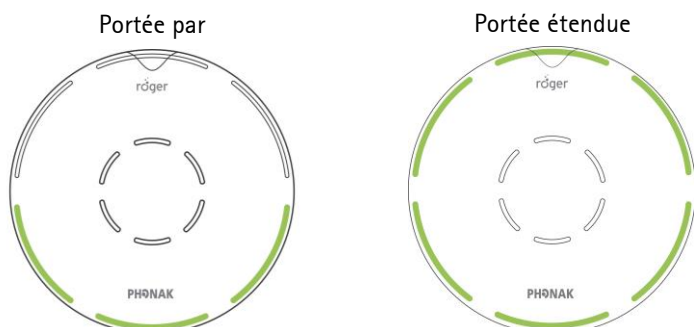

Pour enregistrer vos paramètres et mettre fin à la procédure, appuyez sur la touche tactile centrale de Roger Select



**Si la portée est étendue, l'autonomie de la batterie de Roger Select sera significativement réduite.**