

Phonak

Fast Facts



Installation de Roger™ via Roger X

De quoi s'agit-il ?

L'intégration de la technologie Roger dans les aides auditives équipées de RogerDirect™ permet d'obtenir le meilleur des deux mondes, afin de répondre aux besoins auditifs les plus complexes. Après une simple procédure d'installation du récepteur, les patients bénéficient des performances éprouvées de Roger¹ dans le bruit et à distance, sans avoir à utiliser de récepteur externe supplémentaire.

Quels sont les avantages ?

L'installation de cette fonction avec un Roger X* et le Roger Installer permet de diffuser directement le signal Roger.

Comment l'utiliser ?

Il suffit d'allumer le Roger Installer et de brancher un Roger X.

Allumez l'aide auditive et placez-la à l'endroit indiqué. La procédure d'installation est entièrement automatique,

et une série de témoins lumineux

confirmera que le récepteur a été installé.

Pour ceux qui ont besoin de restaurer le Roger X pour l'utiliser avec une aide auditive différente,

il faut suivre la même procédure pour désinstaller le récepteur.

Le Roger X reste entièrement compatible avec les aides auditives dotées d'une entrée DAI ou d'une fiche euro 3 broches..



*Uniquement les récepteurs Roger X dont le numéro de série commence par les quatre chiffres 1744xxxx et plus

¹ Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.