

Phonak Contrôle Tactile

En bref

De quoi s'agit-il ?


La fonctionnalité Contrôle Tactile permet de contrôler l'aide auditive par le biais d'une double touche, sans devoir utiliser le bouton de l'aide auditive ou une télécommande.

1. Mettez en pause / reprenez la diffusion de plusieurs appareils Bluetooth

2. Acceptez / mettez fin à un appel téléphonique

xxx-xxxx-xx/V1.00/2019-08/XX © 2019 Sonova AG Tous droits réservés

3. Lancez/arrêtez un assistant vocal, Siri, Google, etc.

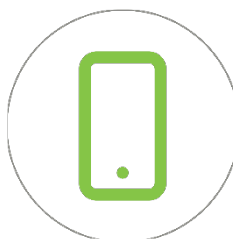

Comment l'utiliser ?

Médecin

- Activée par défaut dans Audéo P-R et Audéo P-RT (niveau de performances 90 et 70)
- Personnalisable dans Phonak Target > Options de l'aide auditive > Commandes manuelles
- Les fonctions peuvent être désactivées ou attribuées à l'oreille de préférence
- Dans Phonak Target, une option « Entraînement à la double touche » est disponible afin que la fonctionnalité puisse être utilisée en toute confiance dans la vie de tous les jours

Patient

- Activée par double touche sur la partie arrière supérieure du pavillon ou sur les lunettes
- Configurable par le patient dans l'application myPhonak 4.0

Quel est l'avantage ?

La fonctionnalité Contrôle Tactile permet au patient d'accéder de manière facile et pratique à ses entrées de diffusion sans compliquer davantage la fonctionnalité du bouton multifonctions. Deux fois plus de participants préfèrent la fonctionnalité Contrôle Tactile à d'autres commandes existantes¹.

1. Adler, M., Et Woodward, J. (2020). New Tap Control: providing a preferred and reliable alternative to access direct streaming functions. Phonak Field Study News. Disponible sur www.phonakpro.fr/etudes. Consulté en août 2020

