

Phonak Application myPhonak 4.0

En bref

De quoi s'agit-il ?

L'application myPhonak 4.0 est une application smartphone facile à employer, qui permet aux patients d'optimiser l'usage de leurs aides auditives Phonak compatibles. L'application est dotée de commandes utilisateur améliorées, et peut également connecter les patients à leur audioprothésiste en cas d'appareillage initial virtuel, ou en cas d'assistance et de réglages supplémentaires.

Comment l'utiliser ?

myPhonak 4.0 peut être téléchargé à la fois depuis l'Apple Store et depuis le Google Play Store.

Suppression

dynamique du bruit

- Réglée sur le curseur de focalisation de la parole, du statut « désactivé » à « léger », « moyen », « fort ».

La fonctionnalité

Contrôle Tactile peut être configurée pour :


- Accepter / mettre fin à l'appel ou à la diffusion audio
- Mettre en pause / reprendre la diffusion
- Accéder à l'assistant vocal du smartphone

Remote Support

- Solution qui permet d'adapter, d'affiner et de soutenir les besoins auditifs de vos patients à distance et en temps réel.
- Désormais disponible dans plus de pays.

Journal Auditif 2.0

- Solution qui favorise l'acclimatation en proposant aux patients de prendre part à des tâches de la vie réelle fondées sur leurs objectifs.
- Disponible en Allemagne, en France et aux États-Unis.

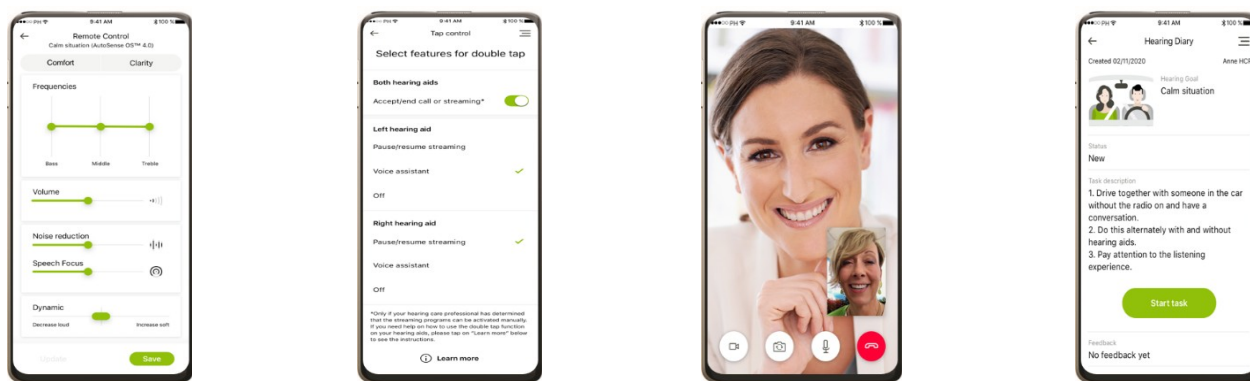

Quels sont les avantages ?

Toutes ces nouvelles fonctions et fonctionnalités contribuent à une santé auditive personnalisée. La personnalisation peut améliorer l'engagement du patient et accroître la confiance entre les audioprothésistes et les utilisateurs, optimisant, au bout du compte, les résultats d'audition et de communication

(Maidment et al. 2019, Maidment et Ferguson, 2018, Denford S, et al. 2014).

028-2169-08/V1.00/2020-06/NLG © 2019 Sonova AG Tous droits réservés