

Phonak

Fast Fact

Phonak CeruShield Disk

De quoi s'agit-il ?

Phonak CeruShield™ Disk est le nouveau système anti-cérumen de Phonak, conçu pour être un distributeur facile à utiliser.

Le CeruShield Disk est constitué des composants suivants :

- 8 nouveaux filtres CeruShield
- 8 positions pour jeter facilement les filtres anti-cérumen utilisés

Les filtres CeruShield protègent l'écouteur des problèmes liés au cérumen et offrent aux patients une durée d'utilisation plus longue entre les changements de filtre. Les filtres CeruShield ont été spécifiquement conçus pour être utilisés avec les écouteurs SDS 4.0



Quels sont les avantages ?

Avantages pour vous :

- Moins d'inquiétudes liées à la maintenance

Avantages pour vos patients :

- Durée d'utilisation plus longue entre les changements de filtre

- Maintenance des appareils moins chronophage
- Manipulation facile

Comment l'utiliser ?


Aides auditives RIC avec dômes

- Filtre CeruShield pour l'écouteur

Les aides auditives RIC avec embouts sur mesure disposent d'une double protection anti-cérumen :

- Filtre CeruStop pour l'embout sur mesure
- Filtre CeruShield pour l'écouteur

Veillez noter que Phonak CeruShield est uniquement compatible avec les écouteurs Phonak SDS 4.0 et n'est PAS compatible avec les écouteurs plus anciens.

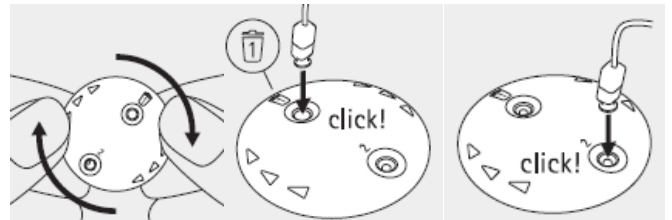

Pour en savoir plus sur le Phonak Sound Delivery System, rendez-vous sur www.phonakfr.com ou contactez votre représentant Phonak.