

Solutions CROS Phonak

Février 2018



Guide rapide d'appareillage

Ce guide vous donne des instructions détaillées pour réaliser l'appareillage d'un système Phonak CROS II ou Phonak CROS B avec Phonak Target 5.3 et les versions ultérieures. Pour appareiller les aides auditives, veuillez consulter le Guide rapide d'appareillage des aides auditives.

Préparation des aides auditives

Pour l'appareillage de CROS II ou CROS B, il est recommandé d'utiliser iCube II car il permet d'effectuer l'adaptation fine plus rapidement et la démonstration instantanée du système CROS..

CROSII peut uniquement être appareillé avec les aides auditives Venture.

CROSB peut uniquement être appareillé avec les aides auditives Belong™

iCube II

Les aides auditives ou appareils CROS ne sont pas reliés par câble. Insérez les piles avant de placer les aides auditives sur les oreilles. Allumez les aides auditives en fermant le compartiment pile.

NOAHlink or HI-PRO

Connectez les câbles de programmation aux aides auditives et à l'appareil d'adaptation. Il n'est pas possible de faire une démonstration de l'appareil CROS lorsque les câbles sont connectés.

Connexion des appareils

Cliquez sur **[Connecter]** pour commencer l'appareillage. Les appareils connectés vont s'afficher à côté de l'appareil d'adaptation sur le tableau de bord.



Vérifiez que le bon appareil d'adaptation est sélectionné. Pour en changer, utilisez la flèche du menu déroulant située à côté de l'appareil d'adaptation sur le tableau de bord.


Les données de l'audiogramme seront automatiquement importées de NOAH dans Phonak Target et prises en compte dans les calculs initiaux.

Après la connexion, sélectionnez les paramètres acoustiques appropriés pour vos aides auditives.

Adaptation basique

Allez à l'onglet [Appareillage] et effectuez le test de l'arsen. Placez ensuite l'aide auditive de la même façon que dans un appareillage monaural.

Après l'appareillage, allez à l'onglet [Adaptation basique] et sélectionnez [Équilibrage CROS]. Ajustez le niveau de sonie entre l'appareil CROS et l'aide auditive.

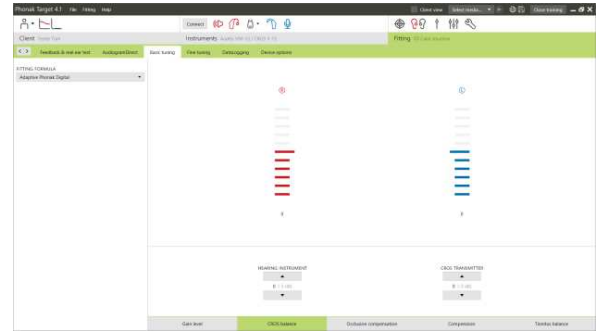

Options des aides auditives

Cliquez sur [Options des aides auditives] pour ajuster les réglages individuels pour le volume du CROS/changement de volume et de programme (selon les contrôles utilisateur disponibles).

Pour CROS II ou CROS B, il est possible d'ajuster le volume du signal CROS, si nécessaire.

Terminer la session d'appareillage

Vous pouvez quitter la session à tout moment en cliquant sur [Sauvegarder et fermer la session] dans le coin supérieur droit de l'écran. La boîte de dialogue d'enregistrement confirmera l'enregistrement de l'appareillage du CROS. La connexion sans fil entre l'émetteur CROS et l'aide auditive démarre automatiquement dès que les deux appareils ont été déconnectés de l'appareil d'adaptation et mis en marche.

Important : Lorsque la diffusion provient des accessoires, la diffusion du CROS est automatiquement déconnectée. La reconnexion se fera automatiquement lorsque vous arrêterez la diffusion depuis les accessoires

Adaptation de Phonak CROS en mode Junior

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide rapide d'appareillage pédiatrique.

Marque CE apposée en 2017



Fabricant :
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suisse