

Draadloze accessoires voor Phonak Audéo™ B-Direct

Productinformatie



Phonak introduceert Audéo™ B-Direct: een nieuwe uitbreiding op de succesvolle reeks RIC-hoortoestellen voor licht tot ernstig gehoorverlies. Phonak Audéo B-Direct, dat is gebaseerd op de technologie van Phonak Belong™, breidt het Phonak-portfolio uit met een doelgerichte oplossing voor mensen die op zoek zijn naar directe verbinding. Audéo B-Direct is bedoeld om het leven van nog meer consumenten eenvoudiger te maken en is de eerste toevoeging aan de productreeks voor directe verbinding met universele compatibiliteit. De nieuwe hoortoestellen kunnen eenvoudig worden aangesloten op mobiele telefoons* en televisies.

*met draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere Bluetooth-telefoons

TV Connector: het gebruiksvriendelijke streaming-apparaat voor tv en muziek



De **TV Connector** is de plug-and-play interface voor tv en andere audio-bronnen en ondersteunt de directe verbinding met de Phonak Audeo B-Direct-hoortoestellen. Deze is ontwikkeld om het instellen en gebruiken te vereenvoudigen en biedt superieure geluidskwaliteit, doordat het gebruikmaakt van AirStream™-technologie. De TV Connector kan audiosignalen over een afstand van maximaal 15 meter naar een onbeperkt aantal verbonden luisteraars tegelijkertijd streamen.


Funcieoverzicht

- Naar beide hoortoestellen streamen in stereogeluid
- AirStream-technologie voor een verbeterde geluidskwaliteit, de laagste latentie en een makkelijkere manier om verbinding te maken
- Alle compatibele hoortoestellen binnen bereik in 'één klik' verbinden, zonder dat er instellingen op het hoortoestel moeten worden aangepast
- Tegelijkertijd streamen naar een onbeperkt aantal gebruikers
- Voor meer discretie kan deze achter de tv worden geplaatst

Compatibiliteit

- De TV Connector is uitsluitend compatibel met Phonak Audeo B-Direct. Alle overige draadloze hoortoestellen zijn niet compatibel.

Hoe te gebruiken

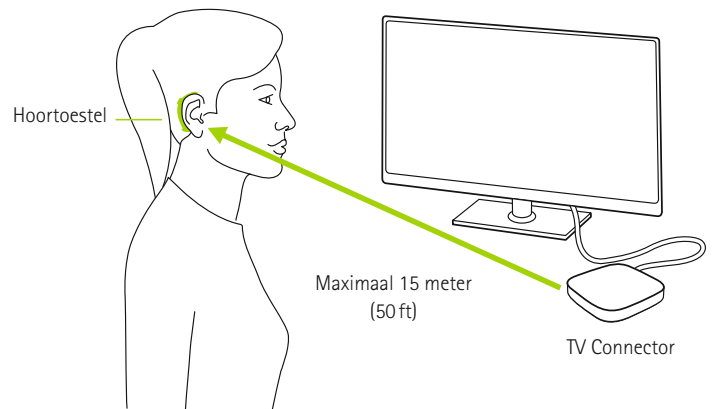

Ga naar www.phonakpro.com/TVConnector voor video's over hoe u de TV Connector installeert en gebruikt

Technische gegevens



- 1 Verbinden via één druk op de knop
- 2 Indicatorlampje (LED)
- 3 MicroUSB-aansluiting
- 4 Audio-aansluiting voor Toslink (digitaal optisch) of een (analoge) audio-stekker van 3,5mm

Afmetingen kleine behuizing (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)

Phonak Remote: de vereenvoudigde afstandsbediening-app



De **Phonak Remote** is de beste manier om de basisfuncties op afstand te bedienen en ondersteunt een directe verbinding met de hoortoestellen. De app is ontwikkeld om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren voor meer gemak wanneer een afstandsbediening wordt gebruikt. Met de afstandsbediening kunt u de functies van uw hoortoestel gemakkelijk bedienen. Deze worden weergegeven op de smartphone en u heeft er geen extra apparatuur voor nodig die u constant bij u moet dragen.


Functieoverzicht

- Volume-aanpassingen van de hoortoestellen voor beide zijden of voor elke zijde afzonderlijk
- Programmalijs met directe selectie van de beschikbare hoortoestelprogramma's
- De mogelijkheid om de naam van de beschikbare hoortoestelprogramma's aan te passen in de app
- Selectie van beschikbare audiobronnen die zijn verbonden met de hoortoestellen
- Eenvoudige aanpassing van de Streaming/Mic. balans van het hoortoestel tijdens het streamen vanuit een audiobron
- Afzonderlijke aanpassing van het volume van de ruis bij tinnitus, indien beschikbaar op het hoortoestel
- Controle van de gemiddelde draagtijd van de aangesloten hoortoestellen via de app


Ga naar www.phonakpro.com/remoteapp voor video's over hoe u de Phonak Remote-app op uw telefoon installeert en gebruikt




Volume-aanpassingen voor elke zijde

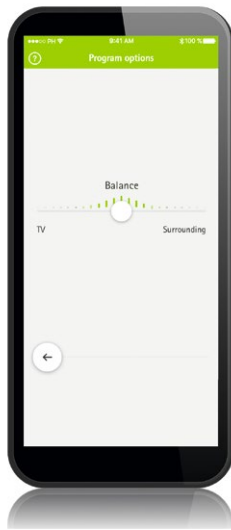

Streaming/Mic. balans van een audiosignaal

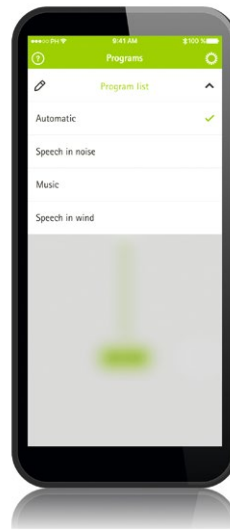

Programmasselectie en -aanpassing

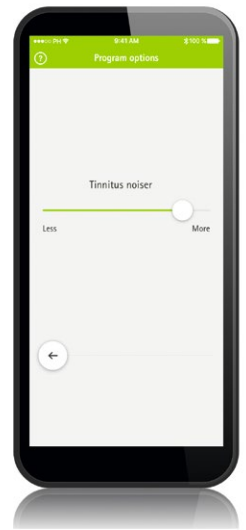

Aanpassing van ruisvolume bij tinnitus

Compatibiliteit

- De Phonak Remote-app is uitsluitend compatibel met Phonak Audéo B-Direct. Alle overige draadloze hoortoestellen zijn niet compatibel.
- De Phonak Remote-app kan worden gebruikt op Apple iPhones met iOS 10.2 of hoger en op smartphones met Google Android 6 of hoger.

Apple, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.

Life is on.

www.phonak.com