

Phonak Fast Facts



Noahlink Wireless

Wat is het?

Noahlink Wireless is het nieuwe standaard programmeer apparaat, voor hoortoestellen met Bluetooth® Low Energy (BLE). Het is een door HIMSA geproduceerd apparaat dat draadloos aanpasgegevens overbrengt van de computer naar hoortoestellen met BLE, zoals de hoortoestellen Phonak Audéo™ B-Direct, zonder dat er kabels aan te pas komen.

Waarom wordt het gebruikt?

Noahlink Wireless vereenvoudigt het aanpasproces:

- Het is een universeel programmeerapparaat dat ervoor zorgt dat er geen bedrijfseigen programmeerapparaten meer noodzakelijk zijn
- Het biedt volledige flexibiliteit voor het aanpassen van de instellingen van de draadloze hoortoestellen met BLE, zonder dat er kabels aan te pas komen
- Audéo B-Direct is een uniek Phonak-toestel dat eenvoudig kan worden geïdentificeerd. Druk op de knop op het hoortoestel om het te markeren in de lijst met beschikbare apparaten.



Hoe wordt het gebruikt?

Noahlink Wireless kan eenvoudig worden gebruikt en ingesteld. Installeer Phonak Target 5.2 of hoger en steek de USB-kabel van Noahlink Wireless in de aanpascomputer. Noahlink Wireless wordt automatisch geïnstalleerd en kan eenvoudig worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu met beschikbare aanpasapparaten.

Open en sluit de batterijlade en klik op **[Verbinden]** om Phonak Audéo B-Direct te detecteren. Apparaten binnen bereik worden weergegeven. Druk op **[Play beep]** (Pieptoon afspelen) of de drukknop van de hoortoestellen om te bepalen welke zijde(n) u wilt toewijzen aan een cliënt.

Voor meer informatie over de Phonak Audéo B-Direct, gaat u naar www.phonakpro.com/audeo-b-direct of neemt u contact op met uw Phonak-vertegenwoordiger.

Lees de veelgestelde vragen op de website van HIMSA voor meer informatie over Noahlink Wireless
<https://www.himsa.com/Products/NoahlinkWireless/ProductInformationSheets/tabid/4794/language/en-US/Default.aspx>