



Dynamic SoundField

Installatie handleiding



Volg de installatie-instructies nauwgezet om er zeker van te zijn dat uw Dynamic SoundField-systeem correct geïnstalleerd wordt.



Deponeer het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke regelgeving.

Onderdelen van het Dynamic SoundField pakket

Het pakket bestaat uit deze onderdelen. Neem contact op als iets ontbreekt (088-6008850)

Inhoud doos 1

DigiMaster
luidspreker (1x)



Verbindingsstuk (1x)



Stroomadapter en stroomkabel



Inhoud doos 2

Smalle inbusbouten
(2x)



Kabelklem
(2x)



Inbus
(2x)



Staander
(1x)



Voet
(1x)



Brede Inbusbout met ring
(1x)




Inhoud doos 3

Microfoon/zender met oplader
(inspiro)
(1x)



Diversen

CD instructie filmpjes

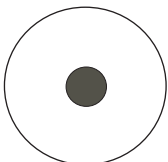

EasyBoom mic



Installatie instructie



Muurbeugel set




Optioneel
(Niet van toepassing bij
eerste installatie)

1. Montage standaard en luidspreker

- 1) Monteer de voet door alle segmenten in elkaar te plaatsen



- 2) Pak de staander. Plaats het eind met de inwendige schroefdraad in het midden van de voet en monteer deze met brede inbusbout en ring.

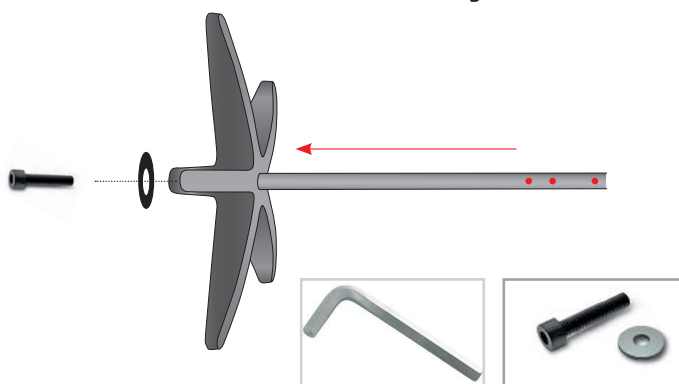


- 3) Plaats het verbindingsstuk tegen de achterzijde van luidspreker. De twee nokjes op het verbindingsstuk moeten in twee aangegeven gaten vallen.




- 4) Plaats de twee smalle inbusbouten door de twee gaten. De schroeven gaan door de staander en het verbindingsstuk tot in de luidspreker.



- 5) Bevestig de stroomkabel aan de stroomadapter. Plaats de 19 Volt-stekker onderin de luidspreker. Plaats de kabelklemmen om de kabel te fixeren.

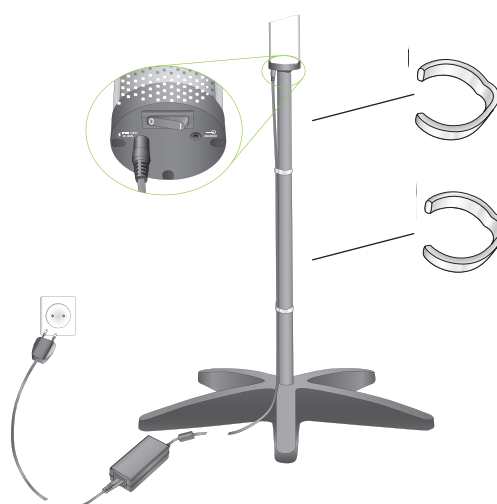

- 6) Schakel de luidspreker in met de schakelaar aan de onderzijde. Het lampje op de luidspreker gaat nu branden.

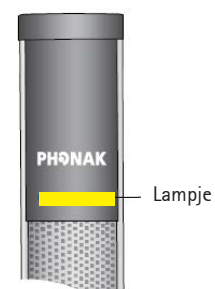

2. Koppelen microfoon met de luidspreker

De leerkrachtmicrofoon moet draadloos verbonden worden met de luidspreker (een eenmalige handeling)

1) Schakel de zender/microfoon in met het schuifje bovenop (groen vlak wordt zichtbaar)



2) Houd de microfoon vlakbij het Phonak logo bovenaan de luidspreker en druk 1x kort op de knop (-) direct onder 'Connect' op het zenderkastje.



3) Bij een geslaagde koppeling krijgt u een positieve terugmelding op het schermje en verandert het icoon.

❶ DEZE KOPPELING HOEFT SLECHTS EENMALIG TE GEBEUREN!

❷ BIJ OPNIEUW INSCHAKELEN VAN DE APPARATUUR ZIJN BEIDE AUTOMATISCH WEER VERBONDEN.

Hulp nodig? Bekijk het filmpje op de CD!

3. Voorbereiding zenderkastje

Er zijn twee draagwijzen voor de microfoon. Kies de opzet van uw voorkeur.
U kunt dit achteraf altijd nog eenvoudig wijzigen.

Optie A) Microfoonkastje op de heup

Plaats de clip op de ronde knop aan de achterzijde van de microfoon:



Optie B) Microfoonkastje om de hals

Plaats het nekkoord op de ronde knop aan de achterzijde van de microfoon:




4. Microfoonselectie en draagwijze

Er zijn twee soorten microfoons meegeleverd. Sluit de microfoon van uw keuze aan op de adapter. Het voordeel van de Easyboom microfoon is dat deze altijd goed bij uw mond zit zodat u altijd goed hoorbaar bent. Soms wegen praktische aspecten zwaarder voor de gebruiker, waardoor de reversmicrofoon gekozen wordt.



Optie A) Reversmicrofoon

Plaats de clip op het revers

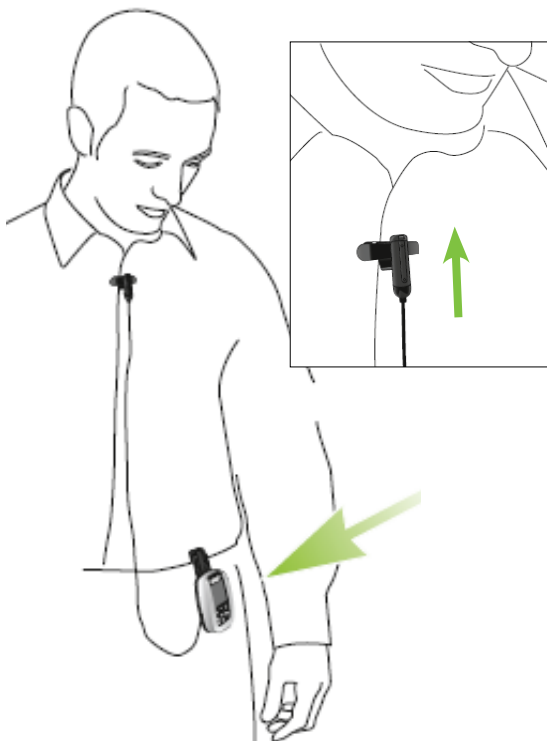


i DE MICROFOON MOET ALTIJD
NAAR DE MOND WIJZEN!

DE IDEALE AFSTAND TOT DE MOND
IS 20 CM.

Optie A) Easyboom microfoon

Plaats de microfoon op het hoofd

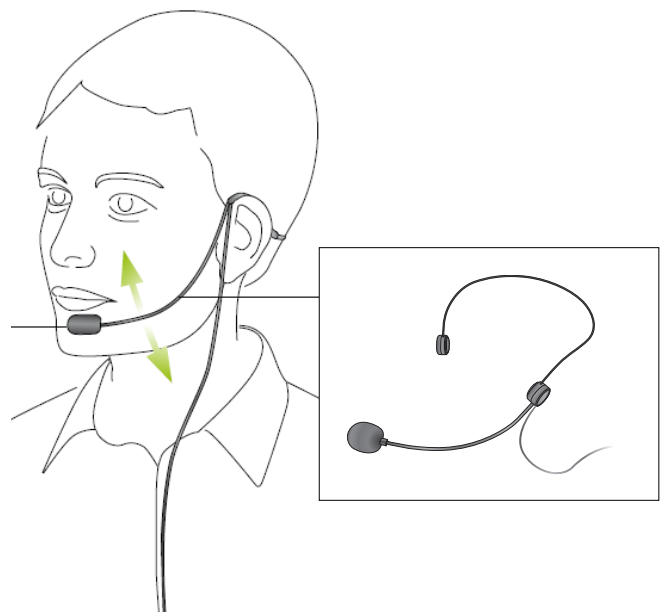

i PLAATS DE BEUGEL **ACHTER HET HOOFD** LANGS,
NOOIT OVER HET HOOFD!

4. Volume instelling / Soundcheck

Stel het volume naar uw wens in.

- 1) Kies 'Vol regel' om in de volumeregeling te komen.
- 2) Stel vervolgens met **de pijltjes toetsen** het volume harder of zachter in. De standaardinstelling is '0' wat meestal voldoende is. Dit is de middenstand.
- 3) Als het gewenste volume bereikt is, ga dan met het gekrulde pijltje weer terug naar het startscherm.

Het systeem onthoudt deze instelling altijd.



- i** DE IDEALE STAND IS DE MIDDENSTAND (0). ZET DE SET NIET TE HARD (bv + 8 dB)
- i** HET SYSTEEM REGELT ZELF HET VOLUME. BIJ TOENEMEND OMGEVINGSLAWAAI ZAL HET VANZELF MEER VOLUME GEVEN. U HOEFT DUS ALLEEN BIJ HET EERSTE GEBRUIK HET VOLUME IN TE STELLEN, DAARNA NEEMT HET SYSTEEM DE VOLUMEREGELING OVER.

Proficiat, uw soundfieldset is nu klaar!


Kijk op de volgende pagina voor de plaatsing van de luidspreker in het lokaal

5. Plaatsing luidspreker in het lokaal

Plaats de luidspreker voorin de klas, bij voorkeur naast het digibord.
U hoeft niet bang te zijn voor rondzingen/fluiten.




❶ Werkbereik

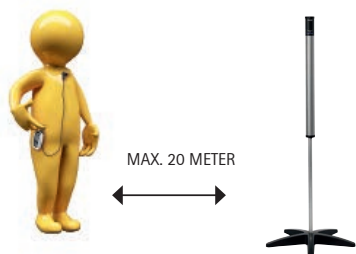

De maximale afstand tussen microfoon en luidspreker is zo'n 20 meter. Ook buiten het lokaal bent u waarschijnlijk nog hoorbaar.

❷ Optionele muurbeugel

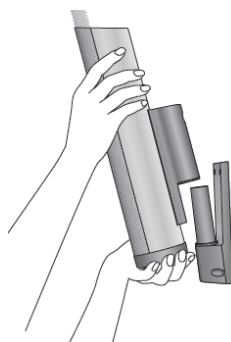

In de verpakking vindt u een muurbeugel set om de luidspreker aan de muur te hangen. U heeft dan de standaard niet meer nodig. Dit wordt vaak gedaan bij definitieve aanschaf van de set. Op de CD vindt u een filmpje over de montage.

ZORG ERVOOR DAT HET MIDDEN VAN DE SPEAKER OP OORHOOGTE VAN DE LEERLING HANGT.
(DE JUISTE HOOGTE IS VERGELIJKBAAR MET DIE VAN DE STANDAARD/VOET)

6. Tips voor dagelijks gebruik

In gebruikname 's ochtends

1. Schakel de microfoon in met het schuifje bovenop (groen vlak wordt zichtbaar)
2. Schakel de luidspreker in met de schakelaar aan de onderzijde. Uw systeem is nu klaar voor gebruik!



Einde van de dag

1. Plaats de microfoon aan de oplader (laat hele nacht opladen).
2. Schakel de luidspreker uit.



i LAAT DE MICROFOON TIJDENS VAKANTIES NOOIT AAN DE OPLADER ZITTEN!

Ruggespraak houden/ tijdelijk uitschakelen microfoon

Bij overleg met een andere leerkracht is het handig de microfoon tijdelijk te dempen. Gebruik deze knop:



Koppeling luidspreker aan het digibord

U kunt de luidspreker aansluiten op het digibord voor een betere geluidskwaliteit van digibord geluiden. Gebruik een audiokabel met beiderzijds 3,5 mm jackplug. Deze vindt u in het etui van de microfoon. (U vindt ook een kort instructiefilmpje op de meegeleverde CD)



7. Ondersteuning

Vragen of problemen?

Bekijk de uitgebreide instructiefilms op onderstaande CD of kijk op onze site www.dynamicsoundfield.nl
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088-6008850 (tijdens kantooruren).

Enthousiast over SoundField?

Laat anderen ook profiteren en plaats straks uw recensie op de facebookpagina:

www.facebook.com/phonakdynamicsoundfield

Daar leest u ook de ervaringen van andere leerkrachten die u voorgingen!

A blue rectangular button with the word "facebook" in white lowercase letters.The Phonak logo, featuring the word "PHONAK" in bold black uppercase letters with a green dot over the 'O', and the tagline "life is on" in a smaller, grey, lowercase sans-serif font below it.