



# Roger™ in uitdagende luistersituaties

Beter verstaan in lawaai en op afstand

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# De brug naar beter verstaan

Dankzij de moderne hoortoesteltechnologie wordt het steeds eenvoudiger om het spraakverstaan te verbeteren. Zelfs de krachtigste hoortoestellen kennen echter hun beperkingen, vooral in rumoerige plaatsen en op afstand. In dergelijke gevallen wordt van de modernste draadloze microfoons vereist dat zij de prestaties verbeteren en de brug zijn naar beter verstaan. Dit is ook precies waarin het digitale draadloze Roger portfolio uitblinkt.

Het portfolio bestaat uit microfoons en ontvangers die de stem van een spreker opvangen en deze draadloos uitzenden naar de luisteraar, waarbij achtergrondlawaaï wordt verminderd. Hierdoor kunt u spraak duidelijk horen tijdens vergaderingen of sociale bijeenkomsten, waardoor u weer optimaal kunt genieten van uw gehoor.





# Roger in uitdagende luistersituaties

Of u zich nu in een restaurant, op het werk of in uw eigen huis bevindt, het verstaan van spraak is een zeer belangrijke factor voor uw levenskwaliteit. Met Roger technologie kunt u zonder de stress en verwarring die achtergrondlawaai met zich mee kan brengen, genieten van kristalheldere gesprekken.

## Roger op het werk

De huidige arbeidsmarkt stelt hoge eisen, voornamelijk aan de communicatievaardigheden van mensen. Vergaderingen veroorzaken vaak verstaansproblemen voor mensen met gehoorverlies. De grootste obstakels worden veroorzaakt door bijgesprekken in de omgeving, achtergrondlawaai of de afstand tussen u en iemand aan de andere kant van de tafel.

## Roger in uw privéleven

Personen met gehoorverlies zouden graag bij drukke sociale activiteiten goed kunnen horen en spraak goed kunnen verstaan. In deze situaties is Roger de aangewezen oplossing om u te helpen communiceren, ongeacht de luistersituatie.

# Beter verstaan in rumoerige situaties met MultiBeam- technologie


De theorie is eenvoudig: hoe meer gesproken woorden u kunt horen, hoe meer u van communicatie kunt genieten.

MultiBeam-technologie is een innovatieve Roger microfoonfunctie van Phonak. Deze technologie biedt u een uniek spraakverstaan in groepsgesprekken, zoals tijdens vergaderingen of in drukke restaurants.

Door gebruik te maken van microfoons die geluid vanuit zes richtingen opvangen, kan spraak in een straal van 360° worden opgevangen en berekend. De richting met de helderste spraak wordt automatisch geselecteerd. Het resultaat: het spraakverstaan wordt in een groepsgesprek bij 75 dBA lawaai met maximaal 61% verbeterd ten opzichte van alleen hoortoestellen<sup>1</sup>.

De MultiBeam-technologie is nu beschikbaar in Roger Table Mic II en Roger Select™.

<sup>1</sup> Gebaseerd op voorlopige gegevens. Het door specialisten gecontroleerde artikel en Field Study News worden op dit moment voorbereid en zijn beschikbaar vanaf eind 2018 op [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence).

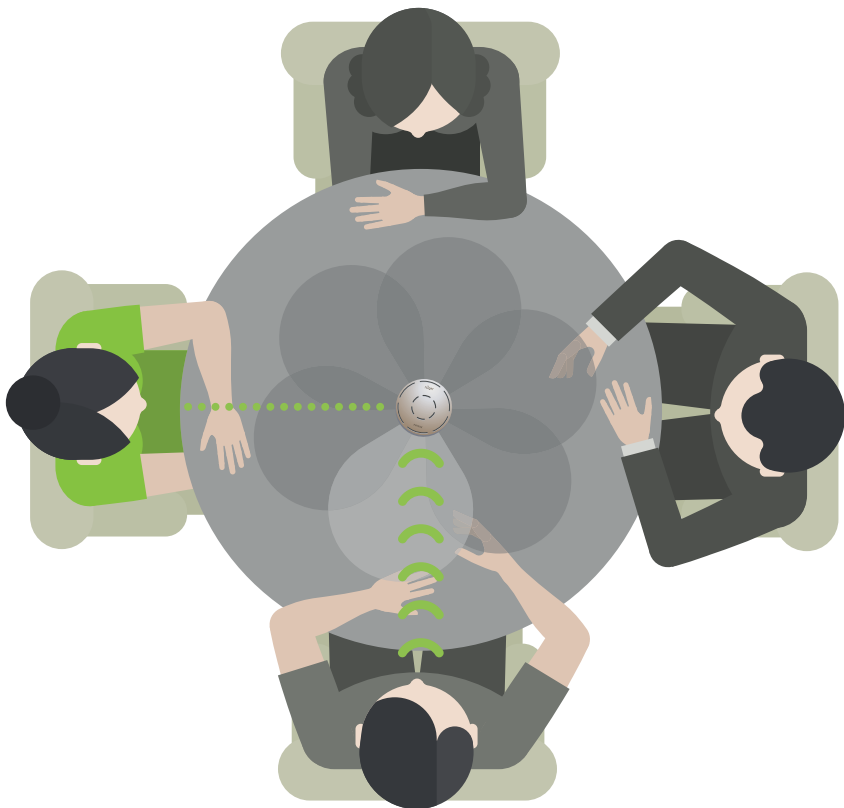

MultiBeam-technologie maakt gebruik van meerdere microfoons die in zes richtingen wijzen en automatisch de pratende persoon selecteren.



# Als u zich kunt focussen op het werk in plaats van op uw gehoor, life is on

Roger Table Mic II is een microfoon die speciaal is ontwikkeld voor werkende volwassenen die regelmatig deelnemen aan vergaderingen.

## Volledig deelnemen aan grote vergaderingen

Om u het optimale gehoor te bieden tijdens een grote vergadering, kunnen meerdere Roger Table Mic II worden gekoppeld in een MultiTalker Network. Met een bereik van meer dan 20 meter kunt u volledig deelnemen en mist u niets van wat er gezegd wordt.

## Kies de manier waarop u hoort in vergaderingen

Sommige vergaderingen zijn wat luidruchtiger dan andere. Het instelbare microfoonbereik stelt u in staat om uw luistercomfort en de manier waarop u hoort aan te passen. Selecteer een breed microfoonbereik bij een beetje achtergrondlawaai of een doelgerichter microfoonbereik wanneer er meer achtergrondlawaai aanwezig is.





### Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid

Roger Table Mic II kan volautomatisch worden gebruikt, waardoor hij uiterst gebruiksvriendelijk is. Met een accuduur van 16 uur\* gaat hij gemakkelijk een hele werkdag lang mee.

Het discrete ontwerp zorgt ervoor dat deze naadloos in de ruimte met andere vergaderingsapparatuur past. Voor extra discreet gebruik kunt u de tafelmicrofoon bedienen met een afstandsbediening.

\* Dankzij een accuduur van 16 uur gaat de Roger Table Mic II een volledige werkdag mee. Bekijk het datasheet voor de Roger Table Mic II.

# Als u zich in het hart van het gesprek bevindt, life is on

Roger Select is een veelzijdige microfoon die de beste prestaties biedt in situaties waarin u zich weinig beweegt en waar veel achtergrondlawaai aanwezig is, zoals restaurants.

## Volg het gehele gesprek

Wanneer deze in het midden van een tafel wordt geplaatst, selecteert de microfoon automatisch wie aan het praten is en schakelt deze naadloos over van de ene spreker naar de andere.

## Neem het heft in eigen handen; bepaal naar wie u luistert

In situaties waarin meerdere gesprekken tegelijk plaatsvinden, kunt u met één druk op de knop handmatig kiezen wie u wilt horen en op welk gesprek u zich wilt concentreren.



### Geniet van speciale momenten

Uw vrienden en familie kunnen de Roger Select simpelweg op hun kleding vastklemmen of om hun nek dragen, zodat u van alle speciale momenten kunt genieten.

### Tv-kijken en telefoongesprekken voeren

Roger Select beschikt over breedband Bluetooth®, waarmee u telefoongesprekken kunt voeren. Doormiddel van een audiokabel kan u geluid vanuit tv's, muziekspelers, computers en andere apparaten streamen.

# Extra Roger microfoons

Als aanvulling op de nieuwe microfoons, Roger Table Mic II en Roger Select, zijn er ook andere geavanceerde Roger microfoons beschikbaar die aan uw behoeften kunnen voldoen.



---

## Roger Pen™

Roger Pen is een handige microfoon voor verschillende luistersituaties. Doordat deze zo klein en draagbaar is, kan de pen eenvoudig worden gebruikt bij afstand en in lawaai. Hij beschikt over breedband Bluetooth voor telefoongesprekken.



---

## Roger EasyPen

Roger EasyPen is een effectieve, maar eenvoudige microfoon met maar twee knoppen. Dit is voor u de juiste keuze als u ultieme eenvoud wilt combineren met ongekende Roger prestaties.



---

## Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic is een revers microfoon die uitzonderlijke prestaties biedt in één-op-één-gesprekken. Dankzij de directionele microfoon kunt u zich volledig richten op uw gesprekspartner.





# Roger ontvangers

Omdat er drie verschillende soorten ontvangers beschikbaar zijn, is er vrijwel altijd een Roger oplossing voor u, ongeacht het type hoortoestel of implantaat dat u heeft.



---

## Design-geïntegreerde Roger ontvangers

Deze zijn ontworpen om onder de hoortoestellen van Phonak te klikken. Ze zijn ook beschikbaar voor bepaalde cochleaire implantaten van Advanced Bionics, Cochlear en MED-EL.



---

## Roger X

Deze miniatuur universele Roger ontvanger is compatibel met een groot aantal achter-het-oor-hoortoestellen, cochleair implantaten, sound processors en streamers.



---


## Roger MyLink

Deze Roger ontvanger met nekbus gaat samen met elk hoortoestel of cochleair implantaat dat beschikt over een luisterspoel (T-stand).



# Roger op het werk

Roger microfoons zijn altijd eenvoudig te gebruiken en bieden u de mogelijkheid om, ongeacht de situatie, volledig te communiceren, deel te nemen en bij te dragen op uw werk.

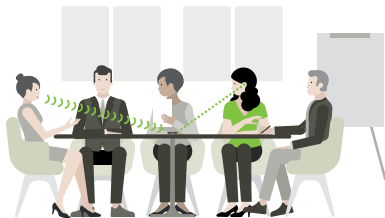

## Kleine vergaderingen


Zelfs kleine vergaderingen kunnen overweldigend zijn voor mensen met hoortoestellen.

Plaats gewoon één tafelmicrofoon op de vergadertafel en u zult uw collega's beter kunnen verstaan.




## Grote vergaderingen

Als u deelneemt aan grote vergaderingen kunnen meerdere tafelmicrofoons de uitkomst bieden om alle stemmen van iedereen aan tafel te horen. U kunt zoveel Roger Table Mic II gebruiken als nodig zijn. Ze zenden de spraak naar uw hoortoestellen, ongeacht waar de stem vandaan komt.

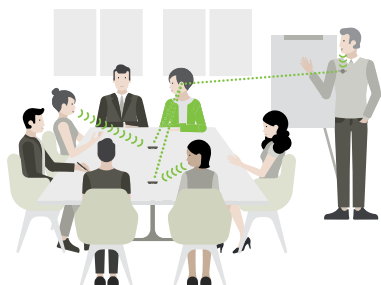


## Vergaderingen met een hoofdspreker

Hoofdsprekers bevinden zich vaak op een afstand van de vergadertafel. Wanneer de hoofdspreker een Roger microfoon draagt die samenwerkt met de tafelmicrofoon, kunt u de spraak van zowel de hoofdspreker als de deelnemers aan de vergadering duidelijk horen.

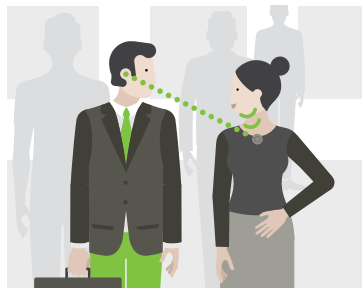


## Eén-op-één-gesprek bij lawaai

In een omgeving met veel afleidende geluiden raden we aan een Roger microfoon om de nek van een collega te hangen of deze op zijn/haar kleding te bevestigen.

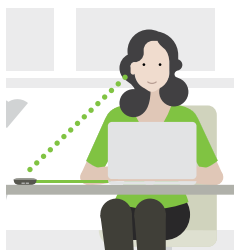

## Multimedia

Technologieën als videoconferentiesystemen en internettelefonie worden regelmatig gebruikt op de werkvloer. Met Roger microfoons kunt u de audio die hieruit voortkomt gemakkelijk horen. Sluit eenvoudigweg uw Roger microfoon aan met behulp van de audiokabel. Zo brengt u de belangrijke geluiden direct in uw oren.

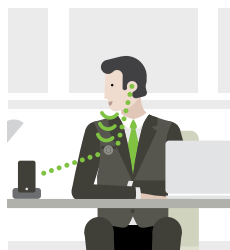

## Telefoongesprekken

Telefoneren kan een echte uitdaging zijn voor mensen met gehoorverlies. Door de Roger Pen of Roger Select met uw telefoon of computer te verbinden via Bluetooth of een kabel, kunt u telefoongesprekken rechtstreeks in uw hoortoestellen of cochleair implantaat horen.

# Roger in uw privéleven

Roger technologie zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt genieten van uw sociale leven door u te helpen communiceren, ongeacht het achtergrondlawaai of de luistersituatie.



## Eten met vrienden of familie

Met iedereen aan tafel dineren en een etentje in een restaurant zijn lastige luistersituaties. Beide zorgen voor een lastige mix aan geluiden van gesprekken, achtergrondmuziek, bestek en klinkende glazen. Een oplossing als Roger Select neemt deze hinderlijke geluiden weg en helpt u elk woord duidelijk te verstaan.



## Op feestjes

Wanneer u naar muziek luistert en de mensen om u heen praten en lachen, zendt Roger het gesprek rechtstreeks naar uw oren. Roger Pen is ideaal voor deze luistersituaties. Het penvormige ontwerp zorgt ervoor dat deze oplossing er niet alleen goed uitziet, maar ook eenvoudig te gebruiken is.




## Thuis

Wanneer u thuis bent, vermindert de Roger microfoon hinderlijk achtergrondlawaai zoals het geratel van keukengerei of het geschal van de tv. Hierdoor kunt u volledig genieten van gesprekken met gezinsleden en vrienden.



## In de auto

Motorgeluiden, verkeersgeluiden en passagiers die niet naar u kijken, maken het voeren van gesprekken in de auto lastig. Door de woorden van de spreker direct in uw oren te brengen, neemt Roger al deze moeilijkheden bij het communiceren weg. Horen in de auto wordt weer prettig.

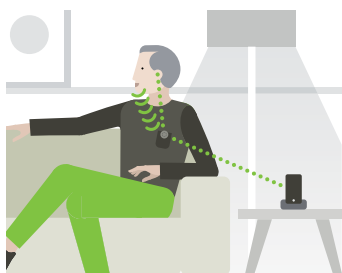

## Telefoongesprekken

Voer eenvoudig een telefoongesprek door de Roger Pen of Roger Select op uw telefoon of computer aan te sluiten via Bluetooth of een kabel.



## Tv kijken

Roger microfoons kunnen eenvoudig worden aangesloten op de audio-uitgang van uw tv. Zo kunt u van uw favoriete tv-programma's genieten zonder dat u de tv steeds harder moet zetten.

# Ontdek welke Roger microfoon het beste bij uw luisterbehoeften past



Neem de volgende stap om uw favoriete  
Roger systeem te vinden. Praat met  
uw audicien of lees meer informatie op  
[www.easyguide.phonakpro.com](http://www.easyguide.phonakpro.com)





# Volgende stap

Voer moeiteloos gesprekken met collega's op uw werk, vrienden en familieleden. Roger zorgt dat u elk geluid glashelder hoort, zodat u zich zonder afleiding op het gesprek kunt concentreren.

Ontdek welke Roger oplossing bij uw behoeften aansluit. Informeer bij uw hoorprofessional (audicien / audioloog) of lees meer informatie op **[www.phonak.nl](http://www.phonak.nl)** of **[www.phonak.be](http://www.phonak.be)**



---

## Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

[www.phonak.nl](http://www.phonak.nl)  
[www.phonak.be](http://www.phonak.be)