

Phonak Gyorsinfo



Phonak Bolero™ B-PR

Mi ez?

A Phonak Bolero B-PR egy teljes értékű BTE hallókészülék telefontekercsel, hangerőszabályozóval és beépített újratölthető akkumulátorral, így nincs többé szükség az elemcserére. A Bolero B-PR 24 órás* hallást tesz lehetővé egyetlen egyszerű feltöltéssel a lítium-ionos akkumulátornak köszönhetően. Ráadásul az új design-nak köszönhetően a készülék víz- és porállósága még jobb lett (IP 68).

Miért használjuk?

Az újratölthető elemek segítségével az ügyfelek mentesülnek attól, hogy az elemcserével kelljen bajlódniuk, vagy állandóan az elemek pótlásáról gondoskodniuk, így hallásuk igazán aggodalommentessé válik. A lítium-ion akkumulátor használatával pedig nem kell tartani attól, hogy csökken az elem élettartama, ráadásul a hallókészülék teljesítménye sem fog romlani. Mivel az elemajtót eltávolítottuk, ezáltal a hallókészülék is strapabíróbb lett.

A hallásgondozók számára előny, hogy több idejük marad páciensükre, mivel nem kell az elemcserével kapcsolatos és általános karbantartással kapcsolatos témákkal időt tölteni.



Hogyan használjuk?

A Bolero B-PR-t nagyon egyszerű használni. Csak vegye ki a hallókészülékeket a töltőből, tartsa lenyomva a nyomógombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény felvillan. A készülék máris be van kapcsolva és készen áll a használatra.

A nap végén egyszerűen helyezze be a készülékeket a töltőbe. A hallókészülékek egyszerűen bekattannak a helyükre és automatikusan kikapcsolnak. A zöld jelzőfény lassan pulzál, így jelezve a töltést. Miután a fény folyamatosan világít és már nem pulzál, újra készen áll a használatra. Teljesen lemerült készülékek esetén a töltési idő 3 óra.

A Phonak Bolero B-PR újratölthető hallókészülékkel, illetve a töltési opciókkal kapcsolatos további információért látogasson el a www.phonakpro.hu/bolero-b weboldalra, vagy keresse fel Phonak képviselőjét.

*Teljes feltöltés után, maximum 80 percnyi vezeték nélküli streamelési idő mellett. Kérjük keresse fel:

www.phonakpro.hu/bizonyitek