

Phonak Gyorsinfó



TV Connector

Mi ez?

A TV Connector olyan plug and play eszköz, mely közvetlenül csatlakoztatja televíziójának vagy más médialejátszó eszközének hangját a Phonak Audéo™ B-Direct hallókészülékekbe, és ehhez nincs szükség testen viselt streamer eszközre sem. Az AirStream™ Technológiát alkalmazva, a Phonak 2.4 GHz-es sugárzási protokolljával a TV Connector közvetlen audio streaminget biztosít sokféle televízióból és audio-berendezésből az Audéo B-Direct-be, mindezt kitűnő sztereó hangminőségben

Miért használjuk?

Előnyök az ügyfelek számára

- Nincs szükség testen viselt streamerre
- Az Audéo B-Direct hallókészülékeket vezeték nélküli sztereó fejhallgatóvá alakítja át
- Könnyű plug and play beállítás
- Bármely hangforrásból kitűnő minőségű beszédet és zenét közvetít
- A Környezeti egyensúly (Environmental balance) segítségével szabályozható a sugárzott hang vagy a környezeti hangok hangereje
- Egyedülálló előny: egyszerre több hallgató is összekapcsolható ugyanazzal az audio jellel
- Akár 80 órán keresztül lehet hallgatni a televíziót egyetlen hallókészülék elemmel

Hogyan használjuk?

Csak vegye ki a TV Connector-t a dobozból és optikai vagy 3,5 mm-es kábellel már csatlakoztatja is bármely televízióhoz. A hallókészülékek automatikusan összekapcsolódnak a TV Connector-ral.

Ha ez az automatikus párosítás nem történik meg, nyomja meg a TV Connector párosító gombját, ekkor az 1 méteren belüli hallókészülékekkel összekapcsolódik. Ha több hallgató van, akkor az 1 méteren belüli hallókészülékekkel a TV Connector automatikusan kapcsolódik annak gombjának megnyomásával.

Kapcsolja be a televíziót, és ha az ügyfél a TV Connector 15 méteres hatótávolságán belül van, a sugárzás automatikusan elindul.



A TV Connector-ra vonatkozó további információkért keresse fel a www.phonakpro.hu/tvconnector honlapot, illetve lépjen kapcsolatba Phonak képviselőjével.