

Phonak

Gyorsinfó

myPhonak app Remote Control

Mi ez?

A Remote Control (Távvezérlő) a myPhonak alkalmazás egyik funkciója, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy aktuális hallási helyzetüknek megfelelően személyre szabják Marvel hallókészülékük beállításait. Ezek a beállítások elmenthetők az applikáción belül.

Alapfunkciók:

- Hangerőszabályozó
- Programváltó
- Környezeti egyensúly szabályozó
- Tinnitus balance

További funkciók:

- Alacsony, közepes és magas frekvenciájú hangok erősítése
- Zajcsökkentés
- Beszédfókusz
- Halk és hangos hangok intenzitása

Az applikáció három előre beállított programot is kínál a Phonak Target programjai alapján:

- Étterem (Beszéd zajban program alapján)
- TV (Csendes környezet program alapján)
- Zene (Zene program alapján)

Miért jó?

- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben finomhangolják hallókészüléküket.
- Előprogramozott hangszíneképeket tartalmaz, a további beállítások kiindulásaként.
- Lehetővé teszi a páciensek számára, hogy aktívabb szerepet játsszanak hallásuk beállításában, a hallásszakértőjükkel szoros együttműködésben.

Hogyan használjuk?

- Töltse le a páciens a myPhonak app alkalmazást Android vagy iOS okostelefonjára.
- Amint megnyitja az alkalmazást, már el is kezdheti a programok testreszabását.
- Az alkalmazásban szereplő előprogramozott hangszíneképek megfelelő kiindulásként szolgálnak a további beállításokhoz.
- A még aprólékosabb beállítások elvégzéséhez az ügyfelek módosíthatják a frekvenciamenetet, a zajszűrőt, a mikrofon irányát, valamint a halk és hangos hangok intenzitását.
- A beállítások elmenthetők az applikációban és bármikor hozzáférhetők.



Apple, the Apple logo, iPhone, and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android is a trademark of Google Inc.