

# マイフォナック アプリ Bluetoothの接続と 削除作業方法

Android編

こちらで紹介するのは一例です。Androidの場合、機種ごとに表示方法や表現が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。またスマートフォン本体の取扱説明書も併せてご参照ください。

## 必要条件

- マイフォナック アプリ：バージョン4.0.1以上
- 機器：Bluetooth® 4.2および Android OS 7.0以降をサポートする Google Mobile Services (GMS) 認証の Android™ 端末（4月28日現在）

## 今回使用したスマートフォン


- メーカー：SONY
- 機種名：XPERIA xz3
- OS：Android 10
- Bluetooth：5.0

# Bluetoothの接続方法

スマートフォンでのBluetooth接続～  
マイフォナック アプリでの接続までの流れについて


# Bluetoothの接続方法

①

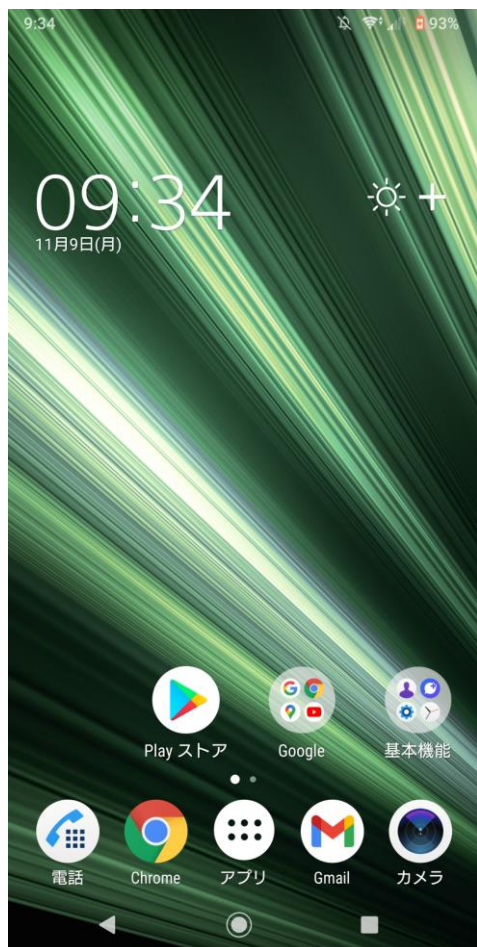

まずはスマートフォンのホーム画面を開きます。


②

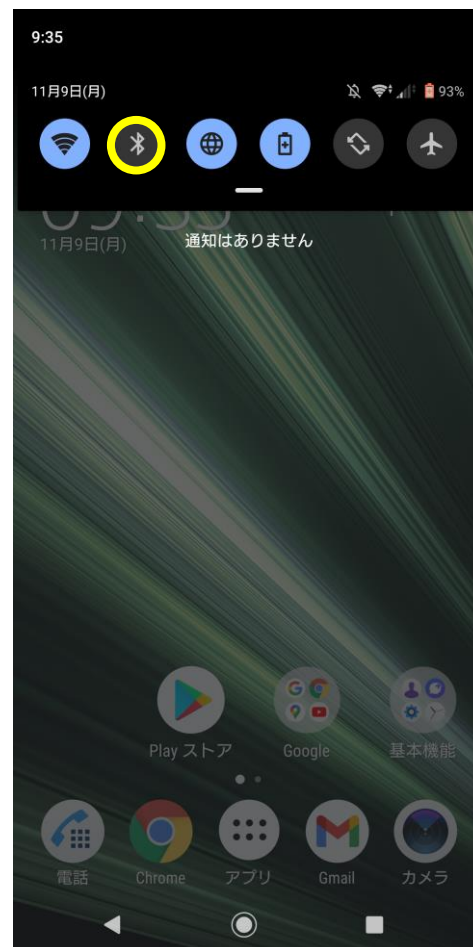

上部画面外から画面中央に向かってスワイプし、メニューバーを表示させます。黄色で囲ったBluetoothのアイコンを長押しします。



③

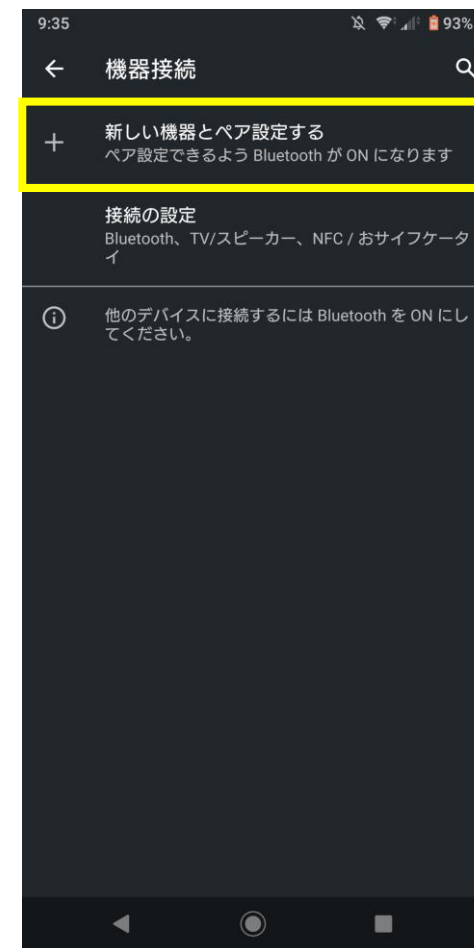

Bluetoothの設定画面が表示されるので、黄色で囲った箇所をタップします。また、Bluetoothがオフになっていた場合、タップした時点でBluetoothがオンになります。


# Bluetoothの接続方法

④



補聴器の電源を入れなおし、『使用可能なデバイス』の一覧に、ヘッドセットのアイコンで『右-Phonak 補聴器』が表示されたらタップします。

⑤

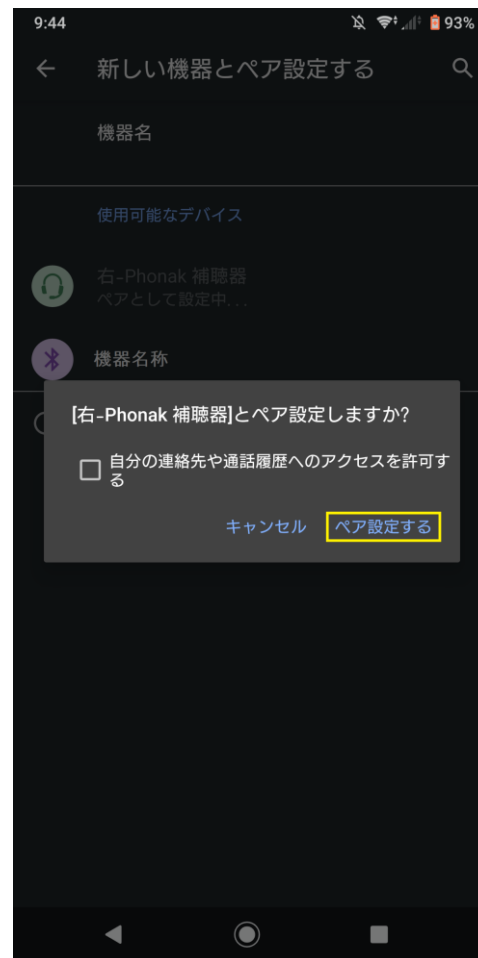

『ペア設定する』をタップします。『自分の連絡先や通話履歴へのアクセスを許可する』に☑を入れなくても先に進めます。


⑥



『右-Phonak 補聴器』が有効になったため、接続作業完了です。両耳装用の場合、左が表示されていませんが、両耳で通話や音楽を聴くことが可能になっています。音楽はステレオ再生されます。


# Bluetoothの接続方法

⑦

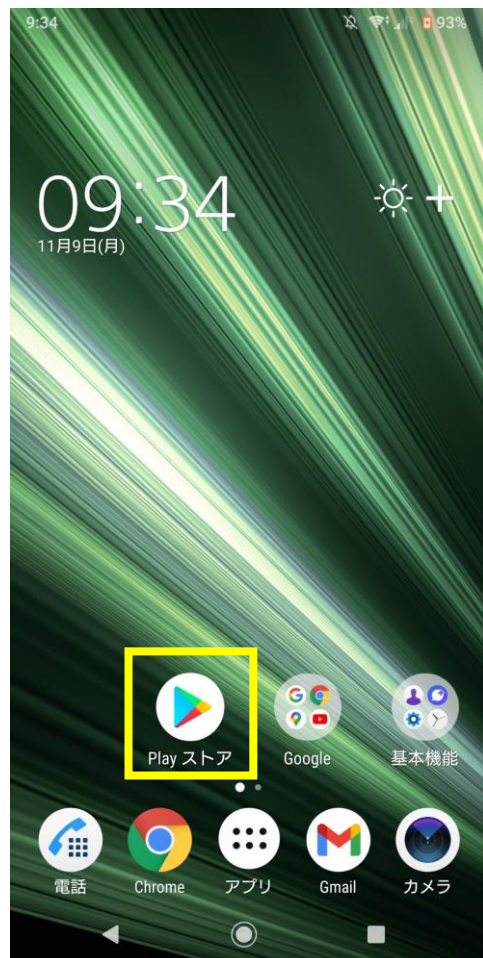


『Playストア』のアプリをタップし、マイフォナックアプリを入手します。

⑧

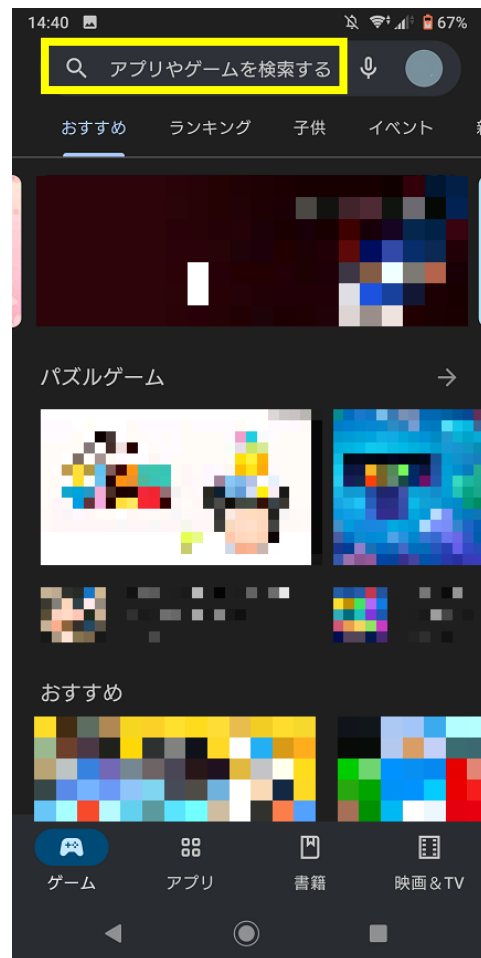

黄枠の検索バーにカタカナで『フォナック』と入力します。

⑨

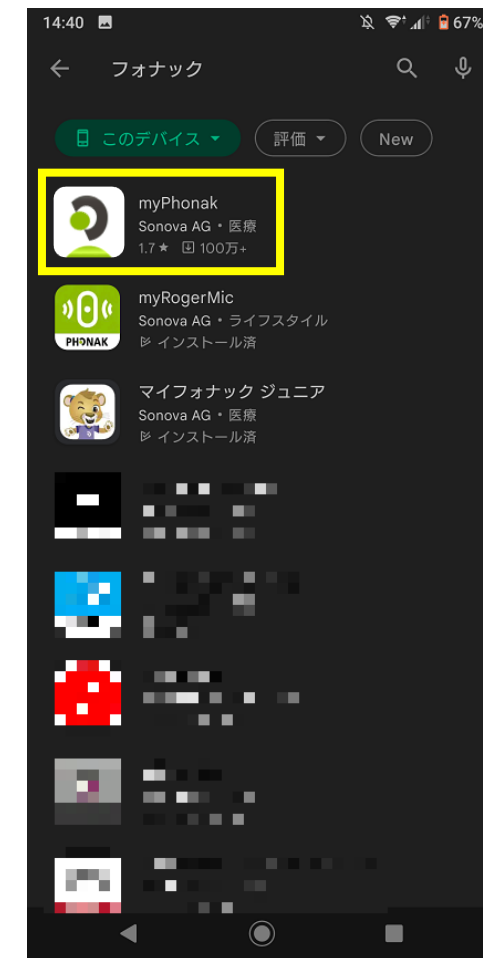


黄枠の『myPhonak』のアイコンをタップします。



# Bluetoothの接続方法

⑩

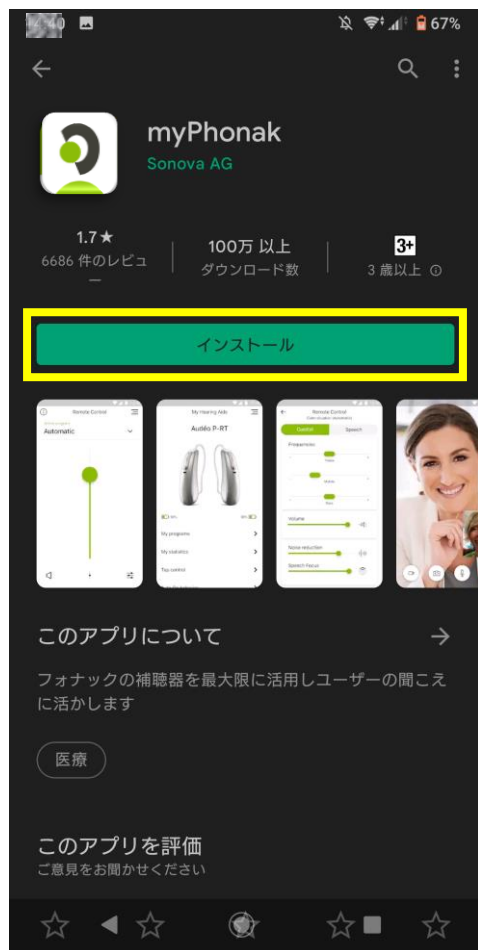

『インストール』をタップしてアプリをインストールします。

⑪



アプリを立ち上げ、画面の提示に従って『補聴器を探す』の画面まで進めます。  
補聴器を探し始めたら補聴器の電源を入れ直します。


⑫



アプリとのペアリングは、左右両方表示されてから『選択』を選びます。

# Bluetoothの接続方法

13

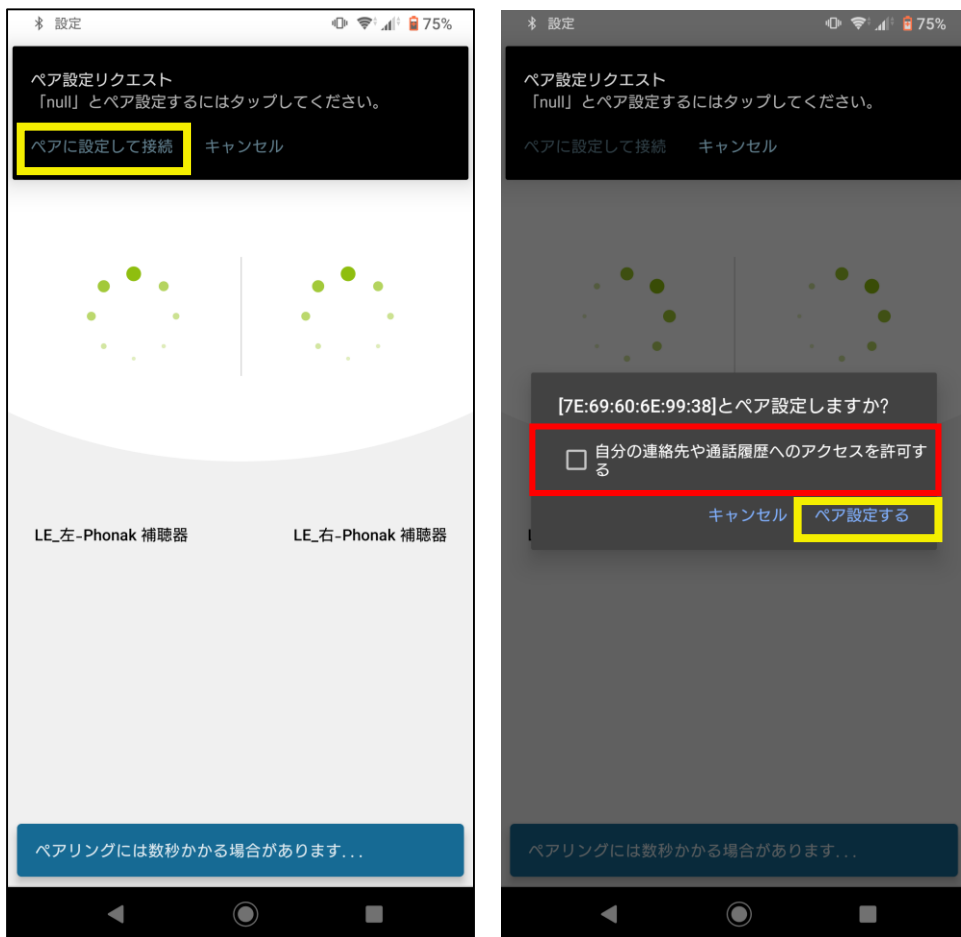

黄枠のようにペア設定を求められた場合はペア設定します。赤枠のようにメッセージが表示されても、を入れる必要はありません。

14



赤枠のメッセージが表示されますが続行をタップしてください。

15



アプリとBluetoothペアリング完了です。



# ペアリングデータの削除方法

スマートフォン内の操作～  
マイフォナック アプリ内の操作～  
Phonak Targetでの操作について

# 削除が必要な理由

Bluetoothが不安定な場合、または接続しにくくなったり、試聴器や他の補聴器のペアリングデータが残っている場合、一度Bluetoothデータを削除し、新たにペアリングしなおす必要があります。


# スマートフォン内のペアリングの削除方法

①




『利用可能なメディアデバイス』や『以前接続されていた機器』がスマートフォン内に保存されているBluetoothデータです。Bluetooth名称の右側にある3つの歯車のアイコンをタップします。

②

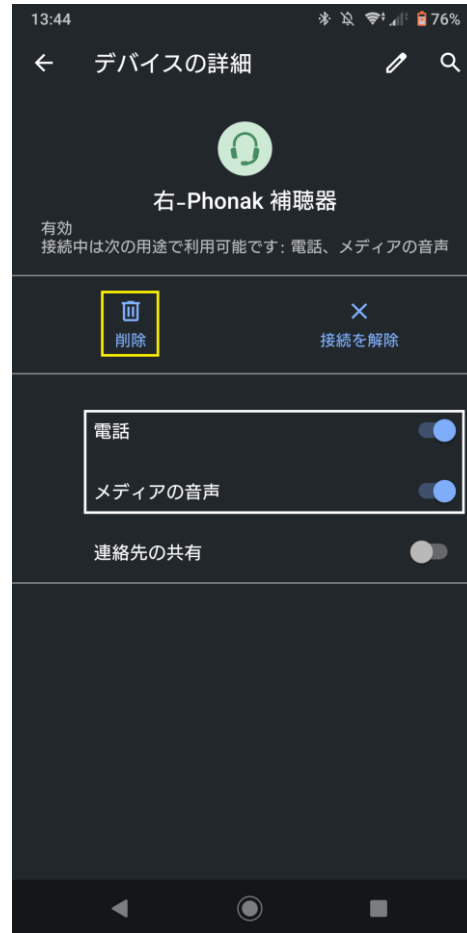

『削除』をタップするとペアリングが削除されます。また、ペアリングを削除せず、一時的に無効にしたい場合は白枠の『電話』や『メディアの音声』のスイッチを切り替えることで、ハンズフリー通話やストリーミング再生をオフにすることが可能です。

③

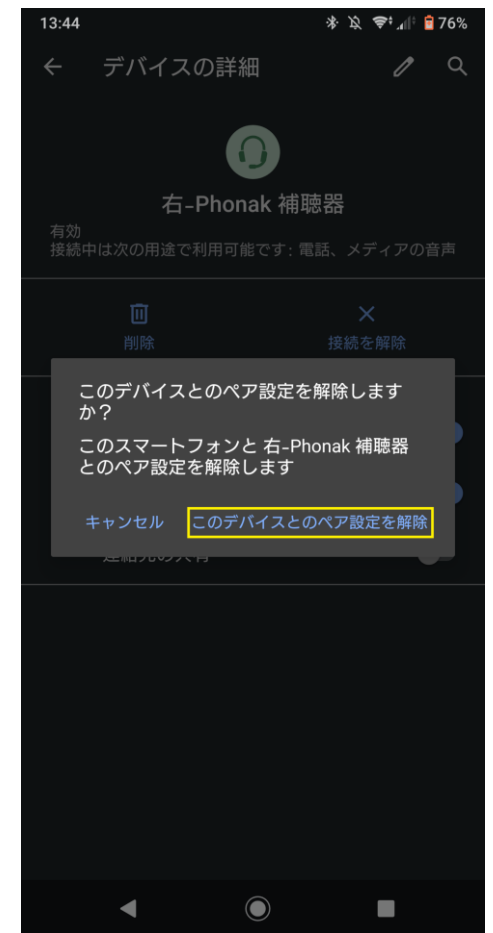

『このデバイスとのペア設定を解除』をタップすることで、スマートフォン内から補聴器のデータが削除されます。

# マイフォナック アプリ内のデータの削除方法



リモコン画面を開き、下部にある「機器」をタップします。このとき、補聴器を接続する必要はありません。



『製品情報』をタップします。



『機器を削除』をタップします。



『確定』をタップすると、アプリ内の補聴器のデータが削除されます。

# Phonak Targetでのペアリング削除方法

Phonak Target 7.2.1 ファイル フィッティング ヘルプ

顧客 Bluetooth, 接続 機器 Naída M90-SP

補聴器  
右: 2032X0DK9  
左: 2032X0DKA

サービス  
レポート...  
使用可能なアプリ  
電話機との互換性  
補聴器サポート  
アクセサリサポート

作用 標準  Bluetooth ストリーミング 通話

短押し  
ボリューム  
±10 dB (±5 ステップ)

長押し  
プログラムを変更する  
A オートセンス OS 3.0  
1 静かな環境 1 (スタートアップ)  
ボタンを下げる操作は同じ作用です。

① 機器オプション

② フィッティング 静かな環境

③ Bluetooth

④  ペアリングを削除

⑤ 保存して終了

多機能ボタン Bluetooth お知らせ音と警告音 スタートアップ データログ

補聴器を接続し、①～③の順に選びBluetoothメニューを開きます。  
④に☑を入れて、⑤で保存して終了します。