

マイフォナック アプリ Bluetoothの接続と 削除作業方法

iPhone編

こちらで紹介するのは一例です。iOSバージョンにより、表示方法や表現が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。またスマートフォン本体の取扱説明書も併せてご参照ください。

必要条件

- マイフォナック アプリ：バージョン4.0.1以上
- 機器：Bluetooth® 4.2および iOS 12以降をサポートする Appleが開発および提供するiPhone 端末（4月28日現在）

今回使用したスマートフォン


- メーカー：Apple
- 機種名：iPhone 12
- iOS：14.8
- Bluetooth：5.0

Bluetoothの接続方法

スマートフォンでのBluetooth接続～
マイフォナック アプリでの接続までの流れについて


Bluetoothの接続方法

①

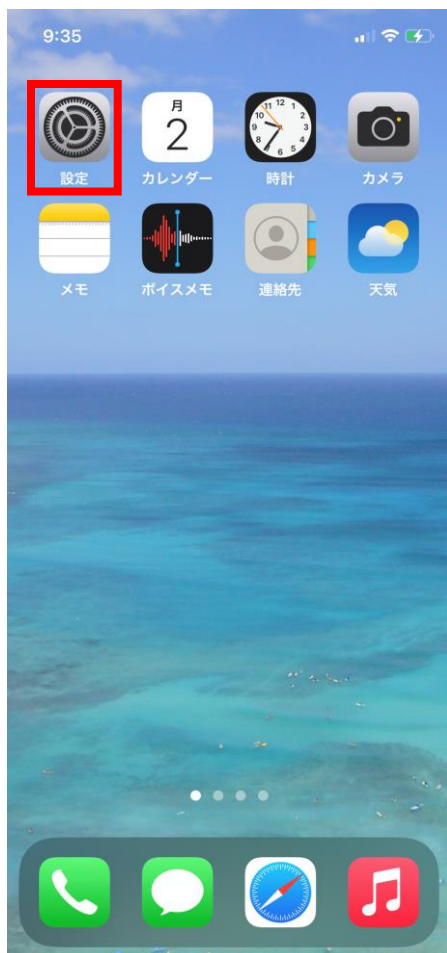

まずはiPhoneのホーム画面を開き、赤枠の設定画面を開きます。
※お使いのiPhoneの状況により、アイコンの位置は異なります。

②

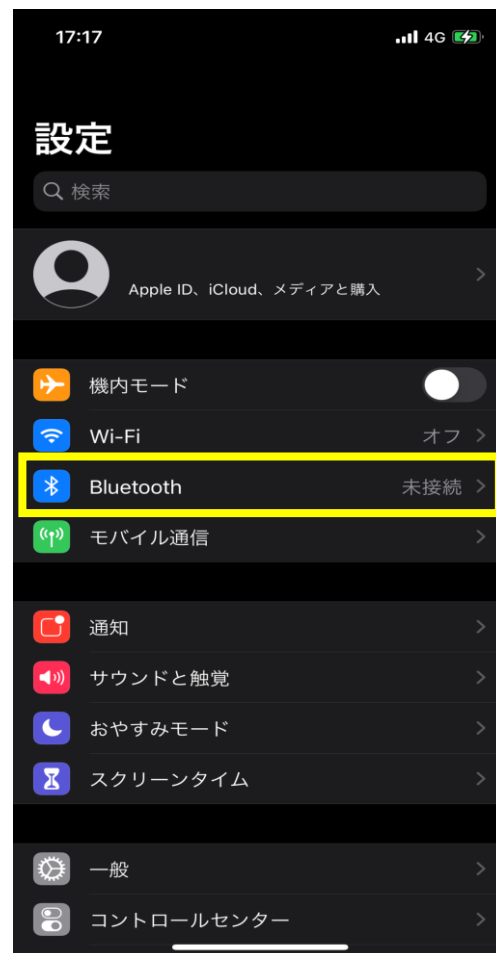

黄枠のBluetoothをタップします。

③



Bluetoothがオフになっていた場合、白枠のスイッチをタップしBluetoothをオンにします。オンにすると自動的に検出が始まります。補聴器の電源を入れ直し、『デバイス』の一覧に『右-Phonak補聴器』が表示されたらタップします。


Bluetoothの接続方法

④




『右-Phonak 補聴器』が接続済みになったため、接続作業完了です。
両耳装用の場合、左が表示されてお
りませんが、両耳で通話や音楽を聴くこ
とが可能になっております。
音楽はステレオ再生されます。

⑤

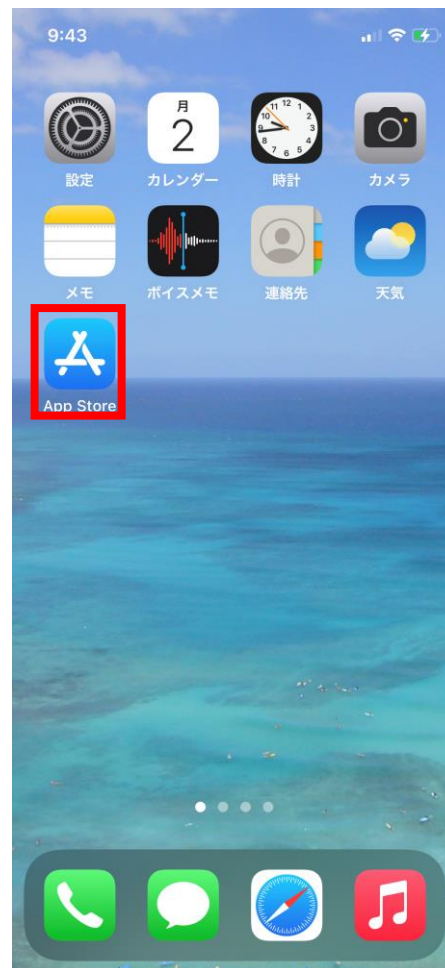

『App Store』のアプリをタップし、
マイフォナック アプリを入手します。
※お使いのiPhoneの状況により、ア
イコンの位置は異なります

⑥

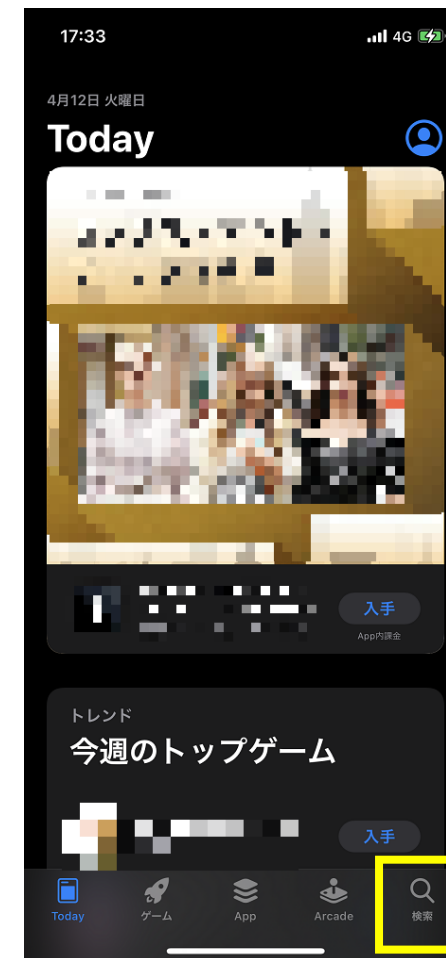

黄枠の検索アイコンをタップします。


Bluetoothの接続方法

⑦




黄枠の検索バーにカタカナで『フォナック』と入力します。

⑧

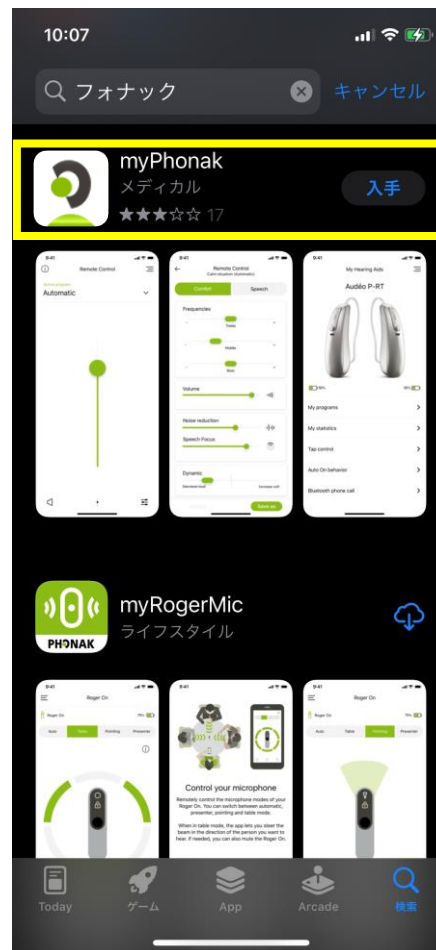

黄枠の『myPhonak』のアイコンをタップします。

⑨

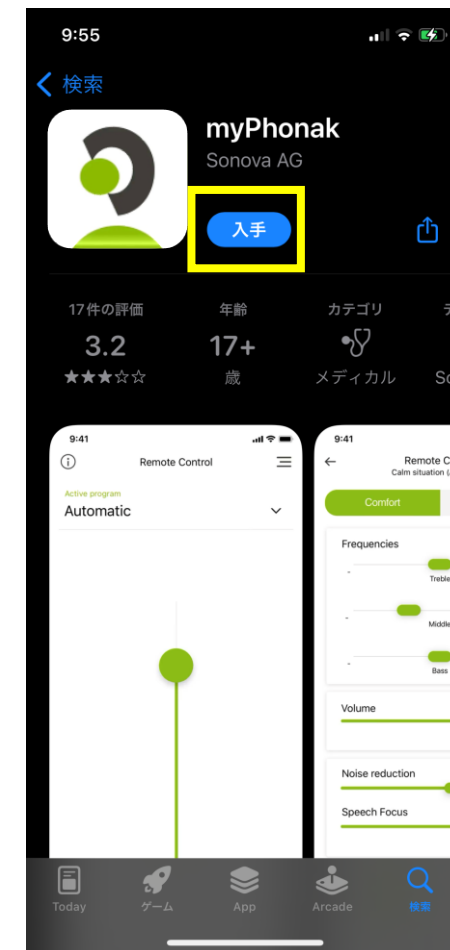

『入手』をタップしてアプリをインストールします。


Bluetoothの接続方法

⑧



アプリを立ち上げ、画面の提示に従って『補聴器を探す』の画面まで進めます。補聴器を探し始めたら補聴器の電源を入れ直します。

⑨

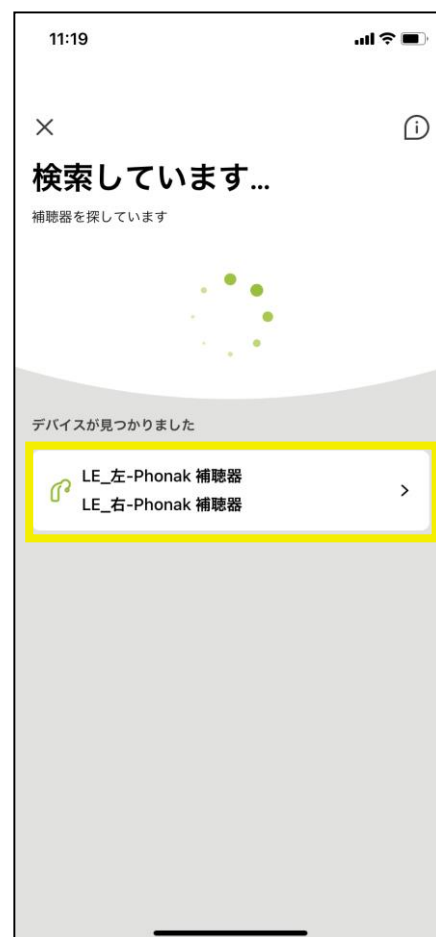

アプリとのペアリングは、全てのデバイスが表示されてからタップしてください。

⑩



赤枠のメッセージが表示されますが続行をタップしてください。

⑪



アプリとBluetoothペアリング完了です。

ペアリングデータの削除方法

スマートフォン内の操作～
マイフォナック アプリ内の操作～
Phonak Targetでの操作について

削除が必要な理由

Bluetoothが不安定な場合、または接続しにくくなったり、試聴器や他の補聴器のペアリングデータが残っている場合、一度Bluetoothデータを削除し、新たにペアリングしなおす必要があります。

スマートフォン内のペアリングの削除方法

①




『自分のデバイス』がスマートフォン内に保存されているBluetoothデータです。Bluetooth名称の右側にある①をタップします。

②



『このデバイスの登録を解除』をタップします。

③

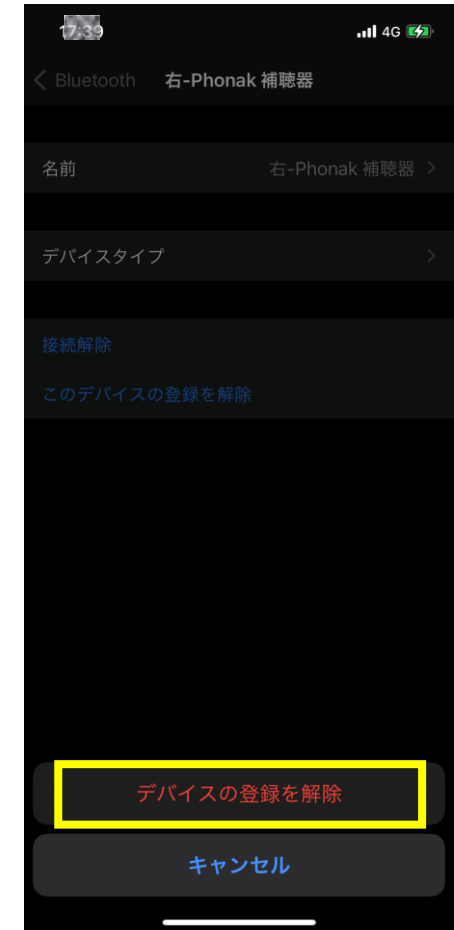

『デバイスの登録を解除』をタップすることで、iPhone内から補聴器のデータが削除されます。

マイフォナック アプリ内のデータの削除方法



リモコン画面を開き、下部にある「機器」をタップします。このとき、補聴器を接続する必要はありません。



『製品情報』をタップします。



『機器を削除』をタップします。



『確定』をタップすると、アプリ内の補聴器のデータが削除されます。

PHONAK
life is on

