
# フォナックリモート

取扱説明書

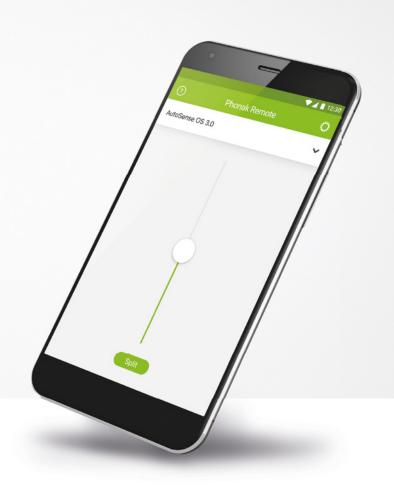





## はじめに

フォナック リモートは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、聞こえのソリューションにおける世界的なトップ企業であるソノヴァにより開発されたアプリです。このユーザーガイドを熟読し、装置の利用可能な機能をすべて活用してください。

#### 使用目的

フォナック リモート アプリは、Android™ および Apple® iOS スマートフォン¹で、フォナックの補聴器の一部の機能を調整するために使用します。

#### 

フォナックリモートアプリを使用するには、Bluetooth®接続が可能なフォナック補聴器が必要です。

フォナック リモートは、Bluetooth 低エネルギー(BT-LE)機能を装備したスマートフォンで使用でき、バージョン10.2以降の iOS を実装した iPhone 5s 以降のスマートフォンと互換性があります。また、フォナック リモートは、Bluetooth 4.2および Android OS 6.0 以降をサポートする Google Mobile Services (GMS)認証の Android スマートフォンでも使用できます。

一部の電話には、タッチサウンドやキーパッドトーンがあり、 補聴器へのストリーミングをシミュレートできます。 電話設定に移動してサウンドを選択し、すべてのタッチサウン ドとキーパッドトーンが無効になっていることを確認してくだ さい。

'互換性のある電話: フォナック リモート アプリは、Bluetooth \* LE モード対応(BLE)を装備した電話とのみ併用できます。

Bluetooth®の言葉のマークおよびロゴは、Bluetooth SIG が所有する登録商標です。ソノヴァは、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。他の商標および商品名は、それぞれの所有者に属します。


Apple®、Apple のロゴ、iPhone および iOS は、Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android™、Google Play、および Google Play のロゴは、Google Inc. の商標です。

## 目次

クイック ガイド	3
アプリの初回起動	4
フォナック補聴器とのペアリング	5
補聴器の接続	6
ペアリングに関するトラブルシューティング	7
フォナック リモートのメイン画面	8
設定	10
記号の情報と説明	13

# クイック ガイド

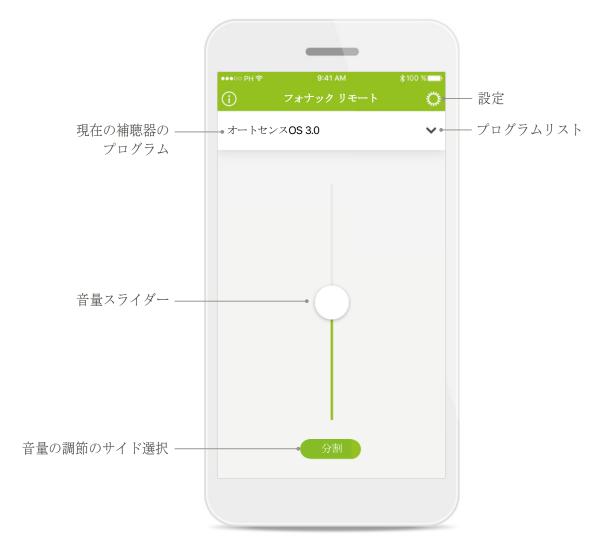

プログラム オートセンスOS 3.0 使用可能なプログラム 静かな場所での会話 (聴覚専門家が設定 します) 音楽 現在の補聴器の テレビ プログラム

メイン画面

プログラム リスト

## アプリの初回起動

#### アプリのインストール後、いくつかの手順を行う必要があります。これらは、一度だけ行うのは一度だけです。



**互換性のある機器** このアプリは、Bluetooth 接続が可能なフォナッ ク補聴器でのみ使用可

能です。



プライバシー ポリシー アプリを使用するには、 プライバシーポリシーを **許可**する必要があります。



使用データを提供するかどうか選択することができます。ご提供いただく 使用データは、今後の製品向上に役立てることが

製品の向上

できます。



アプリを使用するには、 Bluetoothを有効にし、 補聴器と通信できるよう にする必要があります。

Bluetooth



#### 位置情報

Bluetooth 補聴器とペア リングする際、Android スマートフォンで位置 情報サービスを有効に する必要があります。

# フォナック補聴器とのペアリング

#### Bluetooth 対応の補聴器をフォナック リモート アプリに接続するには、下記の説明に従ってください。



#### ペアリングの説明

検出処理を始めるには [続ける]をタップしてく ださい。Non-rechargeable (充電式ではない)または rechargeable hearing aids (充電式補聴器)をタップし、 お使いの補聴器の説明を ご覧ください。



#### 検出しています

互換性のある補聴器をア プリで検出中です。検出 すると表示されます。



#### 選択

お使いの補聴器がリスト に表示されたら[**接続**] をタップします。




#### 複数

複数の補聴器が検出される と、複数表示されます。

# 補聴器の接続

Bluetooth 対応の補聴器をフォナック リモート アプリに接続するには、下記の説明に従ってお進みください。

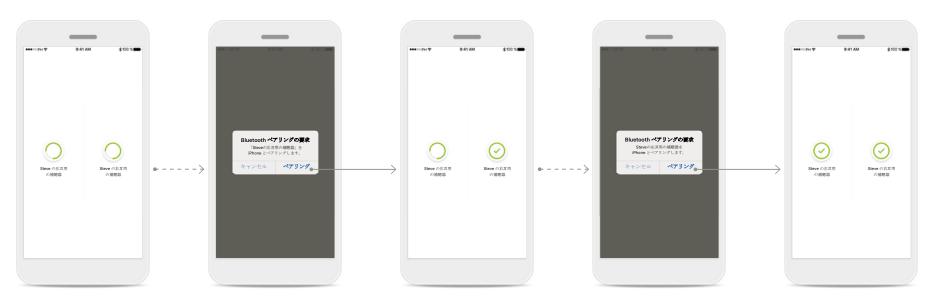

補聴器のペアリング 補聴器がひとつずつ 接続されます。

ペアリング要求の承認 アップの[**ペアリング**] をタップし要求を承認し ます。

2つ目の補聴器のペアリング iOS デバイスで、ポップ もう一方の補聴器が接続 されます。

ペアリング要求の承認 iOSデバイスで、ポップア ップの[**ペアリング**]をタップ し要求を承認します。

ペアリングの完了 両方の補聴器のペアリ ングが完了しました。

# ペアリングに関するトラブルシューティング

#### 設定中に起こり得るエラー



#### 互換性のない補聴器

互換性がないため、補聴 器を接続することができ ません。



#### 接続エラー

補聴器への接続が確立できませんでした。処理を再度行うには[**再試行**]をタップしてください。



#### 補聴器の接続エラー

補聴器の片方のペアリングに失敗した場合、次の手順で解決を試みてください。

- 1. **[再試行]**をタップし、 ペアリング処理を再度 行います。
- 2. この処理は、片方の補 聴器にのみ行います。



#### 両方の接続に失敗

[**再試行**]をタップしてペア リング処理を再度実行し、 説明にしたがってお進めく ださい。


## フォナック リモートのメイン画面

#### すべての補聴器で使用可能な機能



#### 補聴器の音量の調節

両耳で補聴器の音量を 変更するには、上下に スライダーを動かして ください。

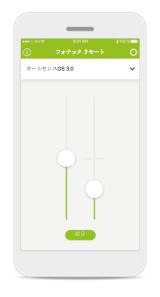

#### 音量の分割

[分割]ボタンを押し、補 聴器音量スライダーを分 割し、それぞれの耳で個 別に調節できます。



#### ミュート

音量スライダーを端まで 下げると、補聴器を消音 にすることができます。



### プログラムへのアクセス

プログラム リストにアク セスするには、音量スライ ダー上部のメニューをタッ プします。使用可能なプロ グラムは、補聴器フィッチントがいくつか表示され グ担当者が補聴器に適用した 設定ごとで異なります。



#### ヒントにアクセス

メイン画面の左上にあ る[i]アイコンをタップ すると、アプリの使用 に関する基本的なヒン ます。

## フォナック リモートのメイン画面

#### 機能は、補聴器に適用のプログラム内容とお持ちのアクセサリーによって異なります。



#### プログラム オプションに アクセス

一部のプログラムには、 さらに調節項目がありま す。その場合、音量スラ イダーの下部に特殊なア イコンが表示されます。



#### 環境バランス

外部ストリーミング機器 (テレビ コネクター、 音楽)を使用する場合、 周囲の音よりもストリーミ 択することができます。



#### 耳鳴りマスキング機能

耳鳴りの症状があり、聴 覚専門家から耳鳴りマス キング機能の使用方法の 指示を受けている場合、 ングの音に集中するよう選 マスキングノイズの音量 をここで調節できます。



#### 電池残量

充電式補聴器では、現在 の電池残量状況を確認す ることができます。




#### 電池残量

電池の残量が20%を下 回ると、アイコンと残 量値が赤く表示されま す。早めに補聴器を充 電してください。

# 設定

#### アプリの一般情報は設定に記載されています。

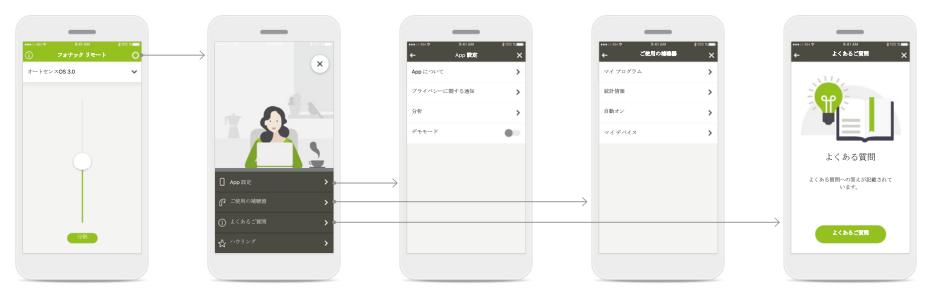

#### 設定にアクセス

設定にアクセスするには、 メイン画面の右上にある [**歯車**]アイコンをタップし ます。

#### 設定

使用可能な設定が設定画面にすべて表示されます。

#### アプリの設定

アプリに関するすべての 情報にここからアクセス できます。

#### ご使用の補聴器

補聴器に関するすべての 情報と設定内容へはここか らアクセスできます。

**自動電源オン**オプション は、充電式補聴器でのみ ご使用いただけます。

#### よくあるご質問

詳細な情報とサポート がオンラインで利用可 能です。

# 設定

#### プログラム名の変更



ご使用の補聴器 リストの[ご使用の補聴器] をタップします。


マイ プログラム リストの[**マイ プログラム**] 名前を変更するプログラ をタップします。

プログラムの選択 ムをタップします。 画面の編集 プログラムの詳細ページで [編集]アイコンをタップし ます。

入力フィールド内のプ ログラム名を変更し、 右上にある[確認]アイコ ンを押し確定します。 左上にある[X]アイコン をタップすれば、いつ でも取り消すことがで きます。

# 設定

#### ペアリングのリセット

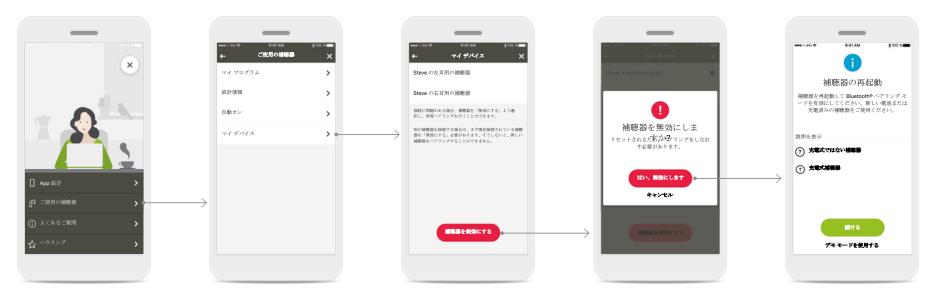

**ご使用の補聴器** リストの[**ご使用の補聴器**] をタップします。

**マイ デバイス** リストの[**補聴器一覧**] をタップします。

**補聴器の無効化** 補聴器とスマートフォン の連携を削除するには [**補聴器を無効にする**] をタップします。

確定 確定するには、ポップアッ プの[**はい、無効にします**] をタップします。

ペ**アリングを実行** 5ページにある説明に 従いペアリングを行い ます。

## 安全に関する重要な情報

- (i) 個人のスマートフォンの使用に関する責任は、ユーザーにあります。スマートフォンおよびアプリは慎重に扱うようお願いします。
- **(i)** 取扱説明書の書面コピー(無料)を入手するには、お近くのソ ノヴァ代理店にお申し付けください。7日以内にコピーをお 送りします。
- (i) 補聴器が、過度な磁場の障害により機器が反応しない場合は、その強い磁場から離れてください。

## 記号の説明

- (1) この記号は、ユーザーがこの取扱説明書の関連情報を読んで 考慮することの重要性を示しています。
- (i) 製品の安全性および取り扱いに関する重要な情報です。
- CE マークにより、このフォナック製品が、医療装置の指令 93/42/EEC を遵守していることをソノヴァは確認します。 CE マークは、2018年に取得しました。

CE マークに続く番号は、上記の指令下で評価を行った公認機関のコードを表します。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa · Switzerland www.phonak.com **( ( ( 0 4 5 9**