

デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger ロジャー クリップオンマイク Roger Clip-On Mic 取扱説明書（操作編）




はじめに

このたびはフォオナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger (ロジャー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なお読みください。

別紙「安全上のご注意」も必ずお読みください

1. 本体付属品

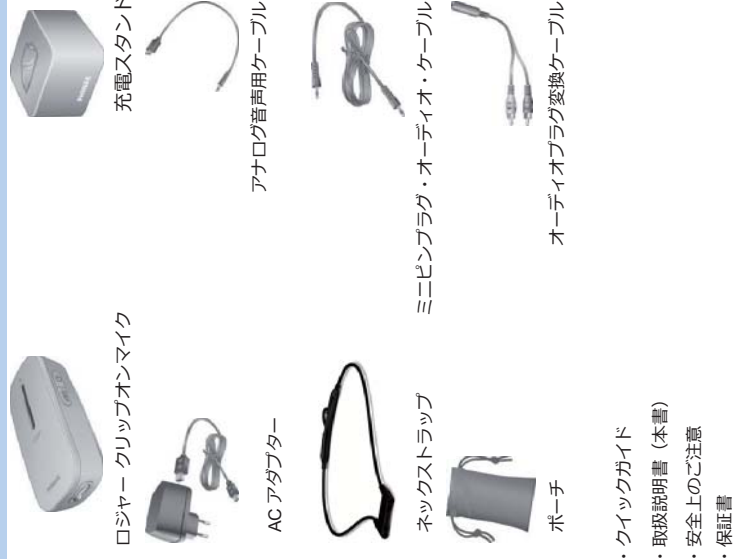

5. ボタンの扱い方

本書でのボタン操作は以下のとおりです。

- ボタンを押す ボタンを短く一回押す
- ボタンを○回押す ボタンを指定された回数繰り返し押し
- ボタンを長押しする 特定の動作を始めるまで (2~3秒または指定の長さ) 押し続ける

6. ロジャー クリップオンマイクの使用方法

基本的な使い方

あらかじめ、補聴器・人工内耳およびロジャー受信機を使用可能しておきます。補聴器・人工内耳およびロジャー受信機取扱説明書もあわせてご参照ください。

- 電源を入れる
電源ボタン を長押しして、電源をオンにします。インジケータが白く一回点灯 (○) します。
- ロジャー受信機をネットワークに追加する
受信機から 10 cm以内の距離で、ロジャー クリップオンマイクの追加ボタン を押し、受信機がネットワークに追加されます。結果はインジケータに表示されます。

2. 各部の名称



3. ロジャー クリップオンマイクの準備

- ロジャー クリップオンマイクを充電する
ロジャー クリップオンマイクには繰り返し充電が可能なり、充電方法が使用されています。
- 充電方法
充電スタンドに AC アダプターを接続し、ロジャー クリップオンマイクを差し込みます。
 - ACアダプターにつないだままにしても、ロジャー クリップオンマイクのバッテリーは過充電されません。
 - 充電中もロジャー クリップオンマイクを使用できます。


(インジケータ表示)

- ... 接続成功
 - ... 受信機が見つかりません
 - ... 互換性のない機器です
- ネットワークへの追加は最初に一回だけです。一度ネットワークに追加したマイクは、電源を入り切りしてもネットワークに参加し続けます。
- 受信機が複数ある場合は、受信機一台ずつネットワークに追加する作業を行います。

- マイクロホンに向かって話す
ロジャー クリップオンマイクからの音が聞こえているかを確認するには、マイクロホンを軽く指でこすり、擦った音がロジャー受信機装用者に聞こえているかを確認します。
- 終了する
ロジャー クリップオンマイクの電源をオフにするには、電源ボタン を長押しします。

複数のマイクロホンを使用する

ロジャーでは複数のマイクロホンを同じネットワークに追加することができます。これを MTN (マルチ・トーカー・ネットワーク) と呼び、最大 10 台のマイクロホンを使用できます。

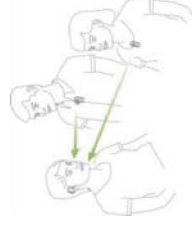

3. 電池残量

充電が必要になると、インジケータが赤く点滅して通知します。詳しくは「12.インジケータの表示」をご覧ください。

4. ロジャー クリップオンマイクの基本性能

充電池について

使用可能時間：約 4.5 時間 充電時間：約 2 時間

使用可能距離について

通常の使用 室内：約 15m / 屋外：約 10m

- ネットワーク追加・受信機手エックは送信機から 10cm 以内で行ってください。
- 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。
- 室内で安定して使用することができ距離は約 10m です。
- 装着する人の体が電波を遮り、ロジャー クリップオンマイクからの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジャー受信機の方向に体を向けて使用してください。

7. 外部音響機器との接続 (外部入力端子)

充電スタンドを使用する
テレビなど、決まった場所で使用する音響機器と接続する場合は、充電スタンドの外部入力端子を使用すると便利です。

充電スタンドの外部入力端子を、音響機器の音声出力端子 (ヘッドフォン端子等) に接続します。

必要に応じて、オーディオブラグ変換ケーブルを使用してください。



充電スタンドに AC アダプターが接続されていれば、ロジャー クリップオンマイクの電源がオフの場合でも、外部入力を感知して自動的に電源が入ります。

ロジャー クリップオンマイクの USB 端子に接続する


モバイル機器など、手元に置いて使用する機器と接続する場合は、ロジャー クリップオンマイクの USB 端子を使用します。



まずアナログ音声ケーブルと音響機器を接続し、次にロジャー クリップオンマイクのマイク USB 端子にケーブルを接続します。いずれの方法でも、外部入力の音声が入っている間は、ロジャー クリップオンマイクのマイクは無効になります。


8. ロジャー クリップオンマイクの使用スタイル

ロジャー クリップオンマイクは胸元に取り付け、口元から 15cm 以内の場所で使用します。衣服のデザインに合わせて様々な留め方が可能です。

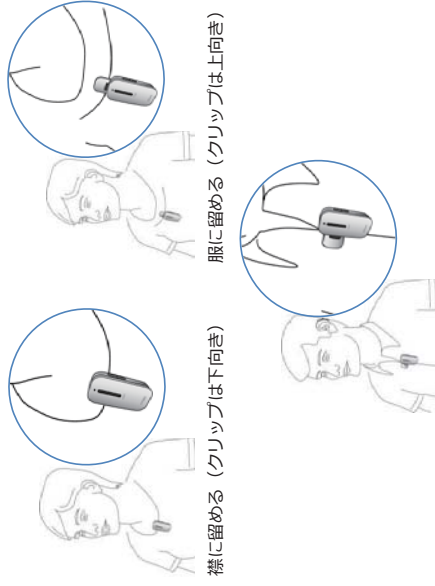

ボタンとボタンの間に留める (クリップは横向き)

誤った留め方

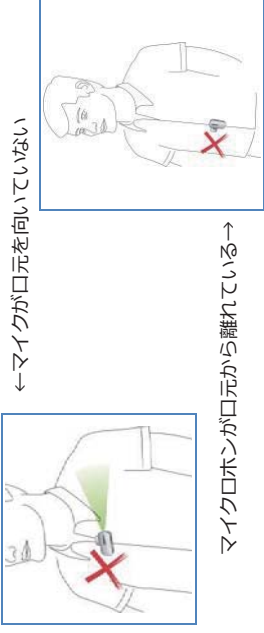

←マイクが口元を向いていない

マイクが口元から離れている →

9. ネットストラップの使い方



クリップで留めることが難しい場合は、付属のネットストラップを使用します。

ロジャー クリップオンマイクへの取り付け方法

ネットストラップを、ロジャー クリップオンマイクのクリップにしっかり挟み込みます。



取り外す場合は逆の手順を行います。

10. ミュート

ロジャー クリップオンマイクを使用中、聞き手に首声を聞かせたくない時に一時的にミュート (マイクロホン無効) にすることができます。



電源ボタン を押すとミュートになります。

解除するにはもう一度電源ボタン を押します。

11. ロジャー クリップオンマイクのリセット

ロジャー クリップオンマイクが何らかの原因で反応しなくなったり、動作が不安定になったりした場合は、リセットを行うことで回復することができます。リセットは、電源ボタン と追加ボタン を同時に 7 秒間長押ししてください。

装着方法

ネットストラップはジョイント部分で左右に切り離すことができます。首に掛けるとき、外すときは、ジョイント部分を切り離してください。



長さの調整もジョイント部分で行います。

12. インジケータの表示

インジケータ表示	内容
	電源オン
	動作中表示
	電源オフ
	外部入力
	ミュート
	充電中
	充電完了
	要充電
	MTN 親機が見つかりません。

- 親機が使用可能な範囲内にあることを確認してください。
- 現在のネットワークを破棄して、新しいネットワークを開始したい場合は、インジケータがオレンジ色に変わるまで、追加ボタン を 7 秒長押ししてください。新しいネットワークで使用するには、ロジャー クリップオンマイクとロジャー受信機をもう一度ネットワークに追加してください。

13. トラブルシュート

- 電源が入らない
 - 充電してください。

14. 保証期間とアフターサービス

保証期間とアフターサービスについては、「安全上のご注意」をご覧ください。

Memo

販売店名

製造販売業
ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川 2-5-8
天王洲パークサイドビル
TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口)
FAX0120-23-4080
www.phonak.jp

