

デジタルワイヤレス補聴援助システム ロジャー
線音源スピーカー

ロジャー デジマスター 7000/5000 V2

取扱説明書

はじめに

このたびはフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム ロジャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ロジャー デジマスターは、一般的なスピーカーに比べ、遠方まで音が届くとともに、反響、残響が少ないという特徴を持つ線音源スピーカーで、専用のワイヤレスマイク（ロジャー送信機）と一緒に使用します。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

ロジャー デジマスター本体の取り扱いについて

■ 危険
・分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
・濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けが

などの原因となります。使用場所や取り扱いに注意してください。
・火のそばや直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所で使用したり放置したりしないでください。機器の変形、故障、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

■ 警告
・強い衝撃を与えないでください。破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
・使用中や充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など今までと異なる症状がある際には、直ちに以下の作業を行ってください。そのまま使用すると発熱、破裂、発火の原因となります。
1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. ロジャー デジマスターの電源を切る。

■ 注意
・湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には置かないでください。

AC アダプターの取り扱いについて

■ 警告
・付属の専用 AC アダプターを使用してください。濡れた手で AC アダプターのコード、コンセントに触れないでください。感電の原因となります。
・風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電の原因となります。
・長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
・コンセントにつながれた状態で、充電用端子に手や指など体の一部に触れさせないでください。感電、傷害、故障の原因となります。
・AC アダプターをコンセントに差し込むときは金属類に触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。誤った場合、感電、ショート、火災の原因となります。指定の電源、電圧で使用してください。誤った場合、火災、故障の原因となります。
・電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災の原因となります。
・雷が鳴り出したら、ロジャー デジマスター本体、AC アダプターには触れないでください。落雷、感電の原因となります。
・充電中は AC アダプターを安定した場所に置いてください。また AC アダプターを布などで覆ったり、包んだりしないでください。

■ 注意
・AC アダプターをコンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
・AC アダプターのコードの上に重いものを載せないでください。感電、火災の原因となります。

■ その他の注意事項

本製品の修理はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジャパンの指定するサービスセンターのみで可能です。

1. 本体および付属品

ロジャー デジマスター本体
AC アダプター
スタンド
壁掛け用パーツ
取扱説明書（本書）
デジマスター設置ガイド
保証書



2. 各部の名称



<底部>

1. 電源スイッチ
2. 電源端子
3. 外部入力端子（3.5mm）
4. 外部出力端子（3.5mm）
5. Bluetooth ボタン



<上部>

6. USB 端子（タイプ C）



<前方上部>

7. インジケーター

3. ロジャー デジマスターの組み立て

ロジャー デジマスターは、スタンドと壁掛けの2通りの設置方法が選べます。付属のロジャー デジマスター設置ガイドを参考にして組み立ててください。

4. ワイヤレスマイクロホンの準備

ロジャー デジマスターは専用のワイヤレスマイクロホン（ロジャー送信機）と一緒に使用します。

ロジャー デジマスターを使用する前に、ロジャー送信機とネットワークを組んでおきます。

5. ネットワークの組み方


ロジャー デジマスターの電源を入れます。

ロジャー送信機の電源を入れます。

●ロジャー タッチスクリーン マイクの場合：

ロジャー デジマスターから 10 cm 以内に近づけ、（機器の接続）をタップしてネットワークに追加します。

ネットワークが組みまると、ロジャー タッチスクリーンマイクのディスプレイ画面に『ロジャー DigiM5000/7000 V2 が接続されました。』と表示されます。

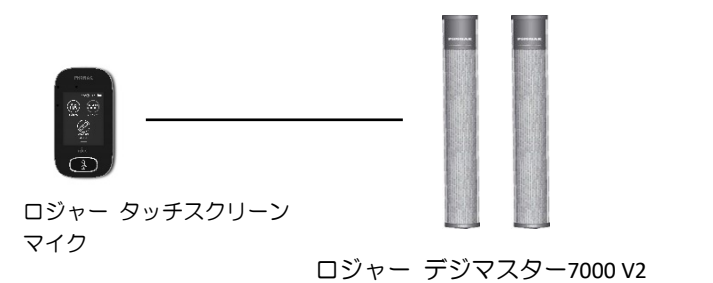

6. 音量調整

本製品は周囲の騒音レベルに合わせて自動音量調節機能が働きますが、ロジャー送信機を使用して好みの音量に微調整することも可能です。


●ロジャー タッチスクリーン マイクの場合：

1. 「SoundField」をタップします。
2. + / - をタップして音量を調節します。

7. インジケータ表示について

インジケータ表示の内容は以下の通りです。

電源オフ		電源がオフの状態です。
電源オン 動作中	 青（点灯）	本製品とロジャー送信機の電源が入っており、正常に作動しています。
スタンバイ モード	 青（点滅）	ネットワーク内にロジャー送信機が見つかりません。ロジャー送信機の電源が入っているか、電波の届く範囲内（10m以内）にあるか確認してください。
ミュート	 緑（点灯）	ロジャー送信機がミュートになっています。マルチ・トーカー・ネットワーク使用時は親機のロジャー送信機の状態を確認してください。
ボリューム	 緑（点滅） 赤（ボリューム最大）	ボリュームの上げ下げを行っています。ボリュームが最大になると赤く点滅します。
ソフトウェア アップデート	 黄（点滅）	ソフトウェアをアップデートしています。

異常	 赤（点滅）	本製品の電源を切り、ACアダプタのプラグを抜いて10秒間放置してください。その後ACアダプタを接続し電源をもう一度入れて下さい。それでも解消しない場合はお求めの販売店にご相談ください。
----	--	--

8. Bluetooth®機器との接続

1. ロジャー デジマスター底部の右図赤丸のBluetooth ボタンを短く押します。
2. インジケータが青く点滅します。
3. Bluetooth®機器の画面にDigiMaster xxxxと表示されたら選択してペアリングします。
4. 接続がされるとインジケータが青く2回点滅します。

Bluetooth®およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有し、Sonova AGはライセンスに基づいてこれらの商標を使用しています。

9. 外部機器との接続

入力

3.5 mmオーディオケーブルのプラグをロジャーデジマスター底部の外部入力端子に接続して、もう一方のプラグをスマートフォンやタブレットなどの外部機器の音声出力端子に接続することで外部機器からの音声をロジャーデジマスターから出すことができます。

出力

3.5 mmオーディオケーブルのプラグをロジャーデジマスター底部のみ右図赤丸の外部出力端子に接続して、もう一方のプラグをPCなどの音声録音ができる機器の音声入力端子に接続することでネットワーク全体からの音声を記録できます。

10. その他

有効室内面積

- ジャー デジマスター7000 V2（2台）最大約 300 m²
- ジャー デジマスター7000 V2（1台）最大約 150 m²
- ジャー デジマスター5000 V2（1台）最大約 100 m²

使用可能距離

マイクロホン（ロジャー送信機） / ロジャーデジマスター間：最大約 25m

※ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。

※ マイクロホン（ロジャー送信機）からロジャー デジマスターへ発する電波は、屋外や体育館などの大きな部屋で使用する場合、マイクロホン（ロジャー送信機）を装着する人の体が電波を遮り、マイクロホン（ロジャー送信機）からの音が途切れることがあります。上記のような場所では、マイクロホン（ロジャー送信機）が体の前面に来るように装着してください。

11. 保証期間とアフターサービス

保証について

日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より2年間です。無償修理の際、保証書が必要になりますので、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

Local Warranty

Please ask the hearing care professional, where you purchased your hearing aid, about the terms of the local warranty.

日本国外における保証期間（国際保証）

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証対象はアクセサリパーツを除く機器本体となります。当規定は上記の修理保証規定により交換・修理をお約束するものであり、法律上お客様の権益を制限するものではありません。

International Warranty

Phonak offers you a one year limited international warranty valid starting from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material

defects in the hearing aid itself, but not accessories such as batteries, tubes, ear modules, external receivers. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown. The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national and legislation governing sale of consumer goods.

保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用・過失・改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、ソノヴァ・ジャパンが指定するサービスセンターでのみ行ってください。また、専門家による調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。

Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress. Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売店名

製造販売業
ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川 2-5-8
天王洲パークサイドビル
TEL0120-06-4079
（お客様相談窓口）
FAX0120-23-4080
www.phonak.com/jp/ja



PHONAK
life is on