

## デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger




### ロジャー ペン アイエヌ

# Roger Pen iN


## 安全上のご注意




このたびはフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger（ロジャー）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に、取扱説明書とこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損傷を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

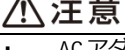
	<b>危険</b>	この表示は取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示は取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

### 1. ロジャー ペン iN、バッテリーの取り扱いについて


	<b>危険</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>弊社が指定したバッテリーを必ず使用してください。指定以外のバッテリーを使用した場合、ロジャー ペン iN やバッテリー、その他機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。</li> <li>分解、改造をしないでください。感電、火災、故障、けがなどの原因となります。</li> <li>濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所や取り扱いに注意してください。</li> <li>火のそばや直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所で使用したり放置したりしないでください。機器の変形、故障、バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。</li> </ul>
--	-----------	--

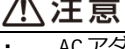
	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。</li> <li>所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。</li> <li>使用中や充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など今までと異なる症状がある際には、直ちに以下の作業を行ってください。そのまま使用すると発熱、破裂、発火またはバッテリーの漏液の原因となります。</li> <li>電源プラグをコンセントから抜く。</li> <li>ロジャー ペン iN の電源を切る。</li> </ul>
--	-----------	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>航空機内など電子機器の使用を禁止された区域ではロジャー ペン iN の電源を切ってください。</li> <li>電子機器や医療用電気機器に影響を与える場合があります。病院など電波を発する機器の使用に制限がある場所では各機関の指示に従ってください。</li> <li>ペースメーカーなど医療機器の装着者がロジャー ペン iN を使用する際は医療機器製造会社や医師の指示に従ってください。</li> </ul>
--

	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC アダプターをコンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。</li> <li>AC アダプターのコードの上に重いものを載せないでください。感電、火災の原因となります。</li> </ul>
---	-----------	---

### 2. AC アダプターの取り扱いについて

	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属の AC アダプターを使用してください。</li> <li>濡れた手で AC アダプターのコードやコンセントに触れないでください。感電の原因となります。</li> <li>濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。</li> <li>使用場所や取り扱いに注意してください。風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。感電の原因となります。</li> <li>長時間使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。</li> <li>コンセントにつなかれた状態で、充電用端子に手や指など体の一部に触れさせないでください。感電、傷害、故障の原因となります。</li> <li>AC アダプターをコンセントに差し込むときは金属類に触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。誤った場合、感電、ショート、火災の原因となります。</li> <li>指定の電源、電圧で使用してください。誤った場合、火災、故障の原因となります。</li> <li>電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災の原因となります。</li> <li>雷が鳴り出したら、ロジャー ペン iN、AC アダプターには触れないでください。落雷、感電の原因となります。</li> <li>充電中は AC アダプターを安定した場所に置いてください。また AC アダプターを布などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障の原因となります。</li> </ul>
---	-----------	--

	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC アダプターをコンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。</li> <li>AC アダプターのコードの上に重いものを載せないでください。感電、火災の原因となります。</li> </ul>
---	-----------	---

#### ■ 安全上の注意点

- 3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。取扱説明書に記された以外の方法（例：首の周りに USB ケーブルを掛けるなど）で本製品を使用しないでください。
- 落下や過度の振動、衝撃を与えないでください。
- 乾燥させる目的で電子レンジやその他加熱を行う装置は使用しないでください。
- お手入れの際、家庭用洗剤（洗濯粉・石鹼など）やアルコールは絶対に使用しないでください。
- 長さが 3m を超える USB またはオーディオケーブルを接続しないでください。
- 使用しない時は、電源をオフにし安全な場所に保管してください。

- X線照射、CT または MRI スキャンは、機器を破壊、または悪影響を与える可能性があります。
- 各プラグや開口部に汚れや異物が入らないよう注意してください。

#### ■ その他の注意事項

- 高出力の電気製品が近くにある場合や金属で囲まれた部屋などで使用する場合、本製品の使用可能距離が短くなる場合があります。
- お手入れの際は水や洗剤を使用しないでください。
- 本製品の修理はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジャパンの指定するサービスセンターでのみ可能です。
- お客様によるロジャー ペン iN のバッテリー交換はできません。バッテリーを取り外さないでください。
- 充電池は消耗品です。放充電を繰り返すごとに使用可能時間は徐々に短くなります。充電を行っても使用可能時間が短く感じられる場合はバッテリー交換が必要です。
- バッテリー交換は保証期間にかかわらず有償です。

### 3. 保証期間とアフターサービス

- 本製品（ロジャー ペン iN 本体、充電スタンド、AC アダプター）の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- 不具合がある場合は修理します。
- 無償保証期間が過ぎて不具合がある場合、有償修理となります。
- 保証期間内であっても、お客様による誤った使用、過失、改造による故障の場合、有償修理となる場合があります。
- 製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」などが記載されていることを確認し、大切に保管してください。
- 修理を依頼する際、お求めの販売店までご連絡ください。修理の際には保証書が必要です。
- 本製品のバッテリー交換は有償となります。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 保証について

##### 日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。無償修理の際、保証書が必要になりますが、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

##### 日本国外における保証期間（国際保証）

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。保証対象はアクセサリパーツを除く機器本体となります。保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。当規定は上記の修理保証規定により交換・修理をお約束するものであり、法律上のお客様の権益を制限するものではありません。

#### 保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用・過失・改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、フォナックが指定するサービスセンターでのみ行ってください。また、専門家による調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。ロジャー ペン iN のバッテリー交換は有償となります。バッテリー交換希望の際は販売店までお問い合わせください。

#### Compliance information

##### Japanese Radio Law Compliance

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law（電波法）. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid). Certified Number（認証番号）：202-LSD001

#### Local Warranty

Please ask the hearing care professional, where you purchased your hearing aid, about the terms of the local warranty.





#### International Warranty

Phonak offers you a one year limited international warranty valid starting from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material defects in the hearing aid itself, but not accessories such as batteries, tubes, ear modules, external receivers. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown. The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national and legislation governing sale of consumer goods.





#### Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress. Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

### 4. シンボルマークの説明

	CE 記号は、この機器が欧州無線機器指令 2014/53/EU の基本規定条項に適合していることを示しています。
	この記号は、補聴器を使われる人が取扱説明書に書いてある内容を読み理解してもらうことが大事であることを示しています。
	この記号は、製造工場が医療機器指示 93/42/EEC の基準を満たしていることを示しています。
	この記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。処分される際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。

#### 使用/輸送/保管時の環境条件(温度/湿度/気圧)

	製品の輸送・保管時の周囲温度は-20℃から 60℃の間、使用時の周囲温度は 0℃から 40℃の間でなければなりません。
	この記号は、製品の輸送、保管時の水漏れ厳禁であることを示しています。
	製品の輸送・保管時の環境は湿度 90%以下、使用時の周囲温度は 90%以下（いずれも結露しないこと）でなければなりません。
	製品の輸送・保管・使用時の気圧は 200 から 1500hPA の間でなければなりません。

販売店名
------

#### 製造販売業

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川 2-5-8

天王洲パークサイドビル

TEL0120-06-4079（お客様相談窓口）

FAX0120-23-4080

www.phonak.com/jp/ja

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on