


まずアナログ音声用ケーブルと音響機器を接続し、次にロジャーペンのマイクロ USB 端子にケーブルを接続します。いずれの方法でも、外部入力の音声が入っている間は、ロジャーペンのマイクロホンは無効になります。

10. Bluetooth を使用する

ロジャー ペンを使用して、Bluetooth 対応の電話機でハンズフリー通話が可能です。

ペアリング方法

ロジャー ペンの電源が入っている状態で受話ボタン  を 7 秒間長押しします。インジケータが青色の素早い点滅に変わり、ペアリングモードになります。ペアリングモードは 2 分間継続しますので、その間に Bluetooth 機器側をペアリングモードに切り替えてください。点滅が終了すれば、ペアリング完了です。

- ペアリングコード (PIN) を要求された場合は、"0000" (ゼロを 4 回) を入力してください。



マルチポイントペアリング

ロジャー ペンは Bluetooth 携帯電話を 2 台接続し、同時待受が可能です。ただし、同時に使用できるのはそのうち 1 台のみです。2 台の携帯電話を接続し、同時待ち受け可能にするための手順は以下のとおりです。

- 1 台目の携帯電話とロジャー ペンをペアリングします。
- 2 台目の携帯電話とロジャー ペンをペアリングし、接続します。
- 1 台目の携帯電話の操作メニューから Bluetooth の項目を開き、登録した Bluetooth 機器一覧からロジャー ペンを選択し、接続し直します。

使用方法

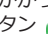

ハンズフリー通話時は、ネックストラップを使用するか、口元に向けてまっすぐに持って使用してください。



口元に向けずに使用したり、マイクロホンを指で塞いで使用したりしないでください。



電話を受ける・終了する

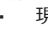

かかって来た電話を受けるには、呼び出し音が聞こえてから受話ボタン  を押ししてください。通話が確立したら、(電話機ではなく) ロジャー ペンに向かってお話しください。電話機と接続されていれば、ロジャー ペンの電源が入ってなくても、自動的に電源が入ります。電話を終えるには終話ボタン  を押すか、電話機側で操作してください。

発信する

電話機からダイヤルしてください。

- 電話機によっては、発信のたびに受話器切り替えを必要とするものがあります。詳しくは電話機の取扱説明書をご覧ください。

割込電話がかかって来た場合の操作

- 現在の通話を保留し、割込電話に出る場合は受話ボタン  を押ししてください。
- 割込電話を拒否して現在の通話を継続する場合、終話ボタン  を押ししてください。

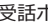
着信を拒否する

呼び出し音が聞こえてから終話ボタン  を押ししてください。

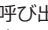
リダイヤル

受話ボタン  を 2 回短押ししてください。


音声ダイヤルを使用する

受話ボタン  を短押ししてください。

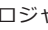
かかって来た電話を転送する

呼び出し音が鳴っている間に受話ボタン  を長押ししてください。


受話器を切り替える


ロジャー ペンでのハンズフリー通話を電話機での通話に切り替えたい場合は、通話中に受話ボタン  を長押ししてください。電話機での通話をロジャー ペンに戻したい場合も同様です。

Bluetooth をオフにする

ロジャー ペンの電源が入っている状態で終話ボタン  を 2 秒間長押ししてください。インジケータが青く一回点灯 (●) します。電池の消耗を抑えるためにも、使用しない時は Bluetooth をオフにしてください。

Bluetooth を再度オンにする

ロジャー ペンの電源が入っている状態で受話ボタン  を長押ししてください。インジケータが青く一回点灯 (●) します。ペアリング済みの電話機は自動的に接続されます。

- 子機の Bluetooth がオンになっています。終話ボタン  を 2 秒間長押しして Bluetooth をオフにしてから再度行ってください。

ロジャー ペンが作動しない

- リセットしてください。

Bluetooth 電話機で通話ができない/通話が途切れる

- ロジャー ペンと Bluetooth 電話機の距離を近づけてください。また、身体が障害物にならないよう前方に Bluetooth 機器が来るようにしてください。

ペアリング済みの Bluetooth 電話機からロジャー ペンが認識されなくなった

- ロジャー ペンの電源を入れなおしてください。
- ロジャー ペンと Bluetooth 電話機の距離を近づけてください。
- Bluetooth 機器をペアリングしなおしてください。(コムパイロットは、最大 8 台の Bluetooth 機器とペアリングできますが、それ以降は古いペアリング情報が新しいペアリング情報に上書きされます。)

ロジャー ペンで電話を受けることが出来ない

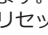
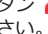

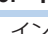
- 電話機の Bluetooth 機能がオンになっているか確認してください。
- ロジャー ペンの Bluetooth がオンになっているか確認してください。
- 電話機側で、ロジャー ペンが接続されているか確認してください。

Bluetooth 接続されているにも関わらず着信音が聞こえない

- 電話機がマナーモード/サイレントモードになっていないか確認してください。
- 補聴器および人工内耳を、ロジャー受信機が使用できるプログラムに切り替えてください。



12. ロジャー ペンのリセット

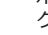
ロジャー ペンが何らかの原因で反応しなくなったり、動作が不安定になったりした場合、リセットを行うことで回復することができます。リセットは、電源ボタン  ・マイクモード変更ボタン  ・終話ボタン  および受話ボタン  の 4 つを同時に押ししてください。

13. インジケータの表示

インジケータ表示	内容
	電源オン
	動作中表示
	電源オフ
	電源オフ (Bluetooth 待ち受け中)
	外部入力
	ミュート
	充電中
	充電完了
	要充電

Bluetooth 通話中

MTN 親機が見つかりません。


- 親機が使用可能な範囲内にあることを確認してください。
- 現在のネットワークを破棄して、新しいネットワークを開始したい場合は、インジケータがオレンジ色に変わるまで、追加ボタン  を 7 秒間押ししてください。新しいネットワークで使用する際には、もう一度ネットワーク追加処理を行ってください。

14. トラブルシューティング


電源が入らない

- 充電してください。

使用していないにもかかわらず電池残量が減る

- Bluetooth がオンになっています。終話ボタン  を 2 秒間長押しして Bluetooth をオフにしてください。

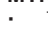
電源がオンになっているのに音声聞こえない


- マイクロホンがミュートになっている場合解除してください。
- 受信機が補聴器および人工内耳にしっかりと接続されていることを確認してください。
- 補聴器および人工内耳を、Roger が使えるプログラム (Roger/FM+M など) に切り替えてください。
- 受信機をロジャー ペンの 10cm 以内に近づけ、追加ボタン  を押ししてください。
- MTN を使用している場合、親機の電源がオンになっていることを確認してください。

音声がか途切れる

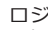
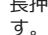

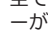
- ロジャー ペンと受信機の距離を近づけてください。
- ロジャー ペンと受信機の間障害物がなく、見通せる範囲で使用してください。

MTN が組めない

- すでに他のネットワークで子機に登録されています。ロジャー ペンの追加ボタン  を 7 秒以上押しして新しいネットワークを作成してください。

- Bluetooth の状態を確認するには、ロジャー ペンの電源が入っている状態で、受話ボタン  を押しします。Bluetooth オンの場合、インジケータが 2 秒間青く点灯 (●) します。

ペアリング情報を削除する

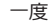

ロジャー ペンの電源が入っている状態で受話ボタン  を長押ししてください。インジケータが青く一回点灯 (●) します。続けて、受話ボタン  と終話ボタン 、追加ボタン  の 3 つを同時に 7 秒間長押ししてください。全ての Bluetooth ペアリングが解除され、オレンジのインジケータが一回点灯 (●) します。

Bluetooth 使用時の注意点

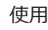
- Bluetooth 機器は、ロジャー ペンから 3m 以内の範囲でご使用ください。
- Bluetooth 通話は外部入力より優先されます。
- 使用できるデバイスは、ヘッドセット (HSP) またはハンズフリー (HFP) プロファイルを持つものに限られます。オーディオ (A2DP) プロファイルには対応しておりませんので、音楽プレーヤー等の再生は外部入力端子をご使用ください。

11. 便利な機能

ミュート

ロジャー ペンを使用中、聞き手に音声を聞かせたくない時に一時的にミュート (マイクロホン無効) にすることができます。電源ボタン  を短押しするとミュートになり、解除するにはもう一度電源ボタン  を短押しします。


マイクロホンモードの変更

使用中、マイクモード変更ボタン  を短押しすることでマイクロホンモードを手動で変更できます。変更のたび、インジケータでマイクロホンモードを表示します。MTN を使用中は、親機のみ変更可能です。子機は首掛けスタイルのマイクロホンモードのみになります。

電話の相手に雑音が届く/自分の声ははっきり聞こえないと言われる

- マイクロホンが衣擦れ音を拾わないよう、装着方法を確認してください。
- マイクロホンが衣服や手で覆われないようにしてください。

電話の相手の声が聞こえない (自分の声は送られている)

- 受話ボタン  を長押しして、受話器をロジャー ペンに切り替えてください。

15. 保証期間とアフターサービス

保証期間とアフターサービスについては、「安全上のご注意」をご覧ください。

販売店名
製造販売業 ソノヴァ・ジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル 8F TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口) FAX0120-23-4080 www.phonak.jp

