

アイキューブ II

iCube II

安全上のご注意



はじめに

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損傷を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損傷の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「損傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 本体およびACアダプターは絶対に分解、改造をしないでください。また、本製品の内蔵充電電池はお客様自身で交換できません。分解やバッテリーの取り外しは火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- 小児・知的障害者やペットの手の届くところに置かないでください。
- 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いに注意してください。
- 火気の発生する場所、直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所に放置をしないでください。

- 安全のため、ペースメーカーや除細動器といった、植込み型医療機器を使用している方は本製品の使用をお控えください。
- USBポートを記載の目的以外に使用しないでください。
- ACアダプターのプラグだけをコンセントに差し込まないでください。感電、ショート、火災の原因となります。



- ACアダプターのケーブルを無理に曲げたり、上に重いものをのせたりしないでください。ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。ケーブルに傷がついた場合は使用しないでください。

- フォナック指定以外のACアダプターは使用しないでください。発熱、発火するなどして、火災や事故の原因となります。
- 湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 落としたりしないでください。
- 通信中にネックループを抜かないでください。
- ACアダプターや接続ケーブルをコンセントやコネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。
- 次のような場合はただちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - 異常な状態から回復できないとき
 - 異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき
 - 本体の内部や隙間に金属片や水などの異物が入ったとき
 このような状態のまま使用すると、事故や火災の原因となります。
- 本製品で用いるデジタルワイヤレス通信技術は、信頼性が高く他の機器からの干渉を受けないよう設計されています。しかしながら、これは、コンピュータ機器や、あるいは強力な磁場を発生する電子機

器のそばで安定して動作するためには、それらの機器から少なくとも60cm以上離してご使用ください。

- 磁石または磁石を使用した機器は、本製品から10cm以上離してください。
- 長さが3mを超えるUSBケーブルを接続しないでください。
- 使用しない時は、ネックループをつないで電源をオフにし、安全な場所に保管してください。
- 機械操作中に使用する場合など、本体が機械に巻き込まれないよう確実に固定してください。
- 本製品はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジャパンが指定するサービスセンターによってのみ修理可能です。
- 付属品はフォナック指定のものを使用してください。

その他の注意点

- 同じ空間で複数のアイキューブ II を使用する場合は、お互いの磁場が干渉しないよう2m以上離してご使用ください。
- 高出力の電子機器や機械装置、また金属製の構造物によってワイヤレス通信の範囲が狭められたり、使用できなくなる恐れがあります。
- 電磁波の干渉など、何らかの原因で補聴器との通信が不安定になった場合は、影響を受けない場所まで移動してください。

保証期間とアフターサービス

- アイキューブ II の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。製品に同梱している保証書に「販売店名」「お買い上げ年月日」などが記載されていることを確認の上、大切に保管してください。
- お客様、または第三者による誤った使用、過失、故意または改造による故障の場合は有償修理となりますのでご了承ください。
- 保証期間内の修理の際には、保証書が必要となります。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンボルマークの説明



CE 記号は、この機器が欧州連合の指令1999/5/ECの基本規定条項に適合していることを示しています。



この記号は、製造工場が医療機器指示93/42/EECの基準を満たしていることを示しています。



この記号は、取扱説明書に載っている製品説明がEN60601-1のタイプBに則していることを表します。



この記号は、使用者が取扱説明書に書いてある内容を読み理解してもらうことが大事であることを示しています。



この記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。処分される際はお客様の自治体が定める方法に従ってください。



Bluetooth® およびそのロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有し、フォナックはライセンスに基づいてこれらの商標を使用しています。その他の商標および商標名は、各所有者に帰属します。



技適マークは、この製品が電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを表します。

使用/輸送/保管時の環境条件(温度/湿度)



製品の輸送・保管時の周囲温度は-20℃から60℃の間、使用時の周囲温度は0℃から40℃の間でなければなりません。



この記号は、製品の輸送、保管時に水濡れ厳禁であることを示しています。




製品の輸送・保管時の環境は湿度90%以下、使用時の周囲温度は95%以下(いずれも結露しないこと)でなければなりません。



製品の輸送・保管・使用時の気圧は200から1500hPAの間でなければなりません。

電波法認証

アイキューブ II

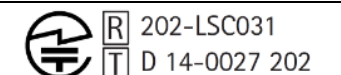

USB アダプター



製造販売業
ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川 2-5-8
天王洲パークサイドビル
TEL0120-04-4079
(お客様相談窓口)

FAX0120-23-4080

www.phonak.com/jp/ja

PHONAK
life is on