

Phonak

Fast Facts

タップコントロール

タップコントロールとは

補聴器の多機能ボタンやリモコンを使用する代わりにダブルタップして補聴器を操作できるようにする機能です。

1. さまざまな Bluetooth 機器からのストリーミングの一時停止／再生



2. 電話の受話／終話



3. ボイスアシスタント (Siri、Google など) の開始／停止



使用方法

聴覚専門家

- オーデオ P-R (90 および 70 クラス) では初期設定でオンになっています。
- Phonak Target > 機器オプション > 多機能ボタンでカスタマイズ。
- 機能を無効にしたり、好きな方の耳に割り当てたりできます。
- 装用者が日常生活で自信をもってこの機能を利用できるよう、Phonak Target に接続した状態で多機能ボタンの「ダブルタップ トレーニング」オプションが利用できます。

装用者

- 耳介の上部裏側またはメガネの上でダブルタップして、作動させます。
- 装用者は、マイフォナック アプリ 4.0 で設定変更が可能です。

使用のメリット

タップコントロールにより装用者は複雑な多機能ボタンの操作が不要となり、より便利で簡単にストリーミング接続ができるようになります。2倍以上の装用者が、従来の方法よりタップコントロールを好むという結果が出ています¹。

1. Adler, M., & Woodward, J. (2020). New Tap Control: providing a preferred and reliable alternative to access direct streaming functions. Phonak Field Study News. www.phonakpro.com/evidence