
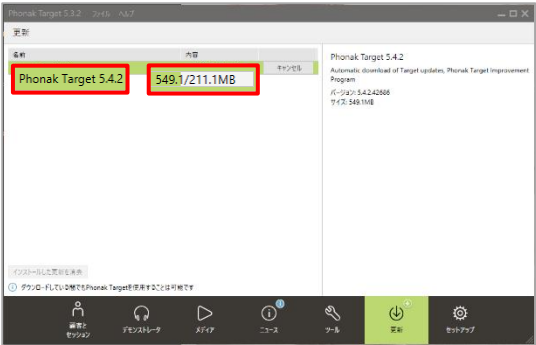
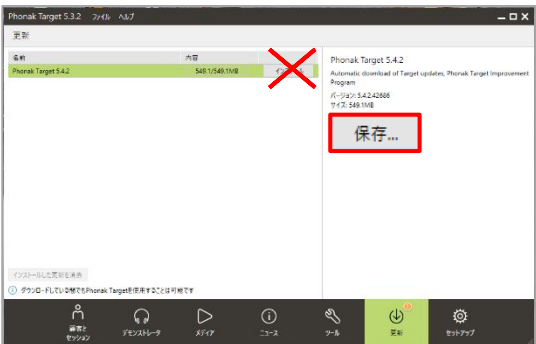


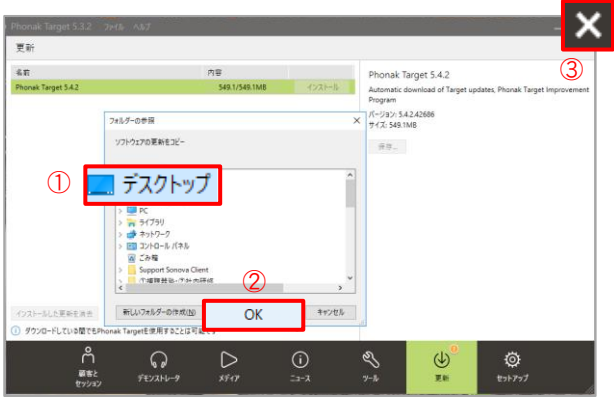
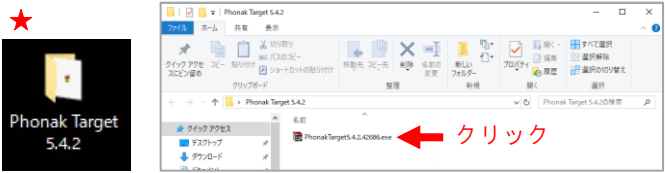
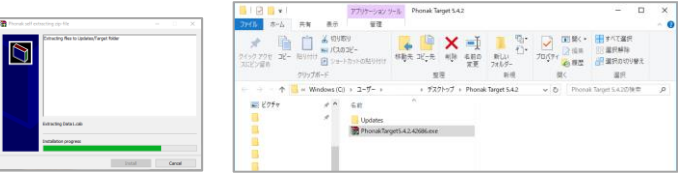
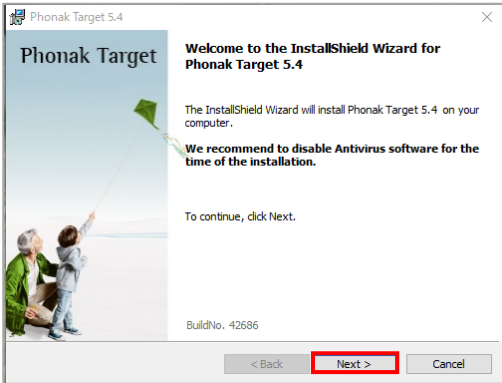
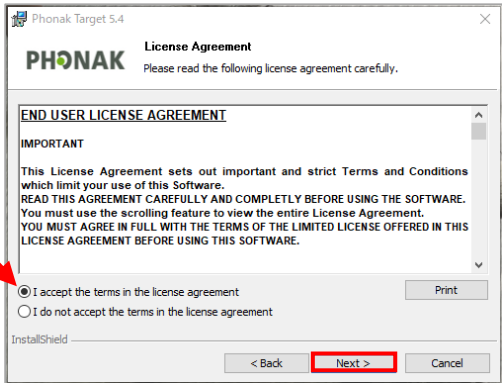
Phonak Target をオンラインで更新する方法

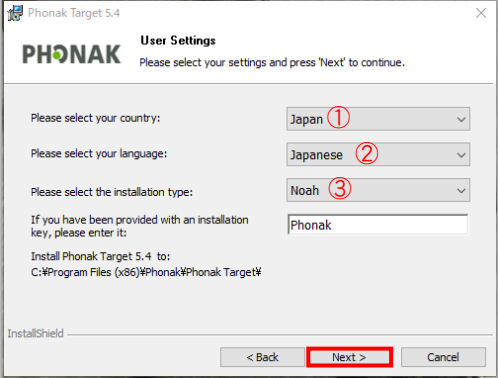
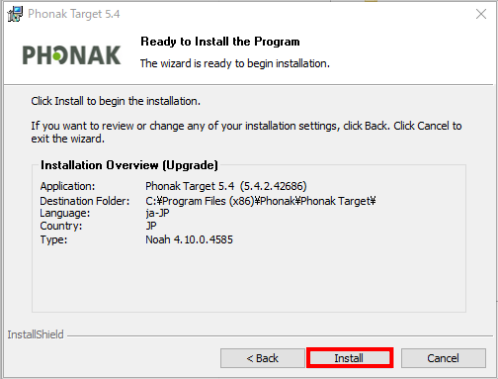
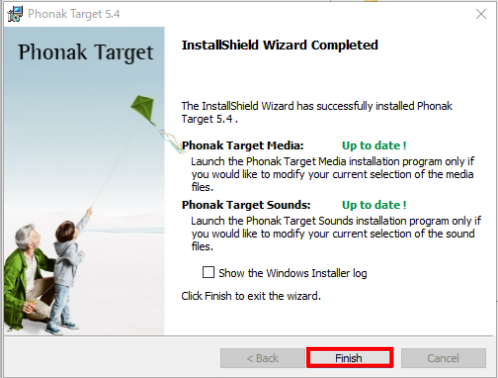
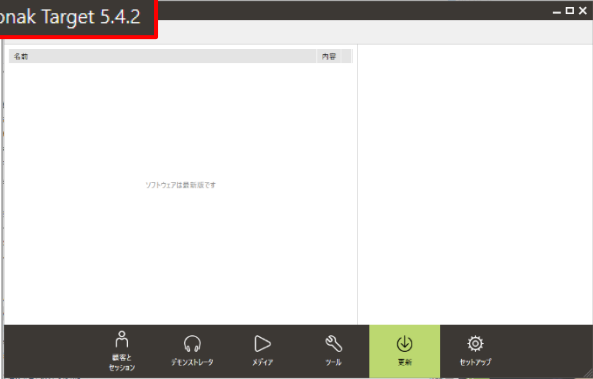
Ver. 1

本紙面では、Phonak Target をオンラインにて更新（アップデート）する手順をご紹介します。

更新作業を行う前に、予めインターネットが使用可能状態であるかご確認ください。

Phonak Target 更新方法	
1	 <p>インストールされている Phonak Target（以下、Target）を起動します。</p> <p>下段から①【更新】をクリックして開きます。 その後、②【ダウンロード】をクリックします。</p>
2	 <p>ダウンロード中です・・・。</p> <p>※ ダウンロードが完了するまで、数分かかることがあります。</p>
3	 <p>ダウンロードが完了すると、【ダウンロード】ボタンが【インストール】ボタンに変わります。</p> <p>【インストール】ではなく、【保存】をクリックします。</p>

4		<p>保存したい場所を選択するための【フォルダーの参照】が表示されます。</p> <p>【デスクトップ】を選択し、【OK】をクリックします (①・②)。</p> <p>保存終了後、画面右上の X をクリックして Phonak Target を閉じます (③)。</p>
5		<p>デスクトップに Phonak Target 5.4.2 フォルダが作成されます (★)。</p> <p>フォルダ内の【Phonak Target 5.4.2.42686.exe】をクリックします。</p>
6		<p>フォルダの解凍が始まります。</p> <p>フォルダが解凍されると、【update】フォルダが作成されます。</p>
7		<p>フォルダが解凍されると同時に、Phonak Target の InstallShield Wizard 画面が自動的に立ち上がります。</p> <p>【Next】をクリックして次へ進みます。</p>
8		<p>【I accept the terms in the license agreement】を選択し、【Next】をクリックして次へ進みます。</p>

9		<p>Phonak Target が既にインストールされているので、①～③は自動的に設定されます。 (念のため、設定内容をご確認ください)</p> <p>【Next】 をクリックして次へ進みます。</p>
10		<p>【Install】 をクリックすると、インストールが始まります。</p> <p>※ インストールが完了するまで、数分かかることがあります。</p>
11		<p>Phonak Target のインストールが完了しました。</p> <p>【Finish】 をクリックして InstallShield Wizard の画面を閉じます。</p> <p>※ Phonak Target 以外のソフトウェアのインストール状態が表示されませんが、Phonak Target で調整するのに直接は関係しません。</p>
12		<p>Phonak Target を起動し、画面左上のファームウェア (Phonak Target 5.4.2) が変わったことを確認します。</p> <p>正しく変わっていれば、これで更新は完了です。</p>