

# フィッティング用 インターフェース

プロパティーズ

## NOAHlink Properties、

## NOAHlink カーネルの更新方法




※ NOAHlink が繋がらない時の確認事項です

### ① NOAHlink Properties が最新のファームウェアのバージョンになっているか確認

⇒最新でない場合、最新のファームウェアのバージョンに更新する



### <更新方法>

- 1) Phonak Target DVD1 を入れる
- 2) コンピュータ (C:) 内に表示される Phonak Target を右クリックし、「開く」を選択する
- 3) Phonak Target > Support > HIMSA > NOAHlink > NOAHlink Properties... > Installation > Setup.exe を実行する

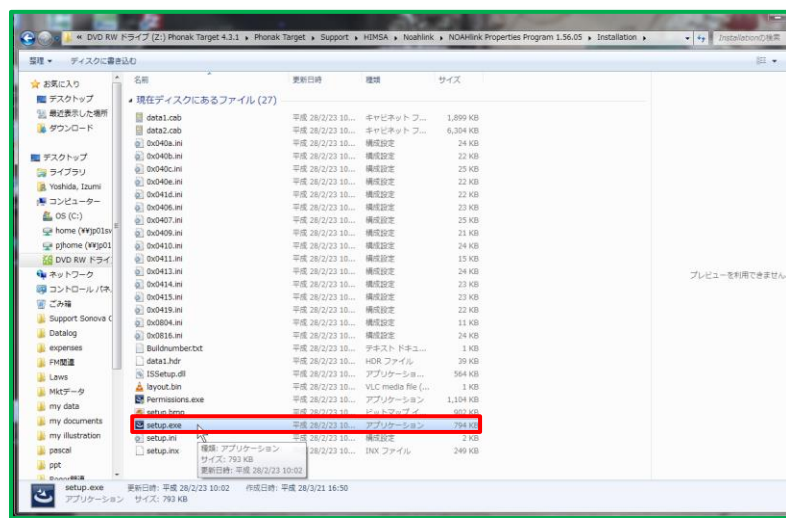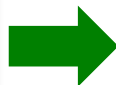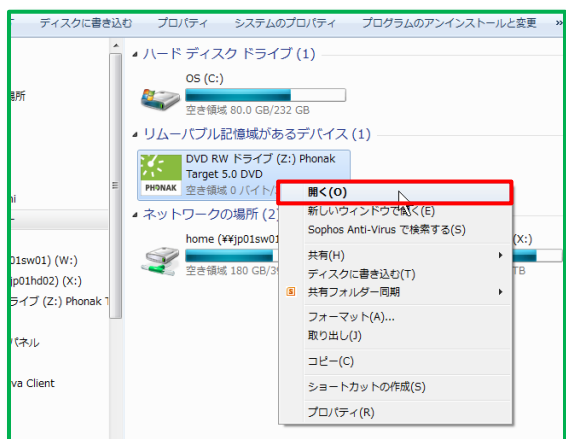


### NOAHlink Properties へのアクセス方法

- スタートアップから (PC 内) :  
PC 内でのアクセス方法は OS で異なる  
(検索から “NOAHlink” と打ち込むと早い)
- Phonak Target から :
  - ① セットアップ
  - ② フィッティング機器
  - ③ NOAHlink
  - ④ プロパティ...

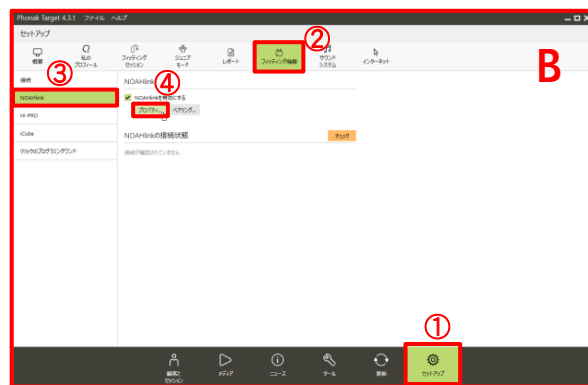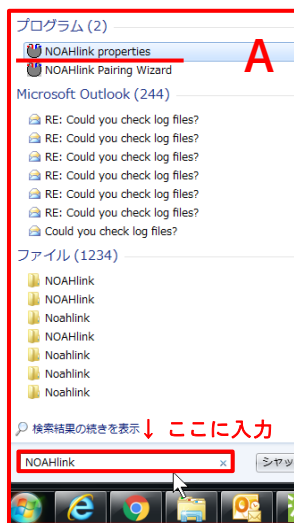

## ② 次に NOAHlink 本体（カーネル）のファームウェアが最新になっているか確認

⇒最新でない場合、NOAHlink Properties から最新のファームウェアにアップグレードする

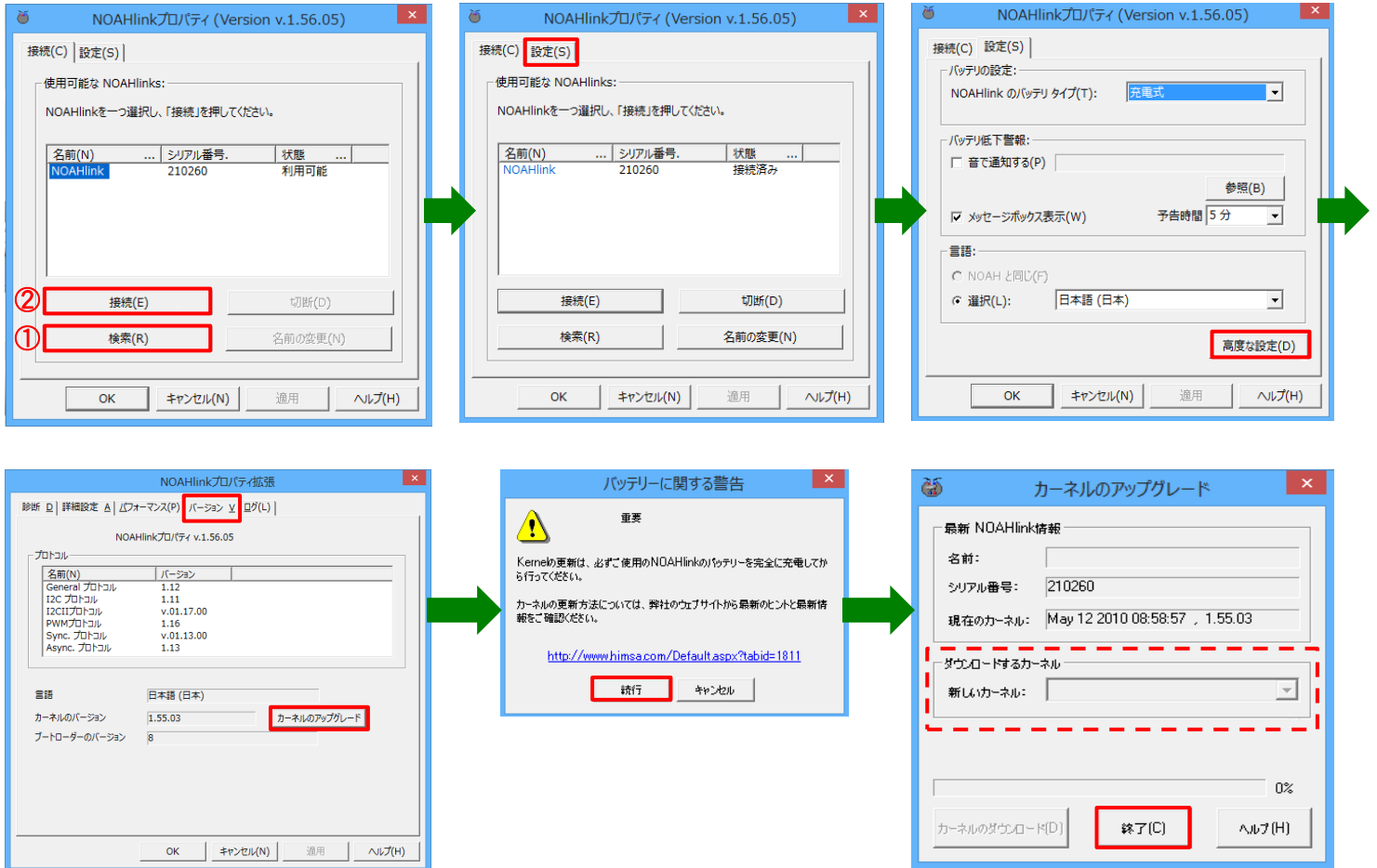

### <アップグレード方法>

- 1) インストールした NOAHlink Properties を開く（アクセス方法は 1 ページ目）
- 2) 最新のファームウェアのバージョンであるか確認
- 3) ①「検索」をクリックし、既に登録している NOAHlink を検出する。正しく検出されると NOAHlink が表示され、状態が利用可能と表示されるので、その該当する NOAHlink を選択し、②「接続」をクリックする
- 4) 表示された NOAHlink の状態が接続済みになったら「設定」のタブを選択する
- 5) 「高度な設定」をクリックする
- 6) 「バージョン」のタブを選択し、「カーネルのアップグレード」をクリックする（カーネルのバージョンが既に最新であればアップグレードする必要なし）
- 7) バッテリーに関する警告メッセージが表示されるので「続行」を選択する
- 8) ダウンロードするカーネル内のプルダウン▼から最新のファームウェアを選択する（グレーアウトしてクリックできない場合、既に最新なのでアップグレードする必要がないことを意味する）
- 9) アップグレードが終了するのを待ち、終わったら「終了」を押して閉じる
- 10) アップグレード後、Phonak Target から NOAHlink の接続状態を確認する（別資料）