

# フォナック補聴器 プログラミングケーブルの接続過程

- ❖ 耳かけ型補聴器
- ❖ 耳あな型補聴器



Vol. 1

## プログラミングケーブルを接続する基本的な流れ


- 耳かけ型補聴器・・・ケーブルの先端ソケット（赤印・）を補聴器の差込プラグ（4ピン穴）に差し込みます。



- ① 耳あな型補聴器・・・電池ホルダー（+側）にアストロの切り口を挟み込み、閉めるように電池ホルダーを外します。



- ② 耳あな型補聴器・・・電池ホルダーを45度を開き、その角度に対して水平に引き抜きます。

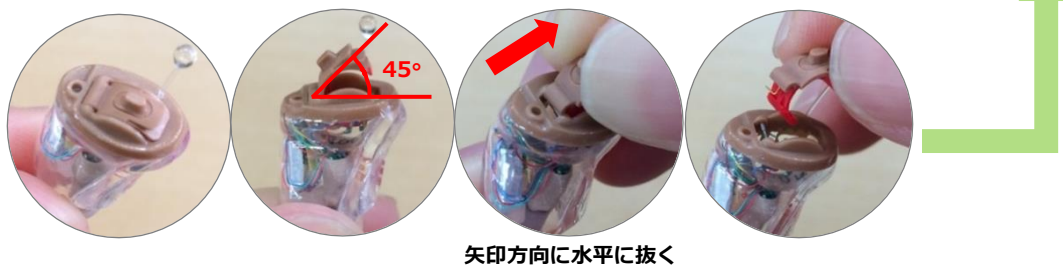

- ❖ 取り付け方・・・バッテリーホルダーの金属バーが補聴器の取り付け口のピンの内側に来るように取り付けます。この時に間違っても金属バーをピンの外側にはめ込んで曲げてしまわないように注意してください。（×マーク参照）

