

ノalink ワイヤレス

～設定方法～

Vol. 2

ノalink ワイヤレスは、フォナック オーデオ M(以下、オーディオ M)およびフォナック オーデオ B-ダイレクト(以下、ダイレクト)を調整するために必要なインターフェース(中継器)です。フィッティングを行う前にお使いのパソコンにノalink ワイヤレスを設定しておく必要があります。

この紙面では、ノalink ワイヤレスの設定方法およびアップデート方法について述べています。

※ AirLink 2 のアップグレード方法は掲載しておりません

❖ ノalink ワイヤレス 同梱物

表



裏



ノalinkワイヤレス本体




接続ケーブルと固定ホルダー



ノalinkワイヤレス 全体梱包図

❖ ノアリンク ワイヤレス ドライバーを設定する方法

ノアリンク ワイヤレスのドライバーをインストールする方法は以下のとおりです。
 ドライバーをインストールする前に、Phonak Target 6.0.2 を予めインストールしておいてください。

インターネットを利用している場合	
1	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。 ▪ 逆側を PC の USB ポートに差します。 <p>PC の USB ポートに差すと、ノアリンク ワイヤレスのインジケータランプが瞬間的に緑に点滅します</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ドライバーが自動的に PC にインストールされます。 (インストールが完了してもメッセージは表示されません)

インターネットを利用していない場合										
1	 <p style="color: red;">左側 : Disc 1</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Target 6.0.2 > Phonak Target > Support > HIMSA > NoalinkWireless</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">名前</th> <th style="width: 20%;">更新日時</th> <th style="width: 20%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Driver_NLW_V.1.1.0.0.exe</td> <td>2019/02/07 1:24</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>NLWUpgrader.exe</td> <td>2019/02/07 1:24</td> <td>アプリケーション</td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phonak Target 6.0.2 の DVD(左図)に格納されている NoalinkWireless ドライバーをインストールします： <p>【保存場所】 Phonak Target > Support > HIMSA > NoalinkWireless > 【Driver_NLW_V.1.1.0.0.exe】をクリック</p>	名前	更新日時	種類	Driver_NLW_V.1.1.0.0.exe	2019/02/07 1:24	アプリケーション	NLWUpgrader.exe	2019/02/07 1:24	アプリケーション
名前	更新日時	種類								
Driver_NLW_V.1.1.0.0.exe	2019/02/07 1:24	アプリケーション								
NLWUpgrader.exe	2019/02/07 1:24	アプリケーション								
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ インストール完了後、PC を再起動します。 (インストールが完了してもメッセージは表示されません) 									
3	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。 ▪ 逆側を PC の USB ポートに差します。 ▪ PC の USB ポートに差すと、ノアリンク ワイヤレスのインジケータランプが瞬間的に緑に点滅します 									
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC がノアリンク ワイヤレスを認識し、ドライバーがインストールされます。 (インストールが完了してもメッセージは表示されません) 									

❖ ノアリンクワイヤレスの接続状態を確認する方法

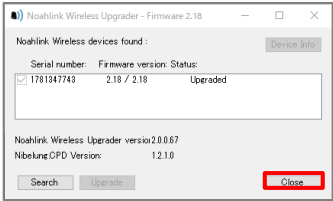
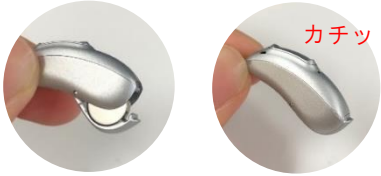

ノアリンクワイヤレスのドライバーがインストールされた後、Phonak Target 6.0.2 で正しくデバイスが認識されるか確認します。

ノアリンクワイヤレスの接続状況を確認する		
1		<ul style="list-style-type: none"> ノアリンクワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差しします。 逆側を PC の USB ポートに差しします。 予めインストールした Target 6.0.2 を起動します。 (NOAH System を経由している場合は、Target のモジュールから開きます)。
2		<ul style="list-style-type: none"> ① セットアップ > ② フィッティング機器 > ③ Noahlink Wireless 画面を開き、④ オレンジ色の チェック をクリックします。
3		<ul style="list-style-type: none"> 正しく認識されると、ノアリンクワイヤレスのシリアル番号とファームウェアバージョンが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 最新バージョンは 2.18 です(2019年5月現在) 同時に チェック がグレー色に変わります。 ※ ファームウェアのバージョンが 2.17 以前である場合、ファームウェアのアップデートを行ってください。 ※ Target 6.0.2 で正しく認識されていない場合、シリアル番号などの情報が表示されません。
4	<p>※ 写真はマーベル補聴器です</p> <p><u>空気電池を使用するタイプ</u></p>  <p><u>充電電池を使用するタイプ</u></p>  <p>オン：3秒長押し</p> <p>オフ：3秒長押し</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【顧客とセッション】画面に戻り、実際にセッションを開いてオーディオ M またはダイレクトを接続します。 <ul style="list-style-type: none"> 空気電池タイプをご使用の場合 電池ホルダーを開閉し、ペアリングモードにしてからフィッティングソフトの 接続 をクリックしてください。 充電電池タイプをご使用の場合 ※ 注意：補聴器を充電してから接続を行ってください。 多機能ボタンの下部を 3 秒長押しして、電源オンにします(オン：緑色に点滅/オフ：赤色に点滅) 電源をオンにし、補聴器をペアリングモードにしてからセッション内の 接続 をクリックしてください。 2 回目以降、ペアリングモードにする作業は不要です。(そのまま 接続 をクリックすれば接続されます)

❖ ノアリンク ワイヤレス ファームウェアをアップデートする方法

お使いのノアリンク ワイヤレスのファームウェアが 2.17 以前である場合、次の方法でファームウェアをアップデートします。

弊社から出荷しているノアリンク ワイヤレスは 2.18 です(2019 年 5 月現在)。

		<ul style="list-style-type: none"> ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。 逆側を PC の USB ポートに差します。 予めインストールした Target 6.0.2 を起動します。(NOAH System を経由している場合は、Target のモジュールから開きます)。
1		<ul style="list-style-type: none"> Phonak Target 6.0.2 > トライアルとツール > ファームウェアのアップデート画面にある Noahlink Wireless の【アップデート...】をクリックします。
2		<ul style="list-style-type: none"> アップデート専用のアプリケーションが表示されます。 PC の USB ポートに差したノアリンク ワイヤレスのファームウェアのバージョンが読み込まれます。(読み込まれない場合、【Search】をクリックします) 【Upgrade】を押してアップグレードを実行します。 Status 部分が【Upgrading(アップグレード中)】と表示されます(黒いバーが左から右へゆっくり進みます)。
4		<ul style="list-style-type: none"> Status 部分が【Upgraded(アップグレード済)】という表示に変われば終了です。 【Close】を押して画面を閉じます。
4	<p>※ 写真はマーベル補聴器です</p> <p><u>空気電池を使用するタイプ</u></p>  <p><u>充電電池を使用するタイプ</u></p>  <p>上部ボタン 下部ボタン</p> <p>オン： 3 秒長押し</p> <p>オフ： 3 秒長押し</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【顧客とセッション】画面に戻り、実際にセッションを開いてオーディオ M またはダイレクトを接続します。 <ul style="list-style-type: none"> 空気電池タイプをご使用の場合 電池ホルダーを開閉し、ペアリングモードにしてからフィッティングソフトの 接続 をクリックしてください。 充電電池タイプをご使用の場合 ※ 注意:補聴器を充電してから接続を行ってください。 多機能ボタンの下部を 3 秒長押しして、電源オンにします(オン: 緑色に点滅/オフ: 赤色に点滅) 電源をオンにし、補聴器をペアリングモードにしてからセッション内の 接続 をクリックしてください。 2 回目以降、ペアリングモードにする作業は不要です。(そのまま 接続 をクリックすれば接続されます)