

Roger Upgrader V1.16

Roger Upgraderとはロジャーの送信機（マイクロホン）や受信機のファームウェアをアップグレードするためのフォナックのソフトウェアです。インターネットから無料でダウンロードできて、どなたでもご使用いただけます。＊ソフトウェアのメニュー項目は英語版のみです。

●インターネット URL 先

リンク：

<https://www.phonakpro.com/com/en/support/product-support/wireless-accessories/roger-upgrader.html>

【Roger Upgrader V1.16 の機能】

Roger Upgrader V1.16 は、下記対象製品のファームウェアバージョンを最新バージョンにアップグレードできます。（下記対象製品のシリアル番号の最初の 4 桁が 1834 のものは v1.6 になります。）

ロジャー タッチスクリーン マイク

ロジャー パスアラウンド マイク

ロジャー マルチメディア ハブ

【ファームウェアバージョン v1.6 の各製品の新機能】

①ロジャー タッチスクリーン マイクは、同じロジャーネットワーク内で最大 20 台のロジャー デジマスター 7000 を接続することができます。ロジャー デジマスター 7000 の推奨室内面積は 2 台使用時で 300 m²までですが、L 字型などの変形の部屋や、部屋の裏側や壁際で騒音を発するものがある場合（換気扇、冷蔵庫、電子機器、ドアなど）、その近くに更に追加のロジャー デジマスター 7000 を配置することで、その周り聞こえをカバーすることができます。

【注意点】

- 1) ファームウェア v1.6 のロジャー タッチスクリーン マイクを親機として使用する必要があります。
- 2) 同じロジャーネットワーク上のロジャー タッチスクリーン マイクやロジャーの他のすべてのマイク/送信機（上記のリスト）はファームウェア v1.6 のものを使用してください。
- 3) ロジャー インスパイロを子機として同じロジャーネットワーク上で使用することもできますが、「ミキシングモード」は使用できません。（「優先順位あり」か「優先順位なし」を選択してください。）
- 4) 複数台接続できるのはロジャー デジマスター 7000 のみです。ロジャー デジマスター 5000 は複数台接続できません。（1 台のみ）
- 5) 4 台以上のロジャー デジマスター 7000 が同じロジャーネットワークで使用されている場合は、通信距離を延長するロジャー リピーターの使用をお勧めします。
- 6) 各ロジャー デジマスター 7000 間の距離は、少なくとも 5 メートル開けてください。
- 7) バージョンアップの操作は、まず Roger Upgrader を起動させてからデバイスを接続してください。