

アイキューブⅡの設定方法

アイキューブⅡ専用アダプターを使用したペアリング方法



Ver.1

アイキューブⅡはフィッティング時に必要となるケーブル接続が不要なワイヤレス接続機器です※。ワイヤレスだけでなく、USBケーブルによる有線での使用も可能です。

アイキューブⅡは、**ペアリングされた状態で出荷されているので、再度ペアリングする必要はありません。**

ペアリングが外れてしまったり、再度ペアリングをする必要がある場合は、次の方法でペアリングを行ってください。ペアリングの前に、あらかじめ、お使いのパソコンのUSBポートにアイキューブⅡ専用USBアダプタを差しておいてください。
(アイキューブⅡと同梱されています)




アイキューブⅡ

※ ワイヤレス通信を持つ補聴器とのみ使用が可能

1. Phonak Target を起動します。

下段メニューの【セットアップ】>【ツール】を選択し、左項目から【機器のペアリング】をクリックします。

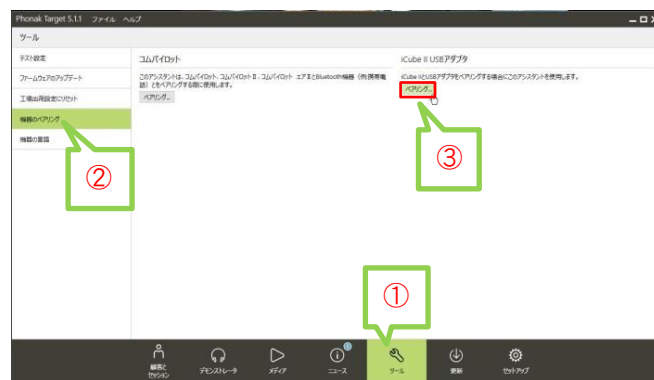


2. iCube II USB アダプターの【ペアリング…】をクリックし、ペアリングアシスタントを起動します。

USB アダプターが USB ポートに正しく挿入されているか確認し【続行】を押します。



アイキューブⅡ専用
USB アダプター

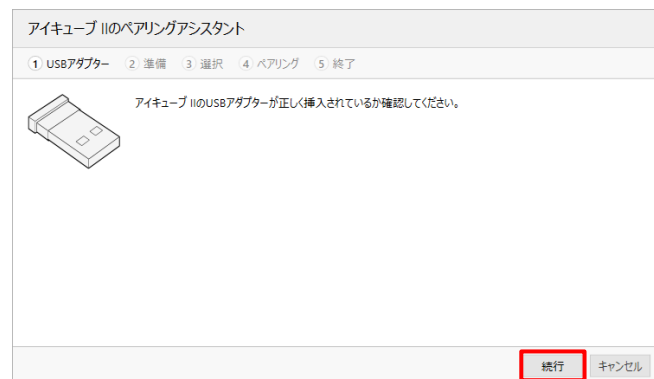


3. 3つのLEDランプが点滅するまで、アイキューブ II のペアリングボタンを長押しします（右図参照）。ペアリングモードになったら【続行】を押します。



4. アイキューブ II を検出中です。ペアリングしたいアイキューブ II をクリックして選択し【続行】を押します。ペアリングされると“接続に成功しました”と表示されます。



ペアリング作業が完了したら、アイキューブ II が正しく接続されているか確認します。下段メニューの【セットアップ】>【フィッティング機器】>【iCube】を開きます。画面中央の **チェック** をクリックします。正しくペアリングされていれば、【“アイキューブII専用の USB アダプター”を経由】にシリアル番号と  マークが表示されます。

【▶ 全ての接続】をクリックすると、アイキューブ II の接続状態が接続方法別に表示されます：

- ① USB ケーブルを経由 ② iCube II USB アダプタを経由 ③ 別の Bluetooth アダプタを経由

