

はじめにお読みください

フォナック クイックガイド 耳かけ型 ー入門編ー 通常タイプ

はじめに・・・準備をするもの

1. 補聴器



プログラムスイッチ
プログラムを切り替えます

マイクロホン音口
音の入口です

イヤフック
音の出口です

ボリュームコントロール
音量を調節します

電池ホルダー
電池を挿入します(電源の入/切)

2. 補聴器用電池



お客様の電池は

- ☐ PR-48 (13)
- ☐ PR-44 (675)
- ☐ PR-41 (312)



ステップ 1 電池を入れて、スイッチを入れてみましょう！



1

電池パックの後ろを開け、1粒電池を取り出します。



2

電池ホルダーのどっぴりに爪をかけ、手前に引きます。



3


電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違わずに電池ホルダーに入れます。



ココを見てね

電池の向きは間違っていないか？

電池は平らで + と彫ってある面が上です。

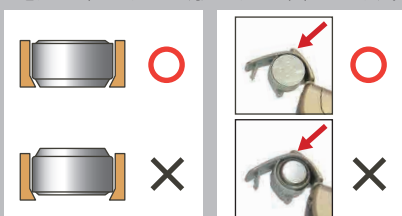

注意：電池を逆向きに入れると破損の原因になります。

電池が外れない時



電池ホルダーを開けて、先端が細くなったもの(つまようじなど)を使い押し出してください。

● <電源の入/切> 電池ホルダーの開閉にておこなってください。

ステップ 2 補聴器を耳につけてみましょう！



1

イヤモールドの付け根(エルボー)部分を摘まみます。



2

イヤモールドの先端を耳穴に差し込み、後ろに回しながら入れます。



3

補聴器本体を耳にかけます。

取り出す時



○

イヤモールドの付け根(エルボー)部分を摘まんで取り外します。



×


補聴器本体を持って外さないでください。

ステップ 3 使用(練習)してみましょう！



練習1 ひとりで
～3日間

家の静かな場所で練習してみましょう。

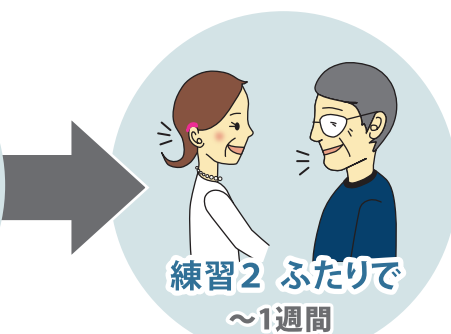

練習2 ふたりで
～1週間

1対1での会話で楽しんでもみましょう。



練習3 お部屋で
～2週間

テレビやラジオを聴いてみましょう。



練習4 外出先で
～1ヶ月間

色々な音がする外で会話を楽しくしてみましょう。