

耳かけ型 —お手入れ編—

お手入れ ① お掃除の仕方


補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからの
お手入れをおすすめします。

毎日のお掃除編



1

柔らかい素材の布で表面の
汚れをふき取ります。

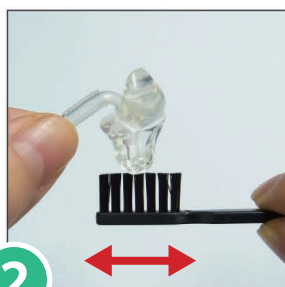

2

音の出口を下に向けブラシをかけた、
耳垢等を払い落とします。

お掃除のポイント



電池ホルダーの中は綿棒を使って掃除しまし
う。特に汗をかいた後は必ず行ってください。

別売



エアパッファー
800円(税抜)



イヤモールド
洗浄剤(20粒入)
800円(税抜)



イヤモールド
洗浄カップ
800円(税抜)

月に1〜2度編

より衛生的にお使いいただくためには、月に1〜2度はイヤモールドを洗浄しましょう!



1

イヤモールド洗浄剤を1粒、
袋から出します。



2

イヤモールド洗浄カップ
の中に洗浄剤を入れます。



3

内ケースを置いてから、
カップに150mlの水を
入れて、イヤモールドも
入れます。

この時
蓋は閉めないでください。

洗浄剤は5〜6分ほどで
水に溶けてなくなりますが、イヤモールドはその
まま15分以上浸け置き
ください。ただし、8時間
以上の浸け置きはおや
めください。



4

イヤモールドは水洗いし、水気
を拭き取ります。チューブの中
の水は、エアパッファーを使っ
て吹き飛ばしてください。

お手入れ ② 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から
補聴器を保護するためにも乾燥ケースにに入れて保管してください。



1

補聴器から電池を取り出し、
電池ホルダーを開けた状態
で乾燥ケースに入れます。




2

乾燥ケースのふたを閉めます。補
聴器から取り外した電池は、ふたの
上のマグネットに付けておきます。

シリカゲル(乾燥剤)の交換時期



シリカゲルが新しいときは
青い粒が混じっています。

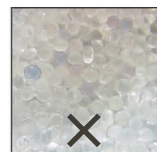

青い粒が、薄い紫色もしく
は半透明に変わったら、シリ
カゲルの交換時期です。

防水防塵IP67 補聴器のご使用およびお手入れ時の注意点



ポイント

ティッシュペーパーなどでしっ
かり水気を拭き取ってください。

注意

IP67を取得した補聴器は、電池ホルダーをきち
んと閉じた状態で防水性能を保ちます。
もし補聴器本体が水濡れしてしまった場合、
必ず補聴器に付いた水気をしっかり拭き取っ
てから電池ホルダーを開けるようにしてください。

ー 防水・防塵機能を維持するためにー
補聴器の動作の異常の有無に関わらず、1年に1度のメーカーによる
メンテナンスをおすすめします。

こんな時には使わないでください

- × **強い水流や強い水圧がかかるような場合**
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、
超音波洗浄機など)
- × **高温もしくは低温の環境条件の場合**
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での
保管、ドライヤーの温風)
- × **整髪や散髪の時**
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

フォナック

www.phonak.jp

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

TEL: 0120-06-4079

(お客様相談窓口 受付時間: 月〜金 9:00〜17:30 土日祝休み)

FAX: 0120-23-4080

PHONAK
life is on