


# 耳かけ型 RICタイプ - お手入れ編 -

## お手入れ 1 お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。




**1** 柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

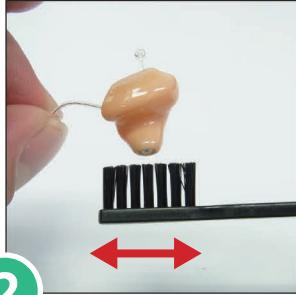


**2** 耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシがけをします。

### お掃除のポイント

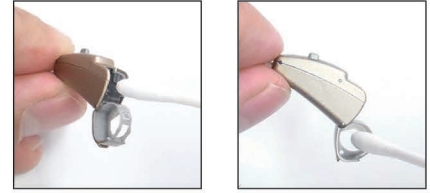

電池ホルダーの中は綿棒を使って掃除しましょう。特に汗をかいた後は必ず行ってください。


## お手入れ 2 耳垢浸入を防止する部品の交換

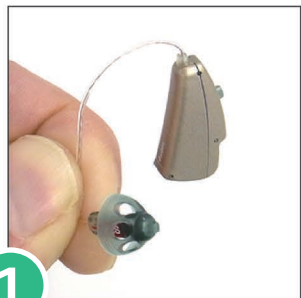


**1** はじめに、耳せんを x レシーバから取り外します。  
※オーダーシェルをお使いの場合はこの作業は不要です。




**2** ケースから交換用セルストップを1本取り出します。

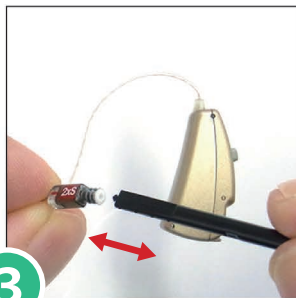

**3** 交換用セルストップを差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

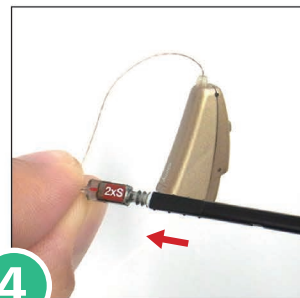

**4** 新しいセルストップをしっかり奥まで差し込みます。

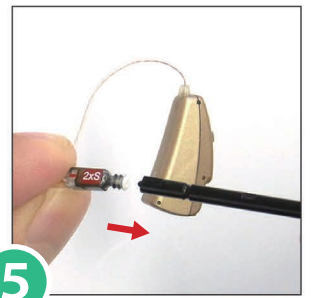

**5** ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

## お手入れ 3 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにも乾燥ケースに入れて保管してください。




**1** 補聴器から電池を取り出し、電池ホルダーを開けた状態で乾燥ケースに入れます。




**2** 乾燥ケースのふたを閉めます。補聴器から取り外した電池は、ふたの上のマグネットに付けておきます。

### シリカゲル(乾燥剤)の交換時期

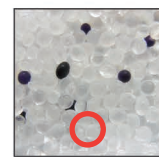


シリカゲルが新しいときは青い粒が混じっています。

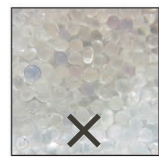

青い粒が、薄い紫色もしくは半透明に変わったら、シリカゲルの交換時期です。

## 防水防塵IP67 補聴器のご使用およびお手入れ時の注意点

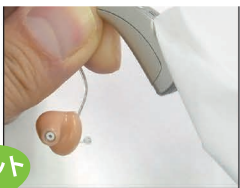

**ポイント** ティッシュペーパーなどでしっかり水気を拭き取ってください。

### 注意

IP67を取得した補聴器は、電池ホルダーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。もし補聴器本体が水濡れしてしまった場合、必ず補聴器に付いた水気をしっかり拭き取ってから電池ホルダーを開けるようにしてください。

— 防水・防塵機能を維持するために—  
補聴器の動作の異常の有無に関わらず、1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

### こんな時には使わないでください

- × **強い水流や強い水圧がかかるような場合**  
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × **高温もしくは低温の環境条件の場合**  
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × **整髪や散髪の時**  
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

**フォナック**

www.phonak.jp

ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL: 0120-06-4079  
(お客様相談窓口 受付時間: 月～金 9:00～17:30 土日祝休み)  
FAX: 0120-23-4080

**PHONAK**  
life is on