


## お手入れ ① お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。



**1** 補聴器クリーナー又は柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

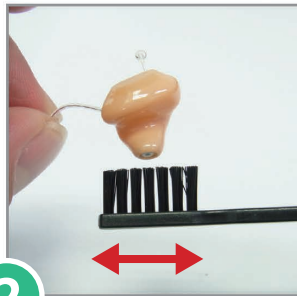

**2** 耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシがけをします。

お掃除にはこれがオススメ!

### 補聴器クリーナー

30袋入り 1,500円(税抜)

補聴器に付着する汗、皮脂、耳垢の汚れ、ニオイ、菌が、軽く拭だけで取れると同時に、防菌・防臭成分が付着してキレイを長時間保ちます。




## お手入れ ② 耳垢浸入を防止する部品の交換




**1** はじめに、耳せんを×レシーバから取り外します。  
※オーダーシェルをお使いの場合はこの作業は不要です。




**2** ケースから交換用セルストップを1本取り出します。

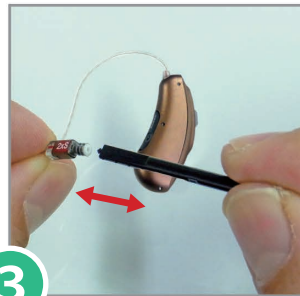

**3** 交換用セルストップを差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

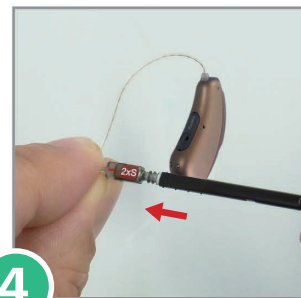

**4** 新しいセルストップをしっかり奥まで差し込みます。

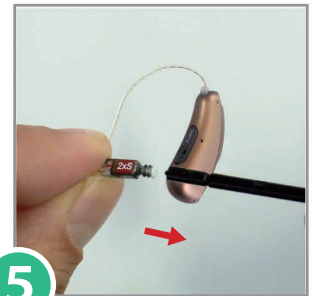

**5** ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

## お手入れ ③ 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにもドライカプセルをお使いください。



**1** チャージャーケースRICにドライカプセルを入れます。



**2** 蓋をしっかりと閉じます。

### ドライカプセル(乾燥剤)の交換時期



ドライカプセルが新しいときは鮮やかなオレンジ色。



くすんで半透明に変わったら、ドライカプセルの交換時期。

## 防水防塵IP68 補聴器のご使用およびお手入れ時の注意点



ポイント

補聴器が濡れている場合は、充電する前にしっかり水気を拭き取ってから充電ケースに入れてください。

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。  
防水・防塵性能を維持するために、補聴器の動作の異常の有無に関わらず1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

### こんな時には使わないでください

- × **強い水流や強い水圧がかかるような場合**  
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × **高音もしくは低温の環境条件の場合**  
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × **整髪や散髪の時**  
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

**フォナック**

www.phonak.jp

ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL: 0120-06-4079  
(お客様相談窓口 受付時間: 月～金 9:00～17:30 土日祝休み)  
FAX: 0120-23-4080

**PHONAK**  
life is on