



はじめに  
お読みください

# フォナック クイックガイド ボレロ M-M

## ■はじめに・・・準備をするもの

### 1. 補聴器



### 2. 補聴器用電池



お客様の電池は

□ PR41 (312)

## ステップ 1

電池を入れて、スイッチを入れてみましょう！




1

電池パックの後ろを開け、1粒電池を取り出します。



2

電池ホルダーのでっぱりを爪をかけ、手前に引きます。

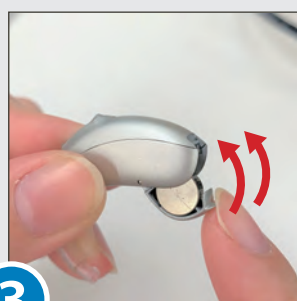

3


電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違わずに電池ホルダーに入れます。



コヨを見てね

### 電池の向きは間違っていないか？

電池は平らで + と彫ってある面が上です。

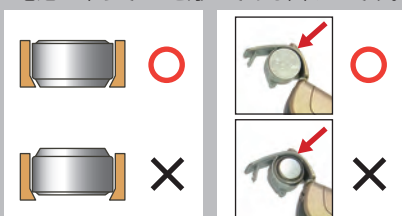

注意：電池を逆向きに入れると破損の原因になります。

### 電池が外れない時



電池ホルダーを開けて、先端が細くなったもの(つまようじなど)を使い押し出してください。

● <電源の入/切> 電池ホルダーの開閉にておこなってください。


## ステップ 2

補聴器を耳につけてみましょう！




1

イヤモールドの付け根(エルボー)部分をつまみます。

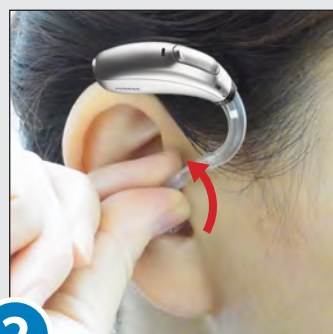

2

イヤモールドの先端を耳穴に差し込み、後ろに回しながら入れます。

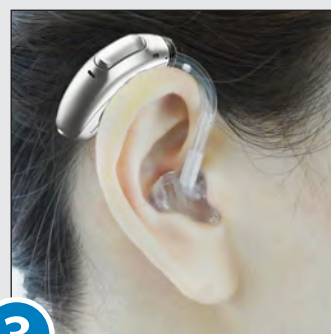

3


補聴器本体を耳にかけます。

### 取り出す時



○

イヤモールドの付け根(エルボー)部分をつまんで取り外します。

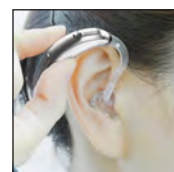

×

補聴器本体を持って外さないでください。

## ステップ 3

使用(練習)してみましょう！



練習1 ひとりで  
～3日間

家の静かな場所で練習してみましょう。



練習2 ふたりで  
～1週間

1対1での会話で楽しんでみましょう。



練習3 お部屋で  
～2週間

テレビやラジオを聴いてみましょう。



練習4 外出先で  
～1ヶ月間

色々な音がする外で会話を楽しんでみましょう。

お手入れ 1

お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

毎日のお掃除編

1



柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

2



音の出口を下に向けブラシをかけて、耳垢等を払い落とします。

別売



エアパッファー  
880円(税込)



イヤモールド洗剤(20粒入)  
880円(税込)



イヤモールド洗剤カップ  
880円(税込)

月に1〜2度編

より衛生的にお使いいただくためには、月に1〜2度はイヤモールドを洗浄しましょう！

1



イヤモールド洗剤を1粒、袋から出します。

2



イヤモールド洗剤カップの中に洗剤を入れます。

3



内ケースを置いてから、カップに150mlの水を入れて、イヤモールドも入れます。

この時蓋は閉めないでください。  
洗剤は5〜6分ほどで水に溶けてなくなりますが、イヤモールドはそのまま15分以上浸け置きください。ただし、8時間以上の浸け置きはおやめください。

4



イヤモールドは水洗いし、水気を拭き取ります。チューブの中の水は、エアパッファーを使って吹き飛ばしてください。

お手入れ 2

保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにも乾燥ケースにに入れて保管してください。

1




補聴器から電池を取り出し、電池ホルダーを開けた状態で乾燥ケースに入れます。

2



乾燥ケースのふたを閉めます。補聴器から取り外した電池は、ふたの上のマグネットに付けておきます。

シリカゲル(乾燥剤)の交換時期

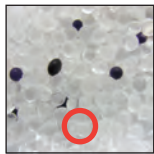

シリカゲルが新しいときは青い粒が混じっています。



青い粒が、薄い紫色もしくは半透明に変わったら、シリカゲルの交換時期です。

防水防塵IP68 補聴器のご使用およびお手入れ時の注意点



ティッシュペーパーなどで、しっかり水気を拭き取ってください。

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。  
防水・防塵性能を維持するために、  
補聴器の動作の異常の有無に関わらず  
1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

こんな時には使わないでください

×

強い水流や強い水圧がかかるような場合  
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)

×

高温もしくは低温の環境条件の場合  
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)

×

整髪や散髪の時  
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)