

# リモートアプリ クイックガイド

Ver. 3

リモートアプリは、スマートフォン\*にダウンロードして、フォナック オーデオ M 専用のリモコンアプリとしてご利用いただくことが可能です。Bluetooth®が搭載されたスマートフォンとペアリングしてご使用ください。

\* iPhone は iPhone5s 以上で、iOS が 10.2.以上であること  
Android は 6.0 以上であること  
Bluetooth®のバージョンが 4.2 以上であること

◇ リモートアプリのダウンロード先はこちら：



App Store



Google ストア


## ※ 注意：

リモートアプリで設定する前に補聴器をフィッティングしておく必要があります。



タップ


スマートフォンの画面を軽く指先で触れる

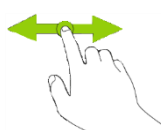

スワイプ

スマートフォンの画面を軽く指先ではらう

## メイン画面

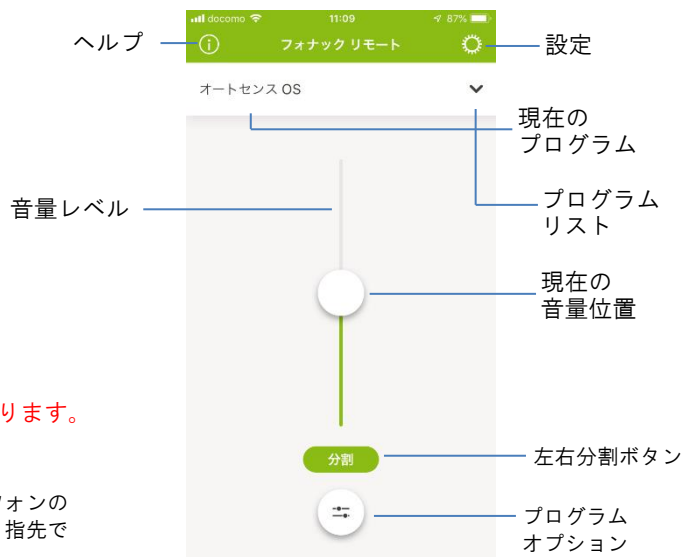

## スマートフォンの Bluetooth®設定

リモートアプリで設定を行う前に、お使いのスマートフォンの Bluetooth®設定画面で補聴器を検索&接続します。

### ① 充電タイプの場合



初めてペアリングするオーデオ M の場合、補聴器をチャージャーケースから取り外すと自動的に電源オンになって、ペアリングモードになります。

### 空気電池タイプの場合



初めてペアリングするオーデオ M の場合、電池ホルダーを開閉すると、ペアリングモードになります。

### サンプル画面：iPhone



### 【ペアリングの手順 (iPhone を使用した場合)】

1. オーデオ M をペアリングモードにします。
2. スマートフォンの Bluetooth®設定を開きます。
3. Bluetooth®をオンにして Bluetooth®機器を検出します。補聴器が検出されたらタップして選択します。接続されると「接続」と表示されます。

※ Bluetooth®設定画面および表示文言は、お使いのスマートフォンの端末によって異なります


# リモートアプリの設定

スマートフォンにアプリをインストールして初めて起動する際、②～④が表示されます。




初めてアプリを起動する際、上記のような画面が表示されます。

「次へ」をタップして進みます。

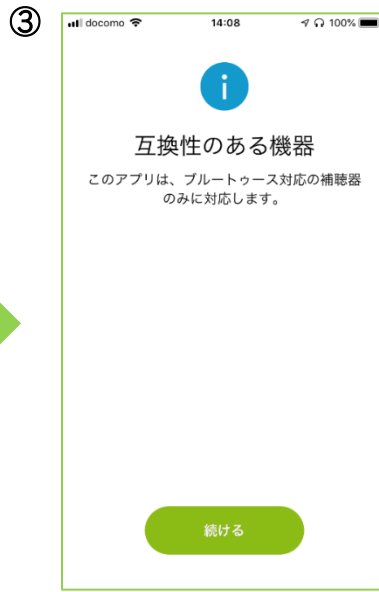


互換性のある機器が表示されます。

「続ける」をタップして進みます。

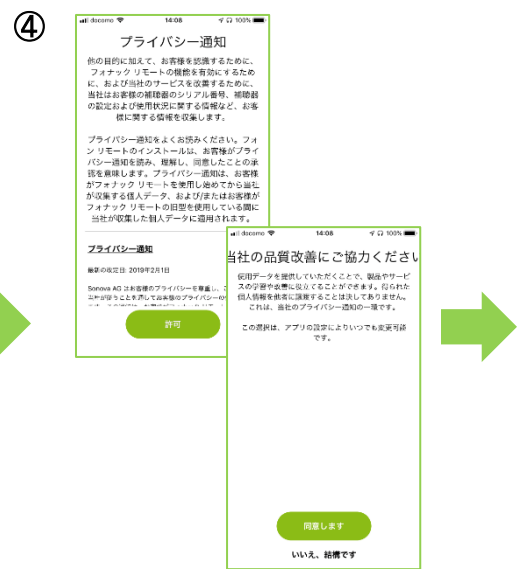


プライバシーポリシーに関して表示されます。詳細内容を確認し「許可」をタップして進みます。

品質改善のプライバシー通知に関して表示されます。詳細内容を確認し選択肢をタップして進みます。

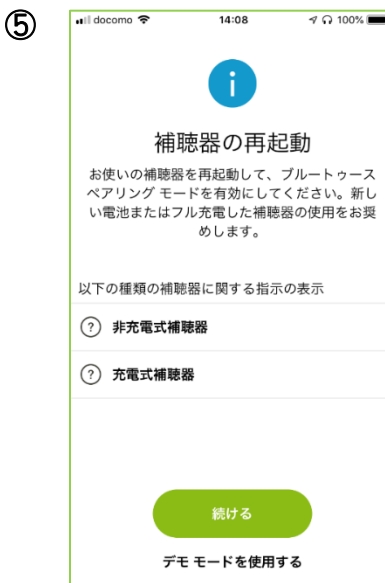

補聴器の電源入切（チャージャーケースの抜き差し）または補聴器の電池ホルダーの開閉を行ってから「続ける」をタップして進みます。

デモを行いたい場合は「デモモードを使用する」をタップします。

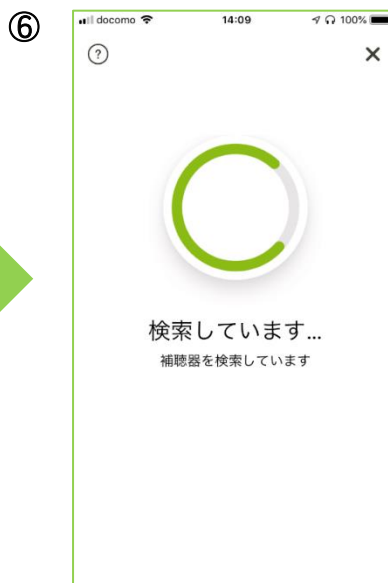

補聴器を検索しています。



登録名が表示されます。

登録名の初期設定：  
(フィッティングソフトで変更可能)

- 右 Phonak 補聴器
- 左 Phonak 補聴器


「選択」をタップします。




ペアリング中です。



Bluetooth®ペアリングの要求の「ペアリング」をタップして接続します。

ペアリングされると  とビープ音が提示されます。

この動作は左右それぞれの補聴器で実行されます。

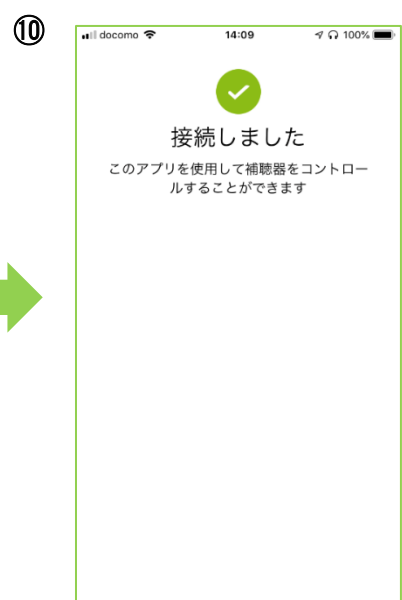


接続しました。

「続ける」をタップしてメイン画面へ移動します。

## 音量調節とプログラム変更


### 音量調節（メイン画面）

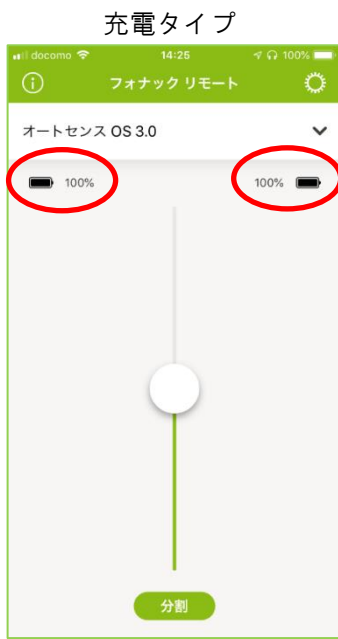

画面上部に充電残量が表示されます。

初期設定：結合

### 空気電池タイプ

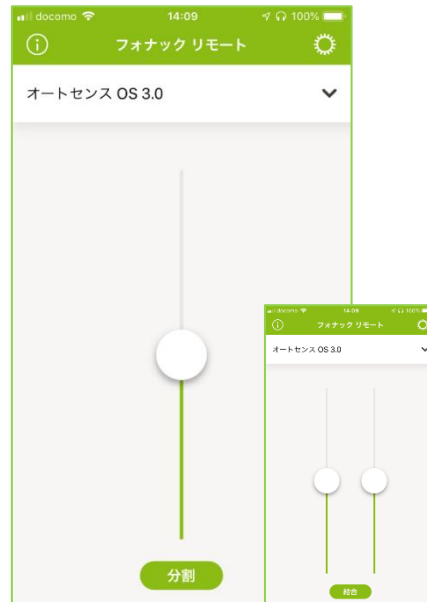


「分割」をタップすると、左右別に音量調節できます。

初期設定：結合

### プログラム変更



メイン画面に表示されたプログラム横の  をタップすると、補聴器に登録された全てのプログラムが開示されます。


## テレビコネクターDからの音量バランス調節

オーディオ M 専用アクセサリ「テレビコネクターD」を使用する際、テレビからの音声（表記名：テレビ）と補聴器からの音（表記名：周囲）のバランス調節をリモートアプリで行うことが可能です。



補聴器がテレビコネクターDとペアリングされていれば、リモートアプリ画面上でプログラムオプション（右図）として表示させることができます。メイン画面を左にスワイプするとプログラムオプションの画面に移動します。

初期設定は中央に位置付けられています。

テレビの方向にスワイプしていくと、テレビからの音声が大きくなり、補聴器からの音が減衰されます。

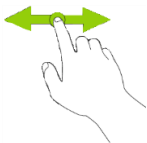

周囲の方向にスワイプしていくと、補聴器からの音声が大きくなり、テレビからの音声が減衰されます。

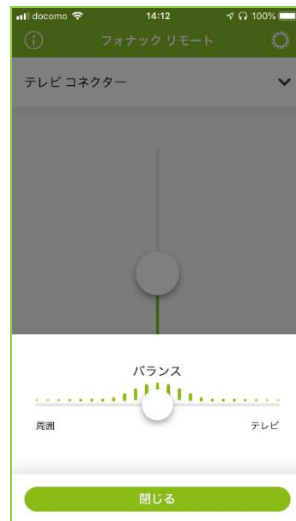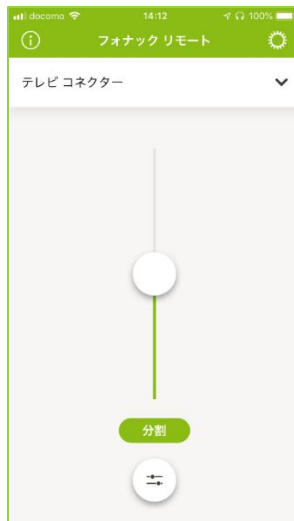

補聴器の電源オンオフまたは電池ホルダーを開閉しない限りは、設定したバランス調節内容は保持されます。

## ペアリングが切れてしまったら・・・

使用状況や使用機器の状態によっては、ペアリング状態が切れてしまうことがあります。

再度アプリを使用する場合、補聴器の電源がオンであればメイン画面上で自動再接続し「接続しています」→「接続しました」の文言と共に🟢マークが付きます。（Bluetooth®オンの状態）

これが接続時の通常動作です（右図）。

「接続しました」に変わらない場合：

ずっと検出している場合、次を実行します：

ア) 充電タイプは電源の入切、イ) 空気電池タイプは電池ホルダーを開閉し、再度接続されるか試します。

接続されない場合、ペアリングが切れている可能性があります

### 【ペアリング再接続の手順】

- ① メイン画面右上の☀️マークをタップします。
- ② 「自分の補聴器」→「自分の機器」をタップします。
- ③ 「機器を削除する」をタップします。
- ④ 「はい、削除します」をタップします。これで削除されました。
- ⑤ 再度ペアリングを行うため、2枚目の⑤～⑩を行います。

未接続時



接続時



※ 問題が改善されない場合、補聴器のペアリング情報を一度リセットするため、補聴器の再調整を行ってください。