




# はじめに お読みください

## フォナック クイックガイド 耳かけ型 (電池式)

### 準備するもの

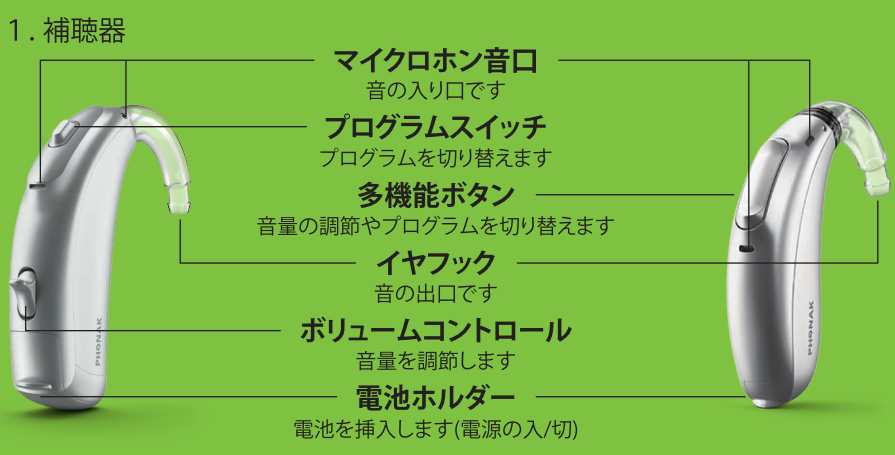

### 2. 補聴器用電池

- お客様の電池は
- PR41 (312)
  - PR44 (675)
  - PR48 (13)


## ステップ1 電池を入れて、電源を入れてみましょう！




電池パックの後ろを開け、1粒電池を取り出します。




電池ホルダーのでっぱりを爪でつかって、手前に引き出します。

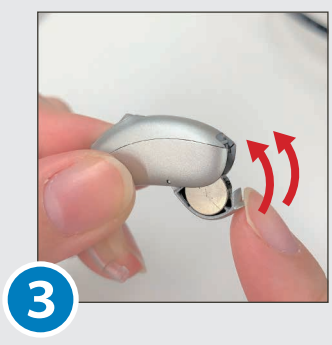

電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違わずに電池ホルダーに入れます。

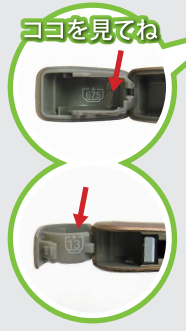

### 電池の向きは間違っていますか？

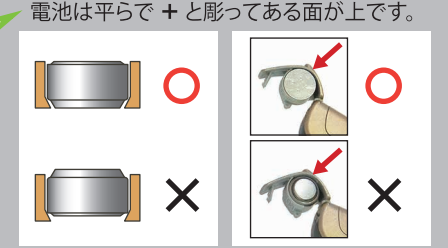

### 電池が外れない時



● <電源の入/切> 電池ホルダーを閉めると電源が入り、開けると電源が切れます。

## ステップ2 補聴器を耳につけてみましょう！



イヤモールドの付け根(エルボー)部分をつまみます。



イヤモールドの先端を耳穴に差し込み、後ろに回しながら入れます。




補聴器本体を耳にかけます。

### 取り出す時



## ステップ3 使用(練習)してみましょう！

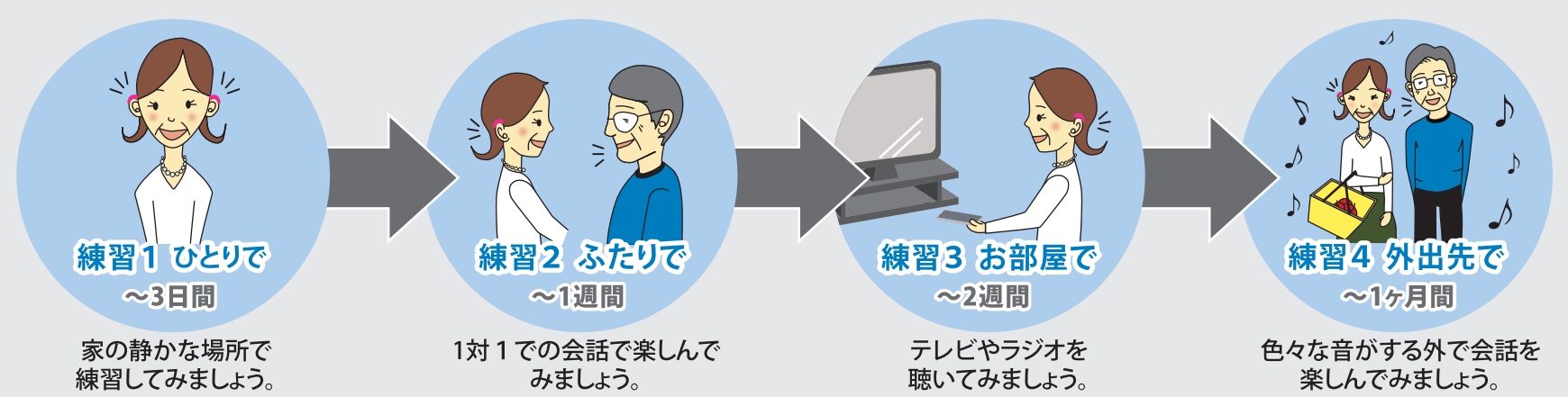

ご不明な点はお購入販売店にお問い合わせください。点検、クリーニングは定期的に販売店でおこなってもらおう事をおすすめします。

## お手入れ 1

### お掃除の仕方


補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

#### 毎日のお掃除編



1

柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

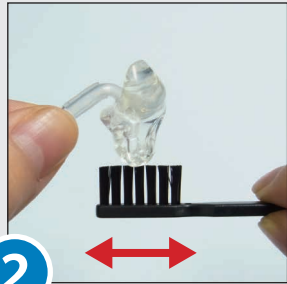

2

音の出口を下に向けブラシをかけて、耳垢等を払い落とします。

### 防水防塵IP68補聴器 ご使用の注意点

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。防水・防塵性能を維持するために、補聴器の動作の異常の有無に関わらず1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

#### 【こんな時には使わないでください】

- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合  
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × 高温もしくは低温の環境条件の場合  
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × 整髪や散髪の時  
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

#### 月に1〜2度編

より衛生的にお使いいただくためには、月に1〜2度はイヤモールドを洗浄しましょう!



1

イヤモールド洗浄剤を1粒、袋から出します。



2

イヤモールド洗浄カップの中に洗浄剤を入れます。



3

内ケースを置いてから、カップに150mlの水を入れて、イヤモールドも入れます。

この時蓋は閉めないでください。

洗浄剤は5〜6分ほどで水に溶けてなくなりますが、イヤモールドはそのまま15分以上浸け置きましょう。ただし、8時間以上の浸け置きはおやめください。



4

イヤモールドは水洗いし、水気を拭き取ります。チューブの中の水は、エアパフナーを使って吹き飛ばしてください。

## お手入れ 2

### 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにも乾燥ケースに入れて保管してください。



1


補聴器から電池を取り出し、電池ホルダーを開けた状態で乾燥ケースに入れます。




2

乾燥ケースのふたを閉めます。補聴器から取り外した電池は、ふた上のマグネットに付けておきます。

### シリカゲル（乾燥剤）の交換時期

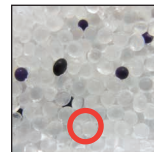

シリカゲルが新しいときは青い粒が混じっています。

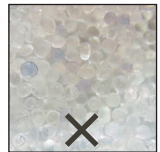

青い粒が、薄い紫色もしくは半透明に変わったら、シリカゲルの交換時期です。



エアパフナー  
880円(税込)



イヤモールド洗浄剤 (20粒入)  
880円(税込)



イヤモールド洗浄カップ  
880円(税込)



乾燥ケース  
880円(税込)



詰め替え用シリカゲル  
165円(税込)