




ロジャー テーブルマイク IIはさまざまな会議に対応する会議専用の卓上置き型マイクロホン（ロジャー送信機）です。

話している人を自動で選択して、集音方向を切り替えます。複数のロジャー テーブルマイク IIを接続して使用することによって大人数の会議にも対応できます。またタブレットやPCの音を送信することもできます。ミュートのオン/オフや集音範囲の選択ができるリモコンが付属されます。

各部の名称


〔本体〕

- ① 電源／ミュートボタン
- ② マイク／インジケータライト
- ③ 3.5mmオーディオジャック
- ④ マイクロUSB用ソケット（充電用）
- ⑤ 接続ボタン

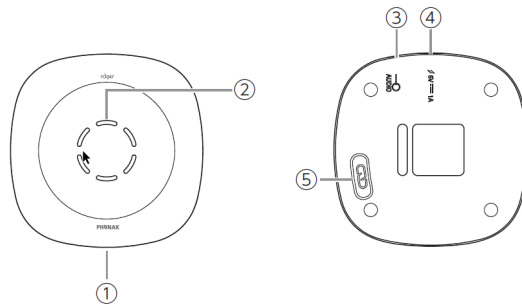

〔リモコン〕

- ① インジケータライト
- ② ミュートオンボタン
- ③ ミュートオフボタン
- ④ 狭域集音ボタン
- ⑤ 広域集音ボタン
- ⑥ ねじ
- ⑦ 電池カバー

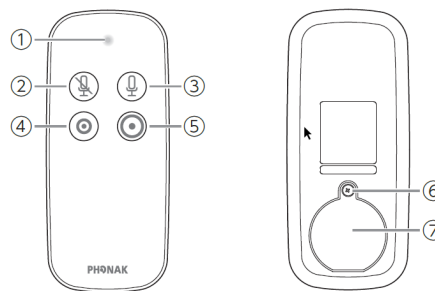

特長

- 会話音と騒音の比率を毎秒数百回解析し、6方向/360度、その瞬間の話し手の声をビームのように捉えて騒音下での聞こえを改善するマルチビームテクノロジー
- 複数台同じネットワークに接続して大人数の会議にも対応できるマルチ・トーカー・ネットワーク
- ロジャー セレクト、ロジャー ペン、ロジャー クリップオン マイク、ロジャー テーブルマイク IIとネットワークを構築し同じ環境で使用可能
- ミュートと集音範囲を選択できるリモコン付属
- オーディオケーブル接続によるタブレット、PCなどの音声送信可能
- フル充電で約16時間使用可能
- 本体ボタンを2つのみにすることで優れた操作性を実現

仕様一覧

本体外寸 (L x W x H) :	69 × 69 × 14 mm
重さ :	103 g
カラー :	シャンパン
動作環境条件 :	温度 : 0°C~45°C / 相対湿度90%未満 (ただし、結露無きこと)
保管・輸送環境条件 :	温度 : -20°C~60°C / 相対湿度90%未満 (ただし、結露無きこと)



## 電源仕様

電池： リチウムポリマー（電圧：3.7V）

充電時間： 約4時間  
※充電時間は電池状態により変わります。

容量： 1000 mAh

使用時間： 約16 時間

充電供給： 入力電圧： 100 – 240 V  
(入力) 出力電圧： 5 VDC / 1A  
接続部： マイクロ USB  
ケーブルの長さ： 1.3 m

過充電されない仕組みとなっておりますが、充電中、高温になることがあります。

《重要！》  
専用のACアダプターを使用して充電することをお勧めします。（5 VDC, >500 mA）

## マイクロホン仕様

マイクの数： 本体埋め込み式 3つ

モード： 卓上モード

## 音声信号

音声入力： アナログ

再生周波数帯： 100 ~ 7,300 Hz

## Roger仕様

Roger： 2.4GHz帯のデジタル無線方式を用いた新しい補聴援助システムです。騒がしい教室や公共の場所など、補聴器や人工内耳を装着していても聞き取りが難しい騒音下での聞き取りを飛躍的に向上させます。

伝搬技術： 2.4GHz  
自動適応型周波数ホッピング方式

電波出力： 70 mW

伝達範囲： 最大 15 m

接続操作範囲： 10 cm

## ロジャー機器との互換性

ロジャー受信機： 全ロジャー受信機

ネットワーク参加  
可能受信機数： 無制限

互換性がある  
ロジャー送信機： ロジャー テーブルマイク II  
ロジャー セレクト  
ロジャー ペン  
ロジャー クリップオン マイク

ネットワーク参加  
可能送信機数： 最大10台

## 基準認証

電波法： 209-J00311  
209-J00341

STD-T66： ARIB-T66

Europe： EN 300 328  
EN 301 489  
EN 60950-1  
IEC/EN 62479

Canada： RSS-247  
RSS-102

USA： CFR 47, part 15.231, part 15.247  
FCC OET Bulletin No.65