



### 1. 시스템 권장 값

|       |                          |          |                    |
|-------|--------------------------|----------|--------------------|
| 운영 체제 | 윈도우 10 이상(Target 9.0 기준) | 하드디스크 공간 | 3GB 이상             |
| 프로세서  | 인텔 코어 이상                 | 화면 해상도   | 1280 x 1024 픽셀 이상  |
| RAM   | 4GB 이상                   | 그래픽 카드   | 1,600만(24비트) 색상 이상 |

### 2. 설치 시 유의사항


피팅 소프트웨어는 반드시 '웹하드'에서 다운로드 받아 설치하시기 바랍니다.

[Target] - [업데이트]에서 다운받아 설치하거나, Target을 종료할 때 [설치 & Phonak Target 종료하기]를 누르면 피팅 소프트웨어가 삭제될 수 있습니다.

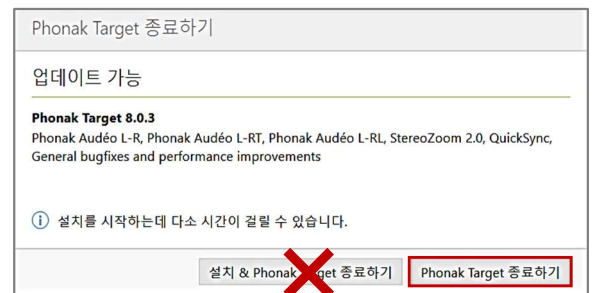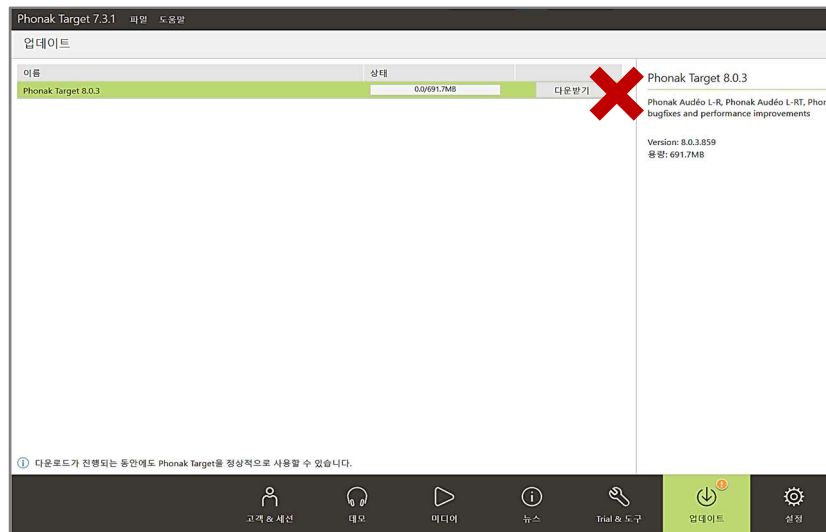

\* Target 종료 시, 설치 및 업데이트 알림이 나타나지 않게 하려면 다음과 같이 설정합니다.

[Target] - [설정] - [인터넷] - [인터넷 서비스] - [자동으로 업데이트 체크] 비활성화

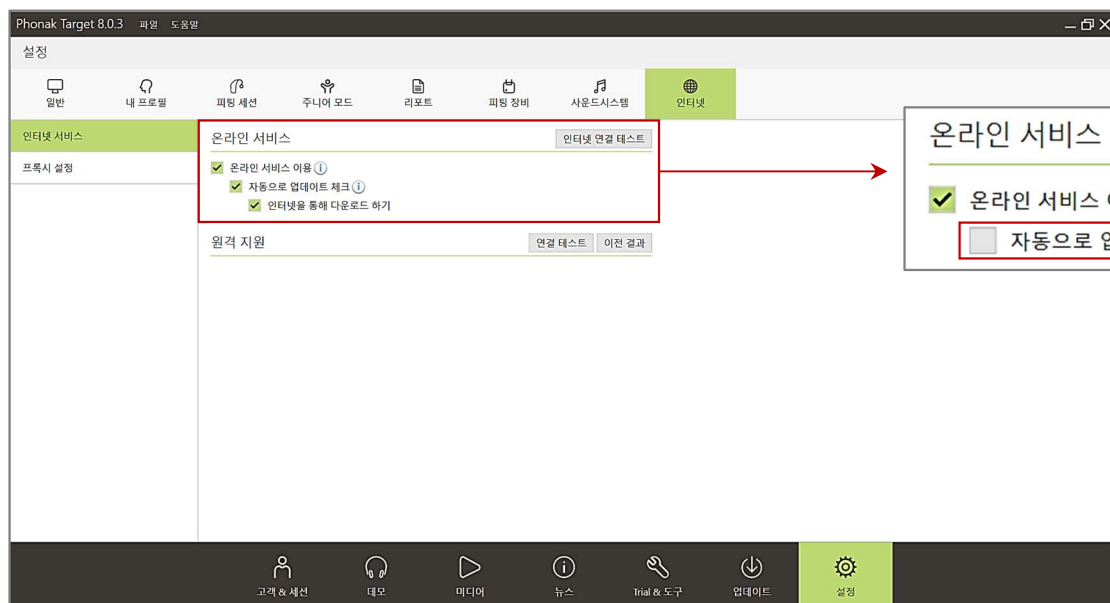

### 3. 파일 다운로드 및 설치


- ① 웹사이트에서 '웹하드' 검색 후 접속합니다([www.webhard.co.kr](http://www.webhard.co.kr) 정식 명칭: LG U+ 웹하드).
- ② 우측 상단에 있는 '로그인' 클릭 후 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
- ③ [내웹하드] - [피팅소프트웨어] - [Phonak Target 최신버전(예: Phonak Target 9.0)]을 클릭합니다.




- ④ 폴더 비밀번호 입력 후, [Phonak Target 파일(예: Phonak Target 9.0)]을 선택하여 [내리기] - [일반 내리기]를 클릭합니다.




- ⑤ 다운로드 한 폴더를 '압축 풀기'합니다.

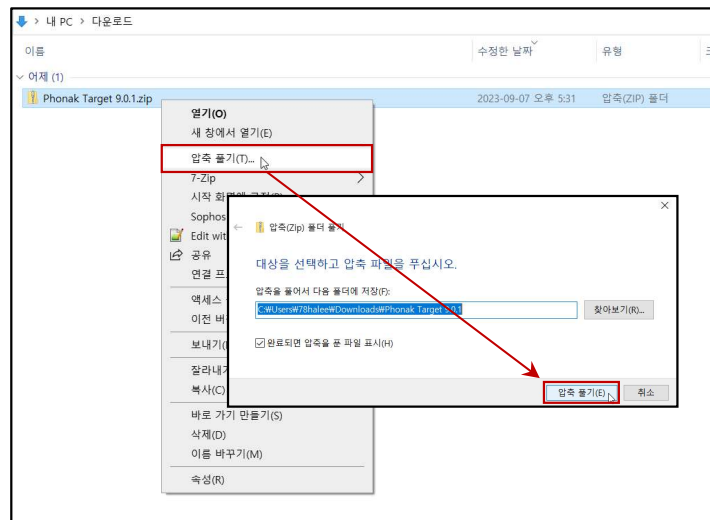

- ⑥ 압축을 푼 파일에서 'Setup.exe'를 클릭합니다.

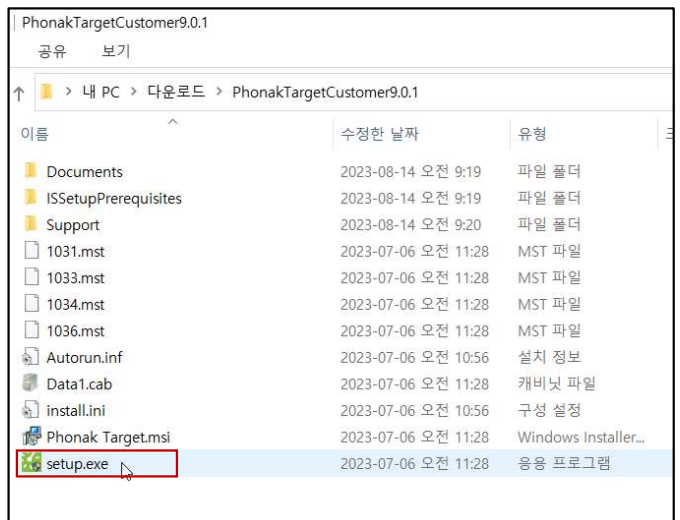

⑦ Target 설치를 시작합니다.

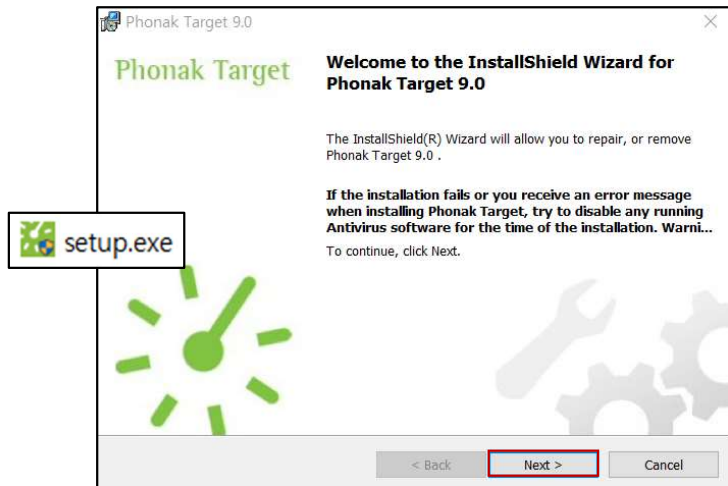


▲ 설치 시작





▲ 라이선스 동의

Location은 반드시 South Korea로 선택합니다.

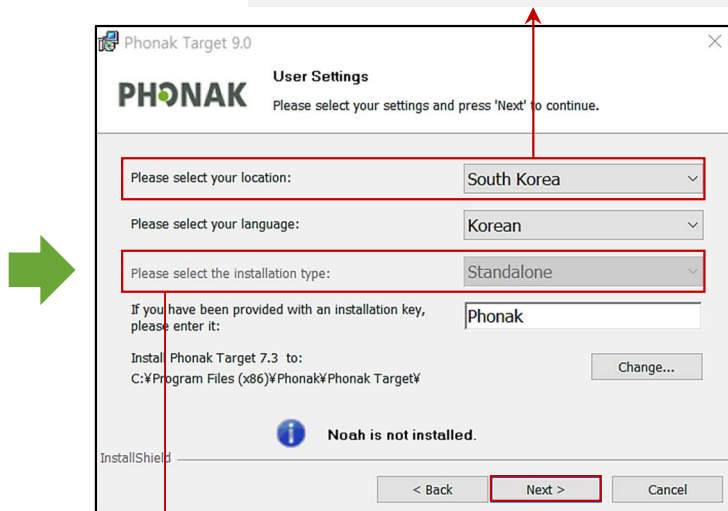


Noah 시스템을 사용하는 경우에만 Noah 항목이 활성화됩니다.

▲ 국가 및 언어, 설치 유형 선택

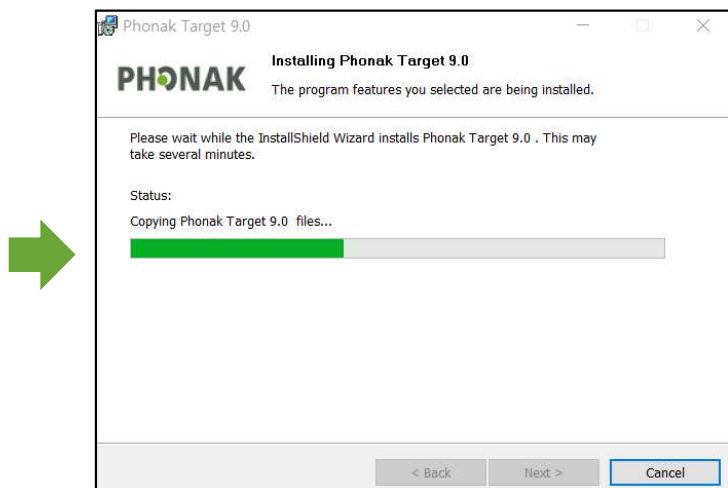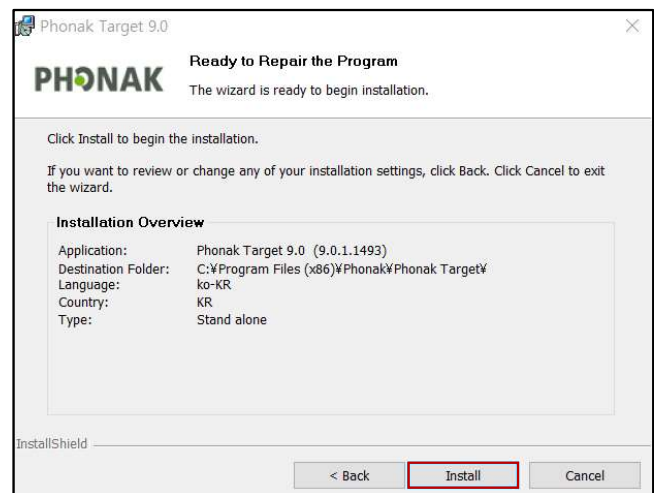

▲ 설치 중

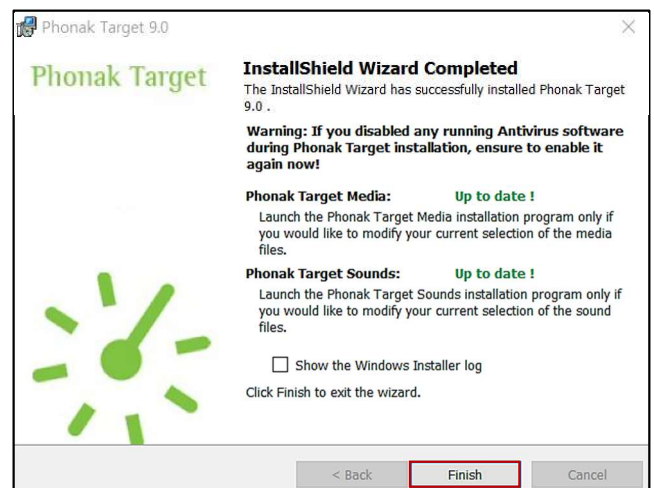

▲ 설치 완료