


Phonak Target Launcher 작동 오류란?

컴퓨터가 프로그램을 실행하는 필요한 필수 요소가 손상된 경우 나타납니다.

Target BackUp Tools로 고객 데이터를 먼저 백업* 한 후, 아래 방법으로 진행하시기 바랍니다.

(가능 여부는 오류 유형에 따라 상이함).

1. [제어판] - [프로그램 설치/제거] - Phonak Target 프로그램 삭제하기
2. 목록에서 Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 삭제하기
3. [내 컴퓨터] - [C드라이브] - [Phonak], [Phonak Group] 폴더 삭제하기
4. Phonak Target 재설치하기**

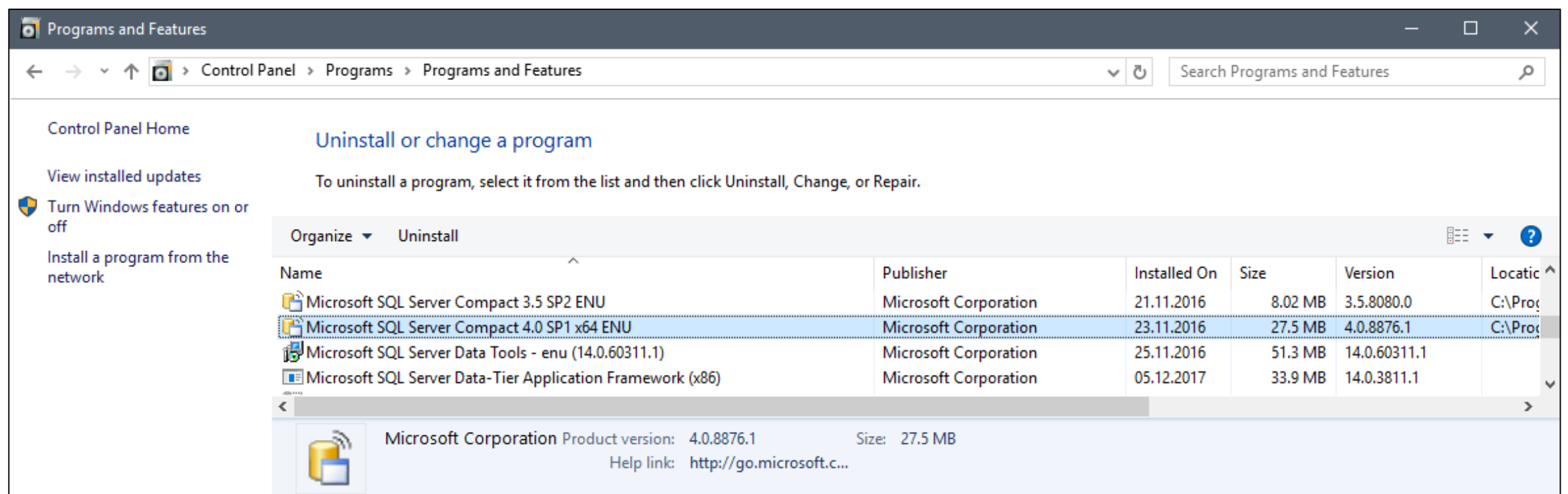

▶ [프로그램 설치/제거] - MicroSoft SQL Server Compact 4.0 SP1 화면

* 'Target BackUp Tools를 이용한 고객 데이터 백업하는 방법' 자료 참고

** 'Target 설치하는 방법' 자료 참고