











# Phonak Sky™ Marvel

## Høreapparatstatus og indikatorlys

		Sky M-M og Sky M-SP	Sky M-PR
<input type="checkbox"/> Høreapparatet er på	Gjentagende enkle blink		
<input type="checkbox"/> Høreapparatet er på og Roger™ er tilgjengelig	Gjentagende doble blink		
<input type="checkbox"/> Lavt batterinivå	Kontinuerlige blink	 *	 **
<input type="checkbox"/> Justering av volum ***	Enkelt blink per volumendring		
<input type="checkbox"/> Programendring ***	Enkelt blink per programendring		

\* Varsel om lavt batterinivå starter cirka 30 minutter før batteriet må byttes.

\*\* Varsel om lavt batterinivå starter cirka 60 minutter før batteriet må lades.

\*\*\* Valgt enten med en fjernkontroll eller flerfunksjonsknappen.