

Phonak Fast Facts



Phonak Charger Case

Hva er det?

Phonak Charger Case er et ladealternativ til Phonak Belong™ oppladbare høreapparater som også fungerer som en tørkeenhet og et hardt etui. En uttakbar Power Pack (tilleggsutstyr) kan festes til Charger Case i situasjoner når man ikke har en ekstern strømkilde tilgjengelig.

Hvorfor bruke den?

Dette er en ideell løsning for kunder som ønsker en lader som både kan lade, lagre og tørke høreapparater samtidig. Ved bruk av Power Pack kan man slippe å lade til en ekstern strømkilde i opptil 7 dager.

Hvordan brukes den?

Høreapparatene lades enkelt ved å koble dem til sporene i Charger Case, og de slår seg av automatisk. Det grønne indikatorlyset blinker langsomt for å indikere lading. Når lysene slutter å blinke og lyser sammenhengende, er høreapparatene fulladet og klare til bruk. Ladetiden for et helt utladet høreapparat er 3 timer.

Når det ikke finnes en ekstern strømkilde tilgjengelig, kan Power Pack låses til bunnen av Charging Case. Dette vil gi 7 fullstendige ladinger for et par oppladbare Belong-høreapparater. Power Pack kan lades opp uten at den tas ut av Charging Case. Du trenger bare å koble til en ekstern strømkilde, så kan høreapparatene og Power Pack kobles sammen.



Phonak Charger Case



Phonak Charger Case med medfølgende Power Pack

Hvis du ønsker mer informasjon om Phonak Belong oppladbare høreapparater og lademuligheter, kan du se mer på www.phonakpro.com/audeo-b eller ta kontakt med en representant fra Phonak.