

Utføre en daglig lyttekontroll på Roger™

Reference Sheet

roger

Hvis et barn skal kunne delta fullstendig og få mest mulig ut av skoleundervisningen, må høreapparatene fungere som de skal.

Lyttekontroll

1. Lytt til høreapparatet. Hvis det ikke fungerer, følger du feilsøkingstrinnene nedenfor.
2. Hvis høreapparatene fungerer, kontrollerer du at det står på riktig Roger-program.
3. Slå på Roger-mikrofonen. Du skal høre stemmen din klart og tydelig gjennom høreapparatet.

Feilsøkingeveiledning

Problem

Det er ikke lyd i høreapparatet

Løsning

- Sett et nytt batteri inn i høreapparatet (fjern beskyttelsen på batteriet og vent i 2 minutter før du setter det inn i batteriskuffen).
- Er slangen sprukket eller øreproppen blokkert med fuktighet/rusk/voks?
- Trekk øreproppslangen ut av ørehengeren. Kommer lyden ut nå?
Hvis den gjør det, er det en blokkering i øreproppen eller rift i slangen.

Roger-mikrofonen høres ikke gjennom høreapparatet

- Kontroller at mikrofonen er slått på og ikke er dempet.
- Trykk på **Connect** på Roger-mikrofonen.
– Hold mikrofonen innen 10 cm fra mottakeren.
- Trykk på **Check** for å bekrefte nettverksforbindelsen.
- Bruk av Roger X – fest audioskoen og Roger X til høreapparatet igjen.
– Fjern eventuelle klistremerker, smuss eller rusk på kontaktene.
- Sett inn et nytt høreapparatbatteri.
- Kontroller at høreapparatet er stilt inn på riktig program.

Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte en tekniker for å få hjelp.