

Bruke Roger™ DigiMaster X

Reference Sheet



Perfekt for klasserom med andre SoundField-installasjoner for å sørge for at alle lyttere kan oppnå taleforståelighet med Roger-kvalitet. Koble til, slå på systemet og undervis.

Første oppsett

- Koble Roger DigiMaster X til en strømkilde.
- Bruk lydkabelen og adapteren som følger med, til å koble Roger DigiMaster X til romforsterkersystemet.
- Hold Roger Touchscreen Mic eller Roger inspiro maks. 10 cm fra Roger DigiMaster X, og trykk på **Connect**.

Daglig bruk

- Trykk på av/på-knappen på Roger DigiMaster X i 2 sekunder for å slå den på. Slå på Roger-mikrofonen. Snakk inn i Roger-mikrofonen.
- Trykk på av/på-knappen på Roger DigiMaster X i 2 sekunder for å slå den av når du er ferdig.

Indikatorlampe på Roger DigiMaster X

-  Sammenhengende rødt lys – Roger DigiMaster X er slått av
-  Sammenhengende blått lys – standard driftsmodus
-  Blinkende blått lys – Roger-mikrofonen er slått av eller utenfor rekkevidde
-  Sammenhengende grønt lys – Roger-mikrofonen er dempet
-  Grønt til rødt lys – volumet blir justert +/-
-  Blinkende gult lys – programvareoppdatering
-  Blinkende rødt lys – kontakt Roger teknisk støtte

