

Bruke Roger™ Multimedia Hub i klasserommet

Reference Sheet

roger

I det moderne klasserommet er lærernes undervisning ofte støttet av video- og audiokilder slik som interaktive tavler eller MP3-spillere. Det kan forventes at barn lytter til individuell undervisning som en lydbok eller en oppgave på datamaskin. Roger Multimedia Hub kan nå brukes til å støtte både blandet (lærer og lyd) og individuell lytting.

Generell bruk

- Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Multimedia Hub i 3 sekunder for å slå den på. Den grønne indikatorlampen blinker inntil enheten er klar. Strømindikatorlampen vil fortsette å blinke grønt under bruk.
- Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Multimedia Hub i 3 sekunder for å slå den av. Indikatorlampene blinker grønt 3 ganger for så å slukke.
- Når du lader med enten USB-ledning eller i Roger Charging Rack, blinker indikatorlampene grønt. Når enheten er fulladet, lyser de sammenhengende grønt.



Sending i klasserom – brukes når alle Roger-brukere må høre lydkilden.

- Slå på Roger Multimedia Hub.
- Plasser Roger Touchscreen Mic maks. 10 cm fra Multimedia Hub, og trykk på **Connect**-ikonet på Roger Touchscreen Mic.
- Koble Multimedia Hub til lydutgangen på datamaskinen eller annen lydkilde.
- Roger Multimedia Hub vil overføre lyden samtidig med lyden fra Roger Touchscreen Mic. Da kan både læreren og lydkilden høres samtidig.

Selvstendig lytting – brukes når et barn må lytte til en lydkilde på egen hånd, f.eks. en lydbok eller undervisning gjennom datamaskinen.

- Hold Roger Multimedia Hub maks. 10 cm fra barnets Roger-mottaker, og trykk på den store **Connect**-knappen på Multimedia Hub. Gjenta tilkoblingen for flere mottakere.
- Koble Multimedia Hub til lydutgangen på nettbrettet eller andre lydkilder.
- Spill av lydkilden. Roger Multimedia Hub vil kun overføre til tilkoblede mottakere.
- Barnet kan igjen koble seg til klasseromsnettverket via Roger WallPilot eller lærerens mikrofon.