

Bruke Roger™ Pass-around i klasserommet

Reference Sheet



Roger Pass-around er utviklet for å legge til rette for diskusjoner i klasserommet, slik at ikke bare lærere, men alle elever høres klart og tydelig. Roger Pass-around kan sendes fra person til person eller plasseres i det stabile stativet foran én eller to elever.

Generell bruk

Generell bruk

- Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Pass-around i 3 sekunder for å slå den på. Indikatorlampene blinker grønt mens den slår seg på.
- Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Pass-around i 3 sekunder for å slå den av. Indikatorlampene blinker grønt til den er slått av.
- Når du lader med enten USB-ledning eller i Roger Charging Rack, blinker indikatorlampen grønt. Når enheten er fulladet, lyser den sammenhengende grønt.



Før førstegangs bruk

- Slå på Roger Pass-around.
- Plasser Roger Touchscreen Mic maks. 10 cm fra Roger Pass-around, og trykk på **Connect**-ikonet på Roger Touchscreen Mic.

Daglig bruk

Roger Pass-around er helt automatisk og klar til bruk når den er koblet til. Barnet trenger bare å snakke inn i den for å bli hørt.

- **Håndholdt** – den som snakker, holder mikrofonen nær munnen. Indikatorlampen lyser grønt når stemmen fanges opp.
- **I stativet** – Roger Pass-around kan plasseres i det stabile, men lette stativet. Plasser den på bordet foran de som snakker.
- Dersom Roger Pass-around legges på bordet, vil den dempes automatisk (indikatorlampen blinker rødt) for å unngå å sende lyd unødvendig.

Alternativ bruk

Trykk-og-snakk

Dette er en spesielt programmert innstilling som krever at den som snakker, aktiverer Roger Pass-around manuelt.

- **Håndholdt** – den som snakker, må trykke og holde inne den store mikrofonknappen på Pass-around. Indikatorlampen lyser grønt når den er i bruk. Alle andre indikatorlamper på Roger Pass-around lyser oransje, noe som indikerer at de er i standbymodus.
- **I stativet** – brukeren må raskt trykke på den store mikrofonknappen på Roger Pass-around. Indikatorlampen lyser grønt for å bekrefte bruk. Når den som snakker er ferdig, må knappen trykkes raskt inn igjen for å slå av mikrofonen.