

Bruke Roger™ Touchscreen Mic og Roger™-mottakere

Reference Sheet



Roger Touchscreen Mic er enkel og intuitiv å bruke i klasserommet og gjør det lett for både lærere og elever å vite når mikrofonen fungerer og sender.

Mikrofon



Roger Touchscreen Mic

Trykk på av/på-knappen på siden av mikrofonen i 3 sekunder for å slå den på. Den grønne indikatorlampen blinker under oppstart.

- Heng Roger Touchscreen Mic rundt halsen i halssnoren til den som snakker, og juster høyden til den øverste delen av mikrofonen er 20 cm fra munnen.
- Hvis en elev skal kobles til, plasserer du Roger Touchscreen Mic maks. 10 cm fra Roger-mottakeren og trykker på **Connect**-ikonet. Gjenta med mottakeren på det andre øret.
- Roger Touchscreen Mic kan dempes ved å trykke på **dempeknappen**. En indikatorlampe rundt knappen blinker nå rødt.
- På slutten av dagen slår du Roger Touchscreen Mic av ved å trykke på av/på-knappen i 3 sekunder. Den ber deg bekrefte at du vil slå av. Trykk på **merket for ja**. Lad enheten daglig med riktig USB-lader eller ved å plassere den i Roger Charging Rack.

Mottaker



Roger X

- Plasser Roger X på høreapparatet ved hjelp av egnet audiosko. Den er nå klar til bruk.
- Når mottakere er koblet til Roger-nettverket, trenger du ikke å koble dem til igjen.
- Hvis mottakeren må bli igjen på skolen, fjerner du Roger X fra høreapparatet på slutten av skoledagen i henhold til instruksjonene fra høreapparatspesialisten.



Roger designintegreert

- Designintegreerte Roger-mottakere er spesialtilpasset for bestemte høreapparater og cochlea-implantater.
- Når mottakere er koblet til Roger-nettverket, trenger du ikke å koble dem til igjen, selv ikke etter at de er slått av og på.
- Det skal ikke være nødvendig å fjerne designintegreerte mottakere på skolen.