

Enkelt å ringe med Roger

Håndbok



Det å ringe er fremdeles en av de største utfordringene for personer med stort til svært stort hørselstap. Roger-produkter fra Phonak sender enkelt innringerens stemme direkte til ørene. Med Roger kan du koble deg til en rekke telefoner, og det finnes en kompatibel Roger-mottaker for praktisk talt alle høreapparater og cochlea-implantater.

En oversikt over alle alternativer



Telefonalternativ


Roger Pen

Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic

Ekstra deler

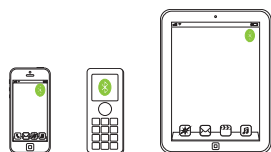


Bærbar enhet (trådløs via Bluetooth)



PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (trådløst via Bluetooth)



Tilleggsutstyr:
Bluetooth USB-adapter

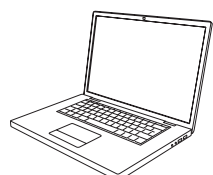


PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (via kabel)



Tilleggsutstyr:
Bluetooth USB-adapter



Hustelefon (via kabel)

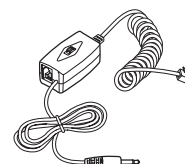

Adapter for
telefonopptak

Telefonavdeling



Hub for kommunikasjon
via hodetelefon og
Bluetooth USB-adapter

Du finner flere telefonalternativer fra Phonak hvis du går til www.phonak.com/phone-solutions

Bærbar enhet med Bluetooth-funksjon


Nødvendig enhet



Roger Pen

Bruke Bluetooth

Du trenger bare å parkoble Roger Pen med den Bluetooth-aktiverte enheten. Du trenger ikke å holde telefonen til øret for å ringe. Og det beste av alt er at du hører den som ringer, i begge ørene.

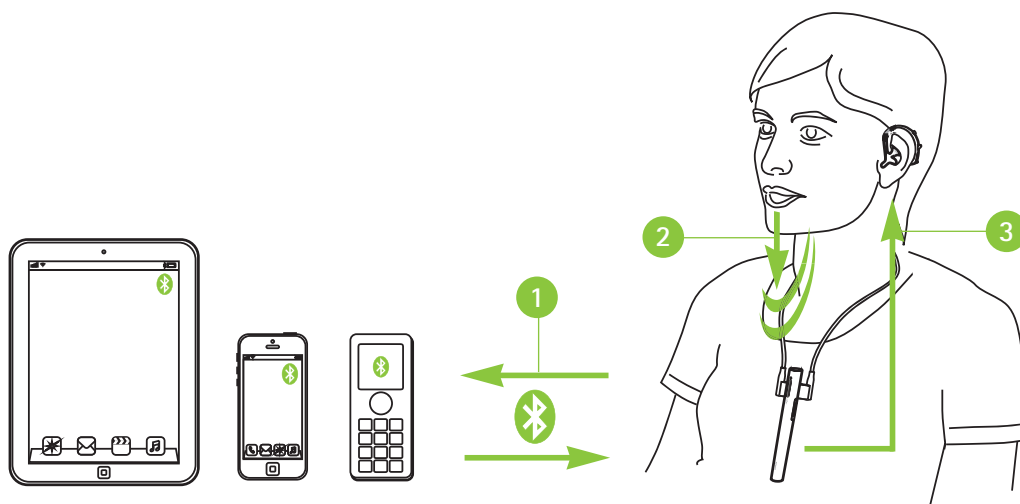


- 1 Parkoble den bærbare enheten med Roger Pen.
- 2 Snakk inn i Roger Pen under samtalen.
- 3 Hør innringerens stemme i begge ørene.

PC / bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (VoIP, f.eks. Skype), trådløst via Bluetooth

Nødvendige enheter




Roger Pen

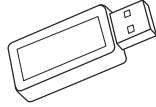

Bluetooth USB-adapter (f.eks. Sennheiser BTD 500 USB, Phonak delenummer: 076-0856)

Bruke Bluetooth Internett (VoIP, f.eks. Skype), trådløst via Bluetooth

Den integrerte Bluetooth-modulen eller tilleggsutstyret Bluetooth USB-adapter oppgraderer Roger Pen til en håndfri VoIP-løsning. Med Roger Pen rundt halsen kan du ringe over Internett når som helst og ha begge hendene fri for å ta notater.

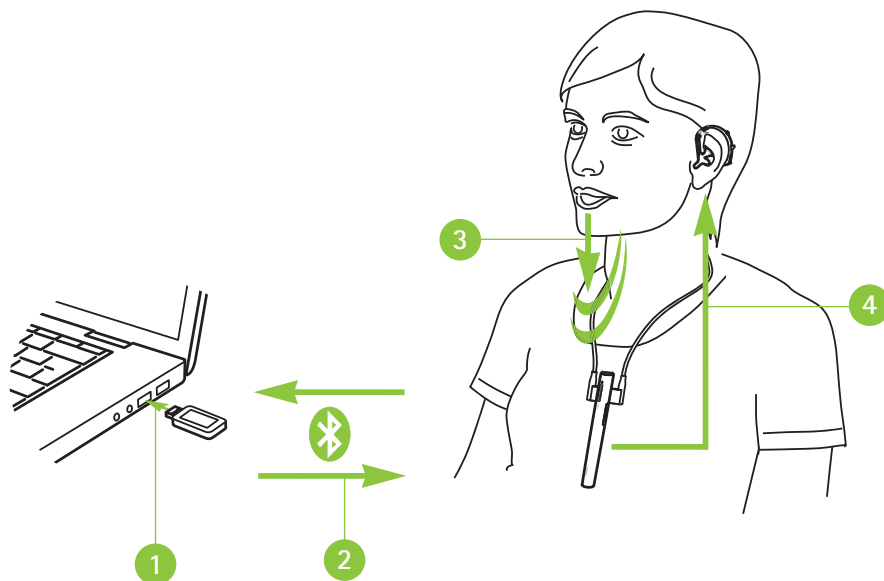

- 1 Sett Bluetooth USB-adapteren inn i en USB-port på PC-en / den bærbare datamaskinen.
- 2 Parkoble Bluetooth USB-adapteren med Roger Pen.
- 3 Snakk inn i Roger Pen under samtalen.
- 4 Hør innringerens stemme i begge ørene.

PC / bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (VoIP, f.eks. Skype) via kabel

Medfølgende enheter



Roger Pen




Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic

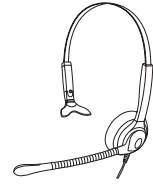

Tilleggsutstyr: Ekstern mikrofon som bæres på hodet

Bruke de integrerte mikrofonene fra en PC / bærbar datamaskin

Dette alternativet er enkelt å stille inn og sender innringerens stemme direkte til begge ørene.

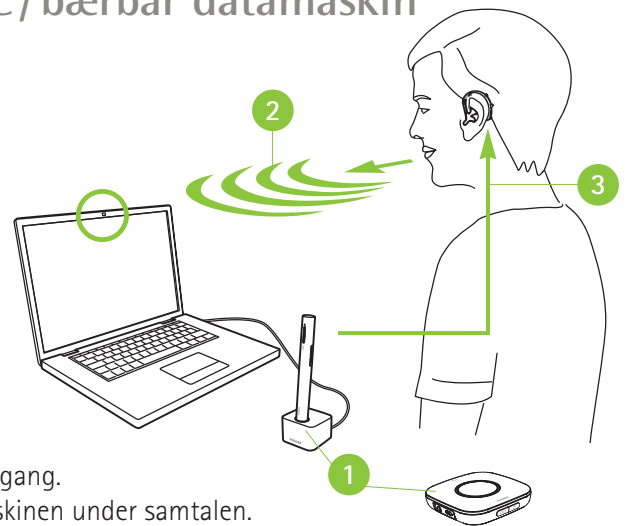


- 1 Koble hodetelefonutgangen på PC-en / den bærbare datamaskinen til dokkingstasjonens audioinngang eller direkte til mikrofonens audioinngang.
- 2 Snakk inn i den integrerte mikrofonen på PC-en / den bærbare datamaskinen under samtalen.
- 3 Hør innringerens stemme i begge ørene.

Bruke ekstern mikrofon som bæres på hodet

Hvis du bruker en ekstern mikrofon som bæres på hodet, vil det gi din egen stemme bedre lyd kvalitet.

Merk: Du må kanskje justere lydinnstillingene på PC-en eller i VoIPprogramvaren for å definere 3,5 mm jackpluggen som audioutgang og USB-mikrofonen kun som mikrofoninngang.

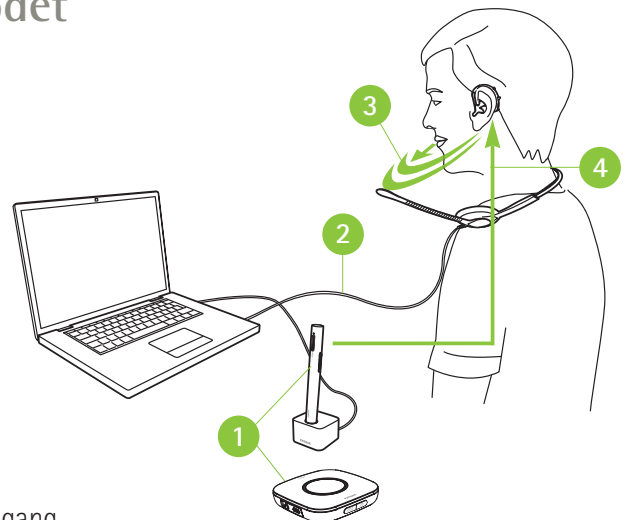

- 1 Koble hodetelefonutgangen på PC-en / den bærbare datamaskinen til dokkingstasjonens audioinngang eller direkte til mikrofonens audioinngang.
- 2 Koble mikrofonen som bæres på hodet, til mikrofoninngangen på PC-en / den bærbare datamaskinen – eller du kan koble hodetelefonene til en USB-port hvis det er USB-hodetelefoner.
- 3 Snakk inn i den eksterne mikrofonen under samtalen.
- 4 Hør innringerens stemme i begge ørene.

Fasttelefoner

Nødvendige enheter



Roger Pen




Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic

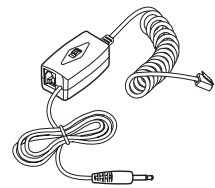

Adapter for telefonopptak
(f.eks. Phone Kit 055-4064)

Bruke adapter for telefonopptak

For å svare på telefonen tar du opp røret og holder det mot munnen, fordi du må fortsatt snakke inn i telefonrøret. Stemmen fra den som ringer, sendes imidlertid direkte til begge ørene.

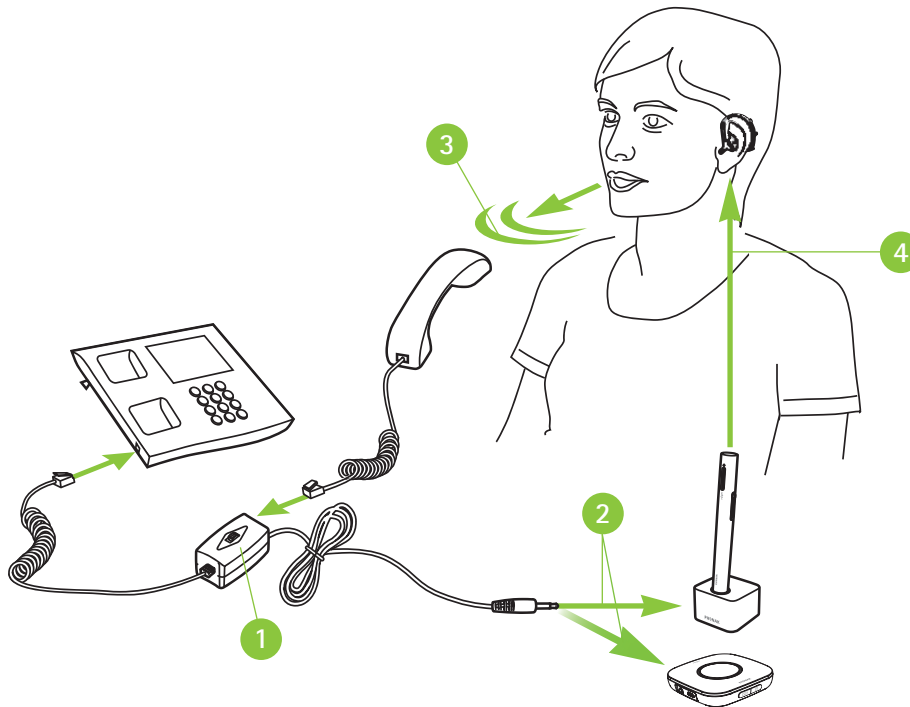



- 1 Monter adapteren for telefonopptak mellom telefonen og røret.
- 2 Koble audioutgangen på adapteren for telefonopptak til dokkingstasjonens audioinngang eller direkte til mikrofonens audioinngang.
- 3 Snakk inn i telefonrøret under samtalen.
- 4 Hør innringerens stemme i begge ørene.

Telefonavdeling (PC / bærbar datamaskin og fasttelefon), trådløst via Bluetooth

Nødvendige enheter




Roger Pen

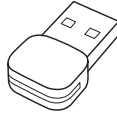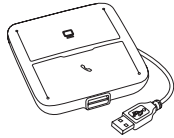

Hub for kommunikasjon via hodetelefon (f.eks. Plantronics MDA200), Bluetooth USB-adapter (f.eks. Plantronics PLT-BT300) Tilgjengelig som sett fra Phonak: 076-0031

Bruke Bluetooth

Dette er den mest avanserte løsningen for travle kontorsamtaler. Telefoner kan overføres mellom PC og kontortelefon. I begge tilfeller overføres telefonen til Roger Pen, som ideelt bæres rundt halsen, slik at du kan ha begge hendene fri under telefonsamtalen.

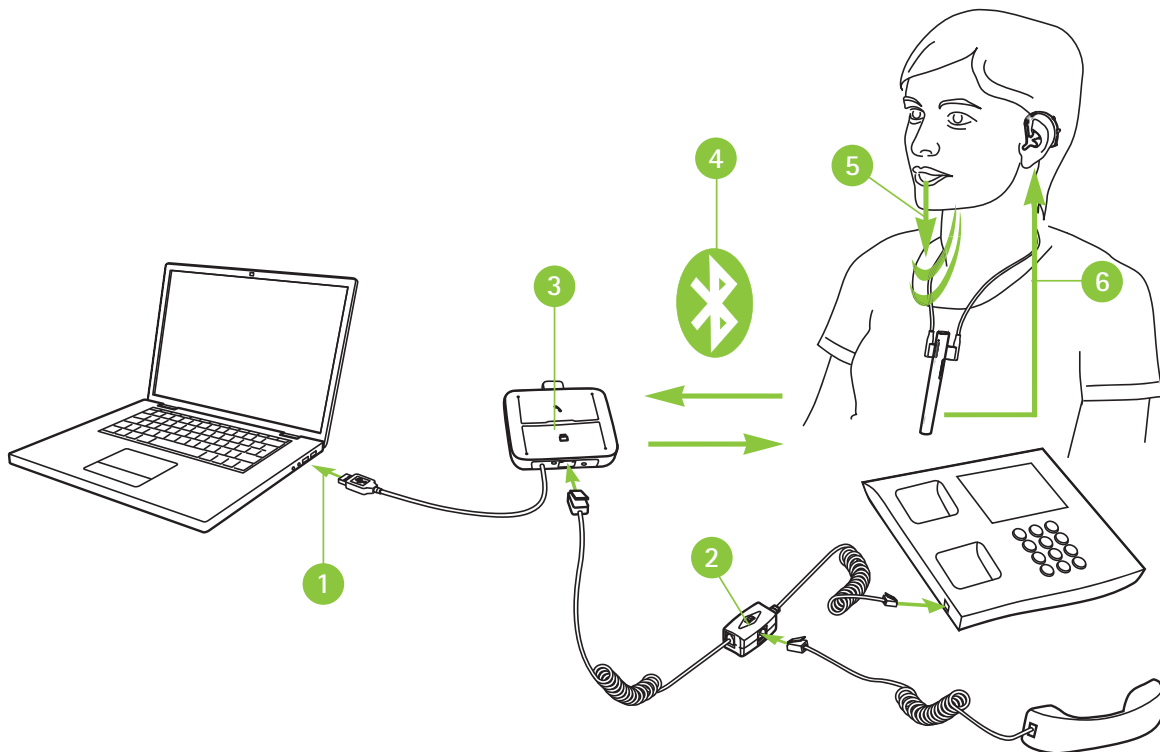

- 1 Koble hub for kommunikasjon via hodetelefon til PC-en / den bærbare datamaskinen.
- 2 Monter adapteren på hub for kommunikasjon via hodetelefon mellom telefonen og røret.
- 3 Sett Bluetooth USB-adapteren inn i hub for kommunikasjon via hodetelefon.
- 4 Parkoble Bluetooth USB-adapteren med Roger Pen.
- 5 Snakk inn i Roger Pen under samtalen.
- 6 Hør innringerens stemme i begge ørene.

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre folks liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com