

# Phonak Fast Facts



## Mini Charger Phonak

### Co to jest?

Mini Charger to mała kompaktowa ładowarka dla ładowalnych aparatów słuchowych Phonak Belong™. Dzięki niewielkim rozmiarom zajmuje niewiele miejsca, dlatego jest idealna jako dodatkowa lub zapasowa ładowarka.

### Dlaczego warto jej używać?

To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają małej wygodnej ładowarki.

### Jak jej używać?

Aby naładować aparaty słuchowe, wystarczy po prostu włożyć je do ładowarki Mini Charger. Po kliknięciu aparaty zostaną automatycznie wyłączone. Zielona lampka będzie powoli migać wskazując, że trwa ładowanie. Gdy przestanie migać i zapali się zielone światło ciągłe, będzie to oznaczać, że baterie są w pełni załadowane. Czas ładowania kompletnie rozładowanych aparatów słuchowych wynosi 3 godziny.



Więcej informacji na temat ładowalnych aparatów słuchowych Phonak Belong można znaleźć na stronie [www.phonakpro.pl](http://www.phonakpro.pl)