

Phonak – Fakty

roger

Roger™ Touchscreen Mic

Łatwiejsze uczenie się z Rogerem

Co to takiego?

Roger Touchscreen Mic jest jednym z najnowszych dodatków w portfolio Roger w edukacji. Transmituje on bezprzewodowo głos mówcy bezpośrednio do słuchacza, oferując poprawę rozumienia mowy w hałasie nawet o 35% w porównaniu do Dynamic FM i imponujące 54% w porównaniu z innymi systemami FM¹. Nowy interfejs użytkownika z dotykowym ekranem i wskaźnikiem świetlnym sprawia, że Roger Touchscreen Mic jest prosty i intuicyjny w użyciu. Zapewnia on zarówno nauczycielom i uczniom prosty, ale skuteczny sposób wskazania kiedy mikrofon jest włączony lub wyciszony.

Jak mogę go używać?

Roger Touchscreen Mic ciągle analizuje poziom mowy i hałasu przy jednoczesnej optymalizacji funkcjonalności i wydajności. Może być noszony przez nauczyciela (tryb zawieszki), położony na stole między małą grupą 2-5 uczniów (tryb małej grupy) lub skierowany przez ucznia w kierunku osoby, którą chce słyszeć, znajdującą się w bliskiej odległości (tryb wywiadu).

Jak działa tryb małej grupy?

Roger Touchscreen Mic można odpiąć od smyczy i położyć na stole między 2-5 uczniami. Wbudowany akcelerometr automatycznie aktywuje tryb małej grupy. Wykorzystując system trzech inteligentnych, wbudowanych mikrofonów automatycznie nakierunkuje się na mówiącego w grupie ucznia.

Dlaczego go używać?

Roger Touchscreen Mic jest idealny dla uczniów w interaktywnej, nowoczesnej klasie. Zapewnia lepszy dostęp do nauczyciela i wzajemnej komunikacji, zwiększając zrozumienie mowy i zaangażowanie we wszystkie aktywności.

1 Professor Thibodeau, Linda, PhD (2013), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, International Journal of Audiology.